



Dodatek k příloze č. 2 Řd-004-08-2

Exspirace sterilního materiálu

Druh obalu	Způsob sterilizace					Exspirace pro materiál	
	PS	HS	PLS	FS	ES	Volně uložený	Chráněný
Kazeta	-	+	-	-	-	24 hod.	48 hod.
Kontejner	+	+#	+#	-	-	6 dnů	12 týdnů
Papír/přířez #	+	-	-	-	-	6 dnů	12 týdnů
Papír - folie	+	-	-	+	+	6 dnů	12 týdnů
Polyamid	-	+	-	-	-	6 dnů	12 týdnů
Polypropylen	-	-	+	-	-	6 dnů	12 týdnů
Tyvek	-	-	+	+	+	6 dnů	12 týdnů
Netkaná textilie	+	-	-	***	***	6 dnů	12 týdnů
Dvojitý obal ##						12 týdnů	6 měsíců
Dvojitý obal a skladovací obal						1 rok	1 rok

Vysvětlivky:

- * kontejner s filtrem z termostabilního materiálu
- ** speciální kontejner podle doporučení výrobce sterilizátorů
- *** dle doporučení výrobce
- # vždy dvojitě balení do přířezů
- ## uzavřít svárem či lepením obě vrstvy
- PS sterilizace vlhkým teplem
- HS sterilizace proudícím horkým vzduchem
- PLS sterilizace plazmou
- FS sterilizace formaldehydem
- ES sterilizace ethylenoxidem