

Velmi dobrá materiálová
snášlivost a čisticí schopnost.

Mikrobac[®] forte

Bezaldehydový čisticí přípravek se slabou vůní. Široké spektrum účinnosti.



Výzkumem k prevenci infekcí. www.bode-science-center.com



Mikrobac® forte

Mikrobiologická účinnost

Bakterie a fungi			
EN	Baktericidní (EN 13727)		
Fáze 2 / Krok 1	- čisté podmínky	1,0 ml/l	0,1 % - 5 min
Účinnost podle normy EN	Fungicidní na kvasinky (EN 13624)		
Fáze 2 / Krok 1 (suspenní testy)	- čisté podmínky	1,0 ml/l	0,1 % - 15 min
testováno za čistých /špinavých		2,5 ml/l	0,25 % - 5 min
podmínek		10,0 ml/l	1,0 % - 1 min
	- špinavé podmínky	2,5 ml/l	0,25 % - 30 min
		5,0 ml/l	0,5 % - 5 min
EN	Baktericidní (EN 1040)	1,0 ml/l	0,1 % - 1 min
Fáze 1 / Základní testy	Fungicidní na kvasinky (EN 1275)	1,0 ml/l	0,1 % - 15 min
Účinnost podle EN Fáze 1 (Základní		2,5 ml/l	0,25 % - 1 min
testy / suspenní testy) bez znečištění			
VAH	Baktericidní/Fungicidní na kvasinky		
Založeno na suspenních a		2,5 ml/l	0,25 % - 4 h
praktických testech. Testováno za		5,0 ml/l	0,5 % - 1 h
čistých podmínek (tj. opticky čistém	- čisté podmínky	10,0 ml/l	1,0 % - 30 min
povrchu) /špinavých podmínek (tj.		15,0 ml/l	1,5 % - 15 min
viditelně znečištěný povrch).		20,0 ml/l	2,0 % - 5 min
	- špinavé podmínky	2,5 ml/l	0,25 % - 4 h
		5,0 ml/l	0,5 % - 1 h
		10,0 ml/l	1,0 % - 30 min
		15,0 ml/l	1,5 % - 15 min
		25,0 ml/l	2,5 % - 5 min
DGHM	Dezinfekce koupacích van	20,0 ml/l	2,0 % - 3 min
Hodnocena účinnost na bakterie	Tuberkulocidní (<i>M. terrae</i>)	20,0 ml/l	2,0 % - 2 h
(podle Německé společnosti pro		25,0 ml/l	2,5 % - 1 h
hygienu a mikrobiologii (DGHM))			
Viry			
EN	Adenovirus (EN 14476)		
Fáze 2 / Krok 1	- čisté podmínky	40,0 ml/l	4,0 % - 4 h
Účinnost podle EN Fáze 2 / Krok 1	- špinavé podmínky	40,0 ml/l	4,0 % - 4 h
(suspenní testy), testováno za čistých			
/špinavých podmínek	Virucidní na obalené viry	2,5 ml/l	0,25 % - 30 min
	(vč. HBV, HIV, HCV)	5,0 ml/l	0,5 % - 5 min
Účinnost proti virům (Německá			
asociace pro kontrolu virových	SARS-CoV	5,0 ml/l	0,5 % - 30 min
onemocnění [DVV])			
Hodnocena účinnost na obalené viry	Adenovirus	15,0 ml/l	1,5 % - 4 h
(podle DVV)	Polyomavirus	5,0 ml/l	0,5 % - 2 h
Hodnocena účinnost na neobalené viry		10,0 ml/l	1,0 % - 30 min
(DVV)	Rotavirus	2,5 ml/l	0,25 % - 5 min
Hodnocena účinnost na neobalené viry	MNV		
(podle DVV)	- čisté podmínky	20,0 ml/l	2,0 % - 4 h
Hodnocena účinnost na neobalené viry	- špinavé podmínky	40,0 ml/l	4,0 % - 4 h
(podle EN)			
(Potravinářský) průmysl			
Ověřená účinnost povrchové	- mírné znečištění (20 °C)	5,0 ml/l	0,5 % - 1 h
dezinfekce v potravinářské oblasti		15,0 ml/l	1,5 % - 30 min
Německé veterinární lékařské	- mírné znečištění (10 °C)	10,0 ml/l	1,0 % - 1 h
společnosti (DVG): baktericidní a		20,0 ml/l	2,0 % - 30 min
fungicidní účinnost.	- silné znečištění (20 °C)	10,0 ml/l	1,0 % - 1 h
		20,0 ml/l	2,0 % - 30 min
	- silné znečištění (10 °C)	20,0 ml/l	2,0 % - 1 hr
		30,0 ml/l	3,0 % - 30 min

Chemicko-fyzikální údaje

Koncentrát:

■ Hodnota pH cca 8-9

0.5% roztok:

■ Hodnota pH cca 8

■ Hustota (20 °C) cca 1,01 g/cm³


Exspirace

Po otevření

■ v pevně uzavřeném
kanystru: 12 měsíců

Pracovní roztok

■ v zásobníku BODE X-Wipes: 28 dní

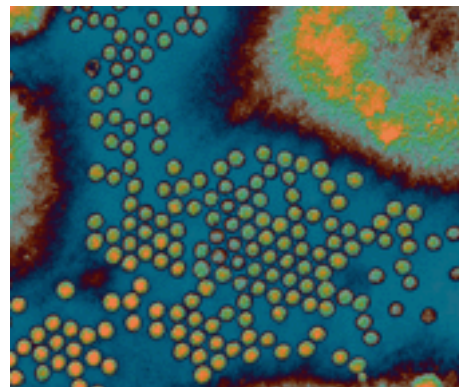



Balení

980434 sáček 20 ml – kartón 250 ks

895665/3 sáček 20 ml – 1 ks

981179 kanistr 5 l

Poznámka: Doporučení našich přípravků jsou založena na vědeckých testech a jsou uvedena v dobré víře. Podrobnější doporučení, např. materiálová snášenlivost, jsou možná pouze v konkrétních případech. Naše doporučení jsou nezávazná a nepředstavují žádnou záruku. Nejsou vyloučena vlastní testování přípravku pro vlastní účely a výrobu. V tomto případě nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Toto je v souladu s našimi všeobecnými podmínkami nabídky a prodeje.

05/13

Naše hygienické a dezinfekční přípravky zajišťují nejlepší možnou kvalitu, což je potvrzeno komplexními důkazy o účinnosti a vědeckým výzkumem a vývojem.

Výzkumem k prevenci infekcí. www.bode-science-center.com

