



DEZINFEKČNÍ A HYGIENICKÝ PROGRAM

LORIKA[®]
hygienický servis CZ

LORIKA[®] CZ
www.lorika.cz

NAŠE NABÍDKA JE URČENA PRO:

nemocnice, polikliniky, LDN, ambulance, privátní ordinace, laboratoře, prádelny a čistírny, úklidové firmy, veterinární zařízení, farmaceutickou a zdravotnickou výrobu, léčebny, lázně, domovy důchodců, školy, restaurace, jídelny, hotely, potravinářské provozy a výrobu, kadeřnictví, pedikúry, bazény, fitnesscentra, solária, kosmetická studia.

Vážení zákazníci,

společnost LORIKA CZ Olomouc, jejíž nabídku otevíráte, se zabývá hygienickým servisem od roku 1993. Jde o ryze českou společnost se sídlem v Olomouci a pobočkami v Náchodě, Horažďovicích a Teplicích v Čechách. Již od počátku jsme zaměřeni na oblasti trhu kde sanitace, hygiena a čistota jsou nezbytným požadavkem. Hlavními nosnými programy firmy byly vždy dezinfekční přípravky a čisticí chemie, jednorázové systémy v personální hygieně a výrobky určené k splnění nároků hygieny práce. Sortiment firmy se od doby vzniku postupně rozšiřoval co do počtu dodavatelských firem a položek zboží, avšak hlavní směr byl dán na počátku – **h y g i e n i c k ý s e r v i s**.

Portfolio naší činnosti je především v obchodních aktivitách, menší část obrátu společnosti činí služby. Poskytované služby jsou jednak vázány na náš obchodní sortiment, vše, co nabízíme, zároveň montujeme a poskytujeme k tomu servis, avšak hlavní objem služeb je dán provozováním našeho značkového systému výměnných rohožových zón Šlápni na to![®] Jde o periodickou výměnu a údržbu nášlapných interiérových rohoží.

LORIKA CZ je však více obchodní společností. Na území České republiky

a prostřednictvím partnerské firmy LORIKA Slovakia i na Slovensku nabízíme sortiment našich dodavatelských organizací – výrobců. Jsou mezi nimi zastoupeny jak tuzemské, tak zahraniční firmy. Na veškerý sortiment zastupovaných výrobců poskytujeme poradenský servis a odbornou pomoc. Naši obchodní zástupci jsou školeni přímo u výrobců a dostávají od nich odbornou podporu při řešení složitějších zadání.

Mezi základní partnery naší firmy patří společnost MPD Plus v Rakovníku – výrobce dezinfekčního programu nabízeného v tomto katalogu. Spolu s dezinfekcemi je tato firma na trhu úspěšná také sortimentem specializované chemie pro potravinářskou sanitaci a průmyslové použití. V únoru 2001 firma získala certifikát ISO 9001. LORIKA CZ je generálním distributorem dezinfekčního programu společnosti MPD Plus. Spolupráce našich firem přinesla vývoj zvláště v kapitole dezinfikování ploch. K zákazníkům se nyní dostává čisticí systém, který nahlíží novým způsobem na údržbu ploch podléhajících dezinfekčnímu režimu. MPD Plus také pro naši společnost vyrábí několik značkových produktů pod obchodní známkou ARIOSIO[®].

LORIKA CZ je také autorizovaným distributorem společnosti KIMBERLY-CLARK a.s., divize Professional. Jde o jednu z nejvýznamnějších světových firem v oboru výrobků personální hygieny, průmyslových utěrkových systémů a ochranných pracovních obleků. Své produkty vyrábí po celém světě včetně ČR. Naše firma má od tohoto výrobce v sortimentu velmi kvalitní výrobky: papírové produkty, textilní materiály, utěrkové výrobky kombinované s polypropylenem. Hygienické systémy, které nabízíme, plní požadavky současné legislativy na jednorázové materiály pro zdravotnictví, potravinářství a služby.

Dalšími dodavateli naší společnosti jsou OPHARDT Product (dávkovací systémy v nerez provedení), Eurofrey a WERKSITZ (pracovní židle a protiúnavové rohože), WOM International (čisticí nášlapné zóny). V zadní části tohoto katalogu naleznete výběr z produkce zmiňovaných firem.

Vám, našim současným zákazníkům, děkujeme za přízeň a pracujeme na tom, abyste nám ji zachovali i nadále.

Vás, naši noví zákazníci, se budeme snažit plně uspokojit kvalitou našich služeb a nabízených výrobků.



Obsah katalogu

DEZINFEKČNÍ PROGRAM

Obecné zásady

Dezinfekce a mytí ploch a předmětů, dezinfekce prádla

Rychlá dezinfekce menších ploch, nástrojů a pomůcek postříkem

Neutralizace a odstraňování starších vrstev dezinfekčních přípravků

Dezinfekce a čištění nástrojů, pomůcek, endoskopů

Mytí, dezinfekce a následná péče o ruce a pokožku

Dezinfekce a čištění hemodialyzačních monitorů, odsávacích přístrojů, respirátorů

Dezinfekční plán

Tabulka ředění

Aplikační pomůcky, dávkovače dezinfekčních prostředků

ředění a používání dezinfekčních přípravků
bezpečnosti při práci s dezinfekčními přípravky
první pomoci
skladování, likvidace zbytků a obalů

přípravky se ředí vodou

DEZOX®

DESUR®

DEZIKON®

SANITEN®

přípravek má alkoholový základ,
neředí se

GUTTAR®

nezbytný článek dezinfekčního
režimu pro povrchy opakovaně
dezinfikované jednofázovými postupy

LORIQUAT®

roztoky k dezinfekci předmětů
od krve, sekretů
a jiného biologického znečištění

DEZIPUR®

SEPTAN®

hygienické a předoperační mytí
hygienická dezinfekce
chirurgická dezinfekce
regenerace

ARIOSO SEPT®

MANOX®

MANEPT®

ARIOSO LAUDY®

RENOX®

souhrnný přehled dezinfekcí,
způsobu jejich použití, ředění,
expozic a spektrálních účinností

pomůcka pro správné naředění
pracovního roztoku

HYGIENICKÝ PROGRAM

AQUA – špičkový systém pro personální hygienu

Dodávky náplní, ručníků, pytlů

Úklidové vozíky, pomůcky a příslušenství

Pracovní židle a protiúnarové rohože

dávkovače papírových ručníků,
tekutého mýdla, skládaného toaletního
papíru i v JUMBO rolích,
osvěžovač vzduchu

doporučení nejvhodnějších typů
utěrek pro vaše stírací úkoly

hygiena práce

OBECNÉ ZÁSADY ŘEDĚNÍ A POUŽÍVÁNÍ DEZINFEKČNÍCH PŘÍPRAVKŮ

Z hlediska ředění dělíme přípravky na ty, které se ředí vodou a vytvářejí pracovní roztoky, a na přípravky, které se aplikují v koncentrované formě. V druhém případě jde obvykle o přípravky k dezinfekci rukou a rychlou dezinfekci menších ploch postříkem.

Pracovní dezinfekční roztoky se vytvářejí ředěním přípravků studenou pitnou vodou. Zamezuje se tím znehodnocování dezinfekce a úniku chemických látek do prostředí, k čemuž při použití teplé vody u většiny přípravků dochází.

Pracovní dezinfekční roztoky se připravují odměřením nebo, v případě tuhých látek, odvážením příslušného množství přípravku a vody. Pracovní roztoky se připravují co nejkratší dobu před aplikací.

Při přípravě pracovních roztoků se daný dezinfekční prostředek považuje za 100% koncentrát, tedy, je-li například požadován 2% pracovní roztok, bude tvořen 2 díly dezinfekčního přípravku a 98 díly vody.

Přípravky je nutno ředit přesně na požadovanou koncentraci. Při překračování dochází ke zbytečné expozici prostředí a osob chemickými látkami, a náklady na dezinfekci stoupají.

Naopak příliš slabé roztoky mohou vytvářet prostor pro přežívání mikroorganismů a proces dezinfekce je při všech vynaložených nákladech neúčinný.

Dezinfekční přípravky se nesmí míchat s jinými chemikáliemi, pokud výrobce neuvádí doporučení k jinému postupu. Plochy přicházející do styku s potravinami se po dezinfekci řádně opláchnou pitnou vodou. V dezinfekčním plánu je třeba střídát přípravky s různými účinnými látkami. Při dezinfikování ploch je třeba brát v úvahu kvalitu povrchu. Se vzrůstající drsností nebo pórovitostí klesá účinnost prováděné dezinfekce a doporučuje se zvýšit koncentraci roztoku.

OBECNÉ ZÁSADY BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S DEZINFEKČNÍMI PŘÍPRAVKY

Při používání dezinfekčních přípravků a jejich roztoků je třeba dodržovat zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Nezbytné je používání předepsaných ochranných pomůcek, a to v závislosti na charakteru práce. Zcela základně je třeba chránit pokožku rukou rukavicemi, oči, zvláště při ředění koncentrátů, brýlemi nebo štítem. Pro zamezení nebezpečí požití nebo požáru se při práci nejí, nepije a nekouří. Při rozsáhlých aplikacích je nutno dezinfikované prostory větrat. Po práci se ruce umyjí a ošetří reparačním krémem.

F  vysoce hořlavý GUTTAR MANOX MANEPT	X_i  dráždivý DEZOX SANITEN DEZIPUR
X_n  zdraví škodlivý DESUR DEZIKON SEPTAN	C  žravý RENOX

Dezinfekční přípravky jsou obvykle směsí chemických látek. Jednotlivé zastoupené látky mají různou funkci; likvidují mikroby, myjí, stabilizují nebo celkově zlepšují parametry výrobku. Nejdůležitější z výjmenovaných funkcí je likvidace mikrobů. Chemickým látkám, které toto zabezpečují, říkáme aktivní nebo také účinné látky.

Současné přípravky jsou založeny na mnoha typech aktivních látek, které se dnes většinou kombinují s cílem rozšířit spektrum antimikrobiální účinnosti a zkrátit dobu expozice. Aktivní látky mají jeden společný úkol, kterým je cílená likvidace mikrobů. Jde proto o látky s nepříjemnými nebo nebezpečnými vlastnostmi i pro lidský organismus. Jednou z povinností výrobců a dovozců je klasifikovat své výrobky z pohledu nebezpečnosti a upozornit na tuto skutečnost zákazníka formou textu (R-věty) a symboliky umístěné na etiketách výrobku. Uvádíme zde přehled nejčastěji uváděných symbolů včetně uvedení výrobků našeho programu, které spadají do jednotlivých okruhů značení.

Výrobce je dále povinen uvádět pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty) a vypracovat bezpečnostní listy na přípravky, které mají jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v tabulce.

Dezinfekční přípravky v tomto programu jsou schváleny k prodeji a používání. Značení a dokumentace je v souladu se zákonem a upravujícími předpisy. Veškeré relevantní informace, schválení, bezpečnostní listy apod. zasíláme elektronickou poštou nebo na disketě.

OBECNÉ ZÁSADY PRVNÍ POMOCI

- potřísnění kůže – kontaminovaný oděv se ihned odloží. Postižené místo se umyje vodou a mýdlem a ošetří vhodným reparačním krémem. Sliznice se oplachují velkým množstvím vody.
- zasažení zraku – při násilně otevřených víčkách se oči vyplachují vlažnou vodou alespoň 15 minut
- náhodné požití – postiženému se dlouze vyplachují ústa a, pouze je-li při vědomí, dá se mu vypít malé množství vody
- nadýchání (nevolnost) – postižený se vyvede z pracoviště do nezaměřeného prostoru. Jsou-li potíže způsobeny chlórem, postižený nesmí chodit.

Ve všech případech podezření na nebezpečí poškození zdraví, zvláště při náhodném požití, je třeba neprodleně vyhledat odbornou pomoc a ukázat etiketu nebo obal výrobku nebo bezpečnostní list. Je také možné se obrátit na Toxikologické informační středisko na Klinice nemocí z povolání, telefon 224 919 293 nebo 224 915 402.

OBECNÉ ZÁSADY SKLADOVÁNÍ, LIKVIDACE ZBYTKŮ A OBALŮ

Dezinfekční přípravky se skladují v originálních uzavřených obalech. Nikdy se ke skladování dezinfekcí nepoužívají obaly od potravin nebo nápojů jako náhradní obaly! Skladové prostory musí být suché, čisté a chladné, bez dosahu přímého slunečního světla. Dezinfekce se skladují odděleně od potravin, krmiv a jiných chemikálií a z dosahu dětí.

Prázdné obaly se vyplachují vodou a spalují ve spalovnách. Zbytky koncentrátů se likvidují naředěním vodou a vytlitím do odpadu.



Pravidla pro použití:

Přípravek se ředí studenou pitnou vodou. Dezinfekčního účinku je dosaženo omýváním ploch roztokem přípravku (předměty možno ponořit). S dezinfikovaných povrchů je vhodné předem odstranit hrubá znečištění. Ošetřené povrchy se neutírají do sucha. Přírodní zaschnutí vytvoří ochrannou vrstvu proti bakteriím a plísním.

Ke střídání aktivních látek v dezinfekčním plánu se kombinuje DEZIKON (chlór), DESUR (aldehydy) a SANITEN (KAS, H₂O₂).

Ke snímání nakumulovaných vrstev dezinfekcí doporučujeme aplikovat pravidelně na veškeré plochy pod dezinfekčními režimy přípravek LORIQUAT (strana 10).

Koncentrát ani jeho roztoky nepřelévát do kovových nádob.

Balení:

5 l kanystr

Doba použitelnosti:

12 měsíců

Spektrální účinnost: A B T M

baktericidní, fungicidní, virucidní, tuberkulocidní

- Nosnou aktivní látkou je kyslík uvolněný z peroxidu vodíku
- Snížené riziko alergických reakcí, neobsahuje aldehydy
- Opakovanou aplikací vytváří kumulativní účinek proti bakteriím
- Výborné mycí účinky na nečistotu a krev
- Pachově neutrální

Z hlediska vlivu na personál a pacienty velmi moderně a bezpečně koncipovaný dezinfekční přípravek bez aldehydů, proto vhodný pro porodnická a novorozenecká oddělení, inkubátory, plicní a alergologická oddělení, oddělení popálenin, operační sály, JIP, ARO, balneoterapie, fyzioterapie.

Aplikační koncentrace, expozice a účinnost

jednofázová dezinfekce a čištění povrchů	1 % roztok při expozici 30 min. nebo do zaschnutí	A B
pravidelné používání – kumulativní efekt proti bakteriím a plísním	0,5 % roztok při expozici 30 min. nebo do zaschnutí	A
TBC, zvýšené riziko virových nákaz (epidemiologická situace)	2 % roztok při expozici 30 min. (TBC 60 minut)	A B T M

A usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkovitých hub **B** virucidní účinnost na široké spektrum virů (včetně malých neobalených virů) **C** inaktivace bakteriálních spór **T** usmrcení mykobakterií komplexu M. tuberculosis **M** usmrcení potenciálně patogenních mykobakterií **V** fungicidní účinek na mikroskopické vláknité houby (plísně) doložený laboratorními expertizami

Poměr aktivních látek (Číslo udává obsah látky v gramech ve 100 g přípravku)



- Dále obsahuje:
- komplexotvorné látky
 - neionogenní tensidy
 - stabilizátory



Spektrální účinnost: A B T M V

baktericidní, fungicidní, virucidní, tuberkulocidní

- Nosnou aktivní látkou je komplex aldehydů, neobsahuje formaldehyd
- Spolehlivý dezinfekční účinek
- Opakovanou aplikací vytváří kumulativní účinek proti bakteriím
- Po aplikaci svěže voní
- Výborný mycí efekt
- Vhodný na všechny typy povrchů
- Vhodný pro použití v mycích strojích

Operační sály, JIP, ARO, lůžková oddělení, prádelny. Vhodný k dezinfekci předmětů, obsahů nádob, laboratorního skla, pomůcek.

Pravidla pro použití:

Přípravek se ředí studenou pitnou vodou. Dezinfekčního účinku je dosaženo omýváním ploch, otíráním nebo ponořením předmětů do pracovního roztoku. Z povrchů je vhodné předem odstranit hrubá organická znečištění. Ošetřené povrchy se neutírají do sucha. Přirozené zaschnutí vytvoří ochrannou antibakteriální vrstvu.

Ke střídání aktivních látek v dezinfekčním plánu se kombinuje DEZIKON (chlór), DEZOX (peroxid vodíku) a SANITEN (KAS).

Ke snímání nakumulovaných vrstev dezinfekcí doporučujeme aplikovat pravidelně na veškeré plochy pod dezinfekčními režimy přípravek LORIQAT (strana 10).

Aplikační koncentrace, expozice a účinnost

jednofázová dezinfekce a čištění povrchů	1–3 % roztok při expozici 30 min. nebo do zaschnutí	A B V
pravidelné používání – kumulativní efekt proti bakteriím a plísním	0,5 % roztok při expozici 30 min. nebo do zaschnutí	A V
dezinfekce se zaměřením na M. tuberculosis a jiná mykobakteria	2 % roztok při expozici 60 min.	A B T M V

A usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkovitých hub **B** virucidní účinnost na široké spektrum virů (včetně malých neobalených virů) **C** inaktivace bakteriálních spór **T** usmrcení mykobakterií komplexu M. tuberculosis **M** usmrcení potenciálně patogenních mykobakterií **V** fungicidní účinek na mikroskopické vláknité houby (plísně) doložený laboratorními expertizami

Poměr aktivních látek (Číslo udává obsah látky v gramech ve 100 g přípravku)

Balení:

1 l láhev
5 l kanystr

Doba použitelnosti:

24 měsíců



- Dále obsahuje:
- komplexotvorné látky
 - neionogenní tensidy
 - parfém

DEZIKON®

Granulovaný prostředek určený pro dezinfekci a čištění ploch, předmětů a prádla



Spektrální účinnost: A B T M V

baktericidní, fungicidní, virucidní, tuberkulocidní

- Nosnou aktivní látkou je dichlorizokyanurát sodný
- Bez obsahu aldehydů
- Široké spektrum účinnosti a rychlý dezinfekční účinek
- Výborná čistící schopnost
- Vhodný k dezinfekci prádla
- Při aplikaci vyvolává pocit čistoty

Pravidla pro použití:

Přípravek se ředí studenou pitnou vodou. Dezinfekčního účinku je dosaženo omýváním ploch, otíráním nebo ponořením předmětů do pracovního roztoku. Z povrchů se předem odstraní hrubá organická znečištění. Ošetřené povrchy se neutírají do sucha. Předměty přicházející do styku s potravinami se po dezinfekci opláchnou pitnou vodou.

Prádlo se dezinfikuje před vlastním praním tak, že se zcela potopí do roztoku na uvedenou dobu expozice.

Ke střídání aktivních látek v dezinfekčním plánu se kombinuje SANITEN (KAS), DESUR (aldehydy) a DEZOX (peroxid vodíku).

Ke snímání nakumulovaných vrstev dezinfekcí doporučujeme aplikovat pravidelně na veškeré plochy pod dezinfekčními režimy přípravek LORIQUAT (strana 10).

Přípravek nekombinovat s jinými látkami!

Balení:

3 kg kyblík, 700 g dóza

Doba použitelnosti:

24 měsíců

Aplikační koncentrace, expozice a účinnost

jednofázová dezinfekce a čištění povrchů	1–3 % roztok při expozici 30 min. nebo do zaschnutí	A B T M V
mytí s dezinfekčním účinkem	0,5 % 30 min. nebo do zaschnutí	A V
dezinfekce prádla	0,5 % roztok při 30 min. 1 % roztok při 30 min.	A V A B T M V

A usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkovitých hub **B** virucidní účinnost na široké spektrum virů (včetně malých neobalených virů) **C** inaktivace bakteriálních spór **T** usmrcení mykobakterií komplexu *M. tuberculosis* **M** usmrcení potenciálně patogenních mykobakterií **V** fungicidní účinek na mikroskopické vláknité houby (plísňe) doložený laboratorními expertizami

Poměr aktivních látek (Číslo udává obsah látky v gramech ve 100 g přípravku)



22g dichlorizokyanurát sodný

pH 1 % roztoku 9-10

Dále obsahuje:

- anionaktivní tenzidy
- polyfosfátové buildery
- přísady

Podmínky skladování, likvidace zbytků koncentráту a obalů, bezpečnost práce a pravidla první pomoci jsou uvedena na etiketě výrobku a dále na straně 4 tohoto katalogu. Schváleno hlavním hygienikem ČR: HEM-381-12.7.01/19448



Spektrální účinnost: A T M V

baktericidní, fungicidní, tuberkulocidní

- Nosnou aktivní látkou je kvarterní amoniová sloučenina vhodně kombinovaná s peroxidem vodíku
- Neobsahuje aldehydy
- Opakovanou aplikací vytváří kumulativní účinek proti bakteriím
- Vynikající účinek proti mikroskopickým plísním a mykobakteriím
- Výborná čistící schopnost
- Po aplikaci příjemně voní

Pravidla pro použití:

Dezinfekčního účinku je dosaženo omýváním povrchů roztokem (předměty možno ponořit). Přípravek je možné ředit teplou pitnou vodou (50 °C). Z povrchu je vhodné předem odstranit hrubá znečištění. Ošetřené povrchy se neutírají do sucha. Přirozené zaschnutí vytvoří ochrannou antibakteriální vrstvu. Předměty přicházející do styku s potravinami se po dezinfekci opláchnou pitnou vodou.

Ke střídání aktivních látek v dezinfekčním plánu se kombinuje DEZIKON (chlór), DESUR (aldehydy) a DEZOX (peroxid vodíku).

Ke snímání nakumulovaných vrstev dezinfekci doporučujeme aplikovat pravidelně na veškeré plochy pod dezinfekčními režimy přípravek LORIQUAT (strana 10).

Koncentrát ani jeho roztoky nepřelévát do kovových nádob.

Balení:

5 l kanystr, 1 l láhev

Doba použitelnosti:

24 měsíců

Vhodný k pravidelnému dezinfikování všech ploch zdravotnických zařízení s menším rizikem virových nákaz a naopak se zvýšeným výskytem mikroskopických hub a mykobakterií. Silný fungicidní účinek spolu s absencí aldehydů předurčuje jeho použití v potravinářském průmyslu a v místech s vysokým rizikem výskytu plísní a kvasinek; koupaliště, lázně, sauny, fitcentra, šatny, ubytovací zařízení.

Aplikační koncentrace, expozice a účinnost

jednofázová dezinfekce a čištění povrchů	1–2 % roztok při expozici 30 minut nebo do zaschnutí	A V
pravidelné používání – kumulativní efekt proti bakteriím a plísním	0,5–0,75 % roztok při expozici 30 minut nebo do zaschnutí	A V
TBC a jiná mykobakteria	2 % roztok při expozici 30 minut	A T M V

A usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkovitých hub **B** virucidní účinnost na široké spektrum virů (včetně malých neobalených virů) **C** inaktivace bakteriálních spór **T** usmrcení mykobakterií komplexu *M. tuberculosis* **M** usmrcení potenciálně patogenních mykobakterií **V** fungicidní účinek na mikroskopické vláknité houby (plísně) doložený laboratorními expertizami


Poměr aktivních látek (Číslo udává obsah látky v gramech ve 100 g přípravku)



- Dále obsahuje:
- neionogenní tenzidy
 - buildery
 - vonné složky

GUTTAR®

Alkoholový prostředek určený k rychlé dezinfekci ploch
a předmětů postříkem

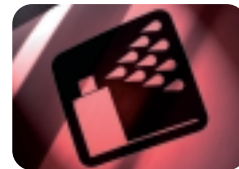

Pravidla pro použití:

Určen k rychlé dezinfekci malých ploch a předmětů v místech se zvýšeným rizikem infekce. Přípravek se aplikuje pomocí rozprašovače ze vzdálenosti 20–30 cm. Povrch musí být rovnoměrně smočen, počítá se asi se 40 ml.m⁻².

Před aplikací je potřeba odstranit hrubá znečištění.

Aplikovat tak, aby se zamezilo vzniku aerosolu. Při rozsáhlejší aplikaci je třeba zabezpečit větrání.

Přípravek zmatňuje lakované plochy.

Balení:

5 l kanystr
1 l láhev
500 ml láhev s rozprašovačem

Doba použitelnosti:

24 měsíců

Spektrální účinnost: A B T M

baktericidní, fungicidní, virucidní, tuberkulocidní

- Nosnou aktivní látkou je propan-2-ol
- Po aplikaci příjemně voní a rychle usychá
- Nezanedbává stopy na dezinfikovaném povrchu
- Neředí se a nanáší se pomocí rozprašovače
- Po zaschnutí vytvoří mikroskopický ochranný film
- Neobsahuje formaldehyd


Okamžitá dezinfekce menších ploch, předmětů a přístrojů, těžko dosažitelných míst, stomatologických koncovek, sanitních vozů a vozů na přepravu prádla, vyšetřovacích lehátek, solárií.

Expozice a spektrum účinnosti

rychlá dezinfekce	1–5 min.	A
doporučená dezinfekce (zaručený kompletní virucidní účinek)	15 min.	A B
TBC, zvýšená rizika nálezů, zvýšené organické znečištění (sporostatický na bakteriální spóry)	60 min.	A B T M

A usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkovitých hub **B** virucidní účinnost na široké spektrum virů (včetně malých neobalených virů) **C** inaktivace bakteriálních spor **T** usmrcení mykobakterií komplexu *M. tuberculosis* **M** usmrcení potenciálně patogenních mykobakterií **V** fungicidní účinek na mikroskopické vláknité houby (plísňe) doložený laboratorními expertizami

Poměr aktivních látek (Číslo udává obsah látky v gramech ve 100 g přípravku)

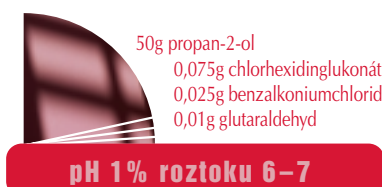

- Dále obsahuje: parfém

Podmínky skladování, likvidace zbytků koncentráту a obalů, bezpečnost práce a pravidla první pomoci jsou uvedena na etiketě výrobku a dále na straně 4 tohoto katalogu. Schváleno hlavním hygienikem ČR: HEM-381-16.2.00/6772

LORIQAT®

Speciální kapalný přípravek pro mytí povrchů podléhajících dezinfekčnímu režimu



- Neutralizuje a odstraňuje zaschlé zbytky dezinfekčních prostředků
- Potlačuje vhodné prostředí pro výskyt mikrobů
- Odstraňuje nepříjemné lepení obuvi k podlaze
- Účinně myje namáhané plochy
- Upravuje zaslý, matný či vzhledově nekompatní povrch

Obsahuje:

- anionaktivní látky
- neionogenní tenzidy
- aktivní komplex
- parfém

pH 1% roztoku 9-10

Určen na plochy pravidelně dezinfikované jednofázovými dezinfekcemi v libovolných koncentracích. Jde o veškeré plochy ve zdravotnictví, pro které je stanoven dezinfekční plán.

LORIQAT omezuje životní prostor mikrobům

Při dezinfikování na ploše zasychá chemická vrstva, která po určitý omezený čas chrání proti bakteriím. Každým dezinfekčním cyklem se kumulují další vrstvy a vytváří na ploše jakýsi nestejný film (jsou používány dezinfekční prostředky různého složení). Tento film má omezenou chemickou stabilitu a s časem a vnějšími vlivy klesá jeho aktivita. V takto chemicky poškozených antibakteriálně neaktivních vrstvách pak mohou přežívat mikroorganismy, mohou se dokonce adaptovat na prostředí a některé se mohou i množit (snadná biologická rozložitelnost některých látek přítomných v dezinfekčních prostředcích). Nanesený film se po čase stává špinou (živnou půdou) neboť dezinfekce probíhá pouze na jeho povrchu. Mechanickým poškozením filmu se nečistota obnažuje a může roznášet (např. obuvi).

LORIQAT odstraňuje „dolepování“

Tloušťka filmu narůstá v závislosti na koncentraci dezinfekčních přípravků a četnosti dezinfikování. Týdně vzroste až o desítky vrstev. Dosáhne-li výška filmu určité kritické hodnoty, začnou se horní vrstvy nebo i celý film lepit k podrážce obuvi. Mluvíme o tzv. „dolepování“. Při každém dalším zvlhčení filmu je dolepování intenzivnější.

LORIQAT upravuje vzhled povrchu

Film je lepitý a při jeho postupném „růstu“ se v něm zakonzervovala spousta mechanických i organických nečistot. Na frekventovaných místech se vyšlapává (odlepuje) a je tenčí. To spolu s dalšími vlivy (světlo, kombinace různých dezinfekcí) způsobuje rušivý vzhled povrchu; skvrny, matnost, barevná nestálost apod.

LORIQAT účinně myje namáhané povrchy

Jako čisticí přípravek má výborné mycí účinky na silně namáhané povrchy (poškrábané linoleum, drsné a pórovité plochy). Vymývá nečistoty hluboko ze škrábanců a spár. Detašuje skvrny na podlaze od předoperačních dezinfekcí kůže na operačních sálech.

LORIQAT by měl být trvalou součástí dezinfekčního plánu s periodou nasazení jeden týden, minimálně však jednou měsíčně. Optimální je zařadit jej při střídání dezinfekcí. Dále je nutno ho aplikovat při výskytu potíží (dolepování). Po stržení filmu s plochy doporučujeme povrch vydezinfikovat jednofázově 1% roztokem přípravku DEZOX.

Balení: 500 ml láhev

Doba použitelnosti: 24 měsíců

Pracovní postup

Pracovní roztok se nanáší na podlahu mopem nebo pomocí drhacích stroje. Povrch nesmí po dobu působení zaschnout! Podlaha se setře případně odsaje vodním vysavačem. Následuje omytí povrchu čistou vodou s vytíráním do sucha.

Typ prostor	Koncentrace	Doba působení	Četnost	Dezinfekce po aplikaci LORIQATu (jednofázová)
Prostory s vysokým stupněm čistoty dezinfikuje se s vysokou četností a vyššími koncentracemi, provoz je v době sanitace zastaven. <i>Operační sály a přilehlé prostory</i>	1 % 2 %	3 min. 1 min.	sanitární dny (obvykle 1x týdně)	Je-li sanitární úklid prováděn na konci operačního dne dezinfikuje se ráno před první operací.
Prostory s vysokým stupněm čistoty dezinfikuje se vyššími koncentracemi, nepřetržitý provoz nedovoluje úklid s časovou náročností. <i>JIP, ARO, novorozenecká oddělení</i>	2 %	1 min.	1x za 2 týdny	Následuje dezinfekce.
Ostatní prostory*) Nižší koncentrace, běžná četnost úklidu, většinou nepřetržitý provoz. <i>Ambulance, lůžková oddělení, společné prostory</i>	2 % 1 %	2–1 min. 3 min.	1 až 2x měsíčně 1x za 2 týdny	Je-li úklid prováděn na konci dne, dezinfikuje se ráno.

*) Aplikaci koncentrací, dobu působení a četnost použití lze upravit podle místních podmínek.

Podmínky skladování, likvidace zbytků koncentrátu a obalů jsou uvedeny na etiketě výrobku.

DEZIPUR®

Práškový dezinfekční přípravek na nástroje, předměty a plochy



Spektrální účinnost: A B T M

baktericidní, fungicidní, virucidní, tuberkulocidní

- Nosnou aktivní látkou je aktivní kyslík uvolněný z peroxoboritanu sodného
- Silný dezinfekční účinek
- Účinně rozpouští organická znečištění a napomáhá k jejich odstranění
- Dezinfikuje nástroje a pomůcky z kovů, plastů, skla, keramiky
- Nevhodný pro dezinfekci flexibilních endoskopů a předmětů obsahujících nikl či hliník
- Pachově neutrální
- Vhodný pro dezinfekci ultrazvukem

Pravidla pro použití:

Dezinfekční roztok se připraví rozpouštěním odměřeného množství přípravku v příslušném objemu studené pitné vody. Roztok se neohřívá ani nemíchá, úsada na dně nádoby není na závadu. Dezinfikovaný materiál se ponoří do lázně na uvedenou dobu expozice. Následuje vyjmutí, mechanické dočištění, oplach destilovanou nebo pitnou vodou, sušení a sterilizace. Rozměrné předměty či plochy se roztokem omyjí.

Roztok se připravuje 10 minut před použitím.

Balení obsahuje odměрку (2 odměrky přípravku v 1 litru vody vytvoří 2 % roztok).

Roztok se připravuje denně čerstvý!

Aplikační koncentrace, expozice a účinnost

chirurgické nástroje, přístroje, dezinfekce ploch (do zaschnutí), nástroje pedikúry a manikúry, apod.	1 %	60 minut	A B
	2 %	30 minut	A B
	2 %	60 minut	A B T M
balneoterapie (mytí koupacích van)	2 %	2 až 5 minut	A

Použité nástroje a předměty se ihned po použití vloží do pracovního roztoku DEZIPURu k dezinfekci s virucidní účinností. Doporučujeme nemanipulovat s kontaminovanými nástroji bez výše uvedeného postupu.

A usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkovitých hub **B** virucidní účinnost na široké spektrum virů (včetně malých neobalených virů) **C** inaktivace bakteriálních spór **T** usmrcení mykobakterií komplexu *M. tuberculosis* **M** usmrcení potenciálně patogenních mykobakterií **V** fungicidní účinek na mikroskopické vláknité houby (plísňe) doložený laboratorními expertizami

Poměr aktivních látek (Číslo udává obsah látky v gramech ve 100 g přípravku)

Balení:

3 kg kyblík
700 g dóza

Doba použitelnosti:

24 měsíců



- Dále obsahuje:
- aktivátor
 - tenzidy
 - inhibitory koroze

Podmínky skladování, likvidace zbytků koncentráту a obalů, bezpečnost práce a pravidla první pomoci jsou uvedena na etiketě výrobku a dále na straně 4 tohoto katalogu. Schváleno hlavním hygienikem ČR: HEM-381-3.3.00/9874



Kapalný prostředek na dezinfekci chirurgických nástrojů a endoskopů



Spektrální účinnost: A B T M

baktericidní, fungicidní, virucidní, tuberkulocidní

- Nosnou aktivní látkou je komplex aldehydů
- Vhodný na nástroje z kovů, skla, gumy, plastů, tvrzené pryže, termolabilních materiálů, slitin hliníku
- Nepoužívat k dezinfekci ploch
- Obsahuje účinná antikoroziiva
- Vysoká čisticí schopnost

Dekontaminační lázeň pro flexibilní endoskopy a chirurgické nástroje (2–3 % / 30–15 min).

Pravidla pro použití:

K vytvoření dezinfekčního roztoku se použije výhradně studená pitná voda. Nástroje se do roztoku zcela ponoří na dobu expozice. Je třeba dbát na dokonalé smočení předmětů v lázni. Dezinfekční nádoba musí být při dezinfekci uzavřena. Po provedené dezinfekci následuje pečlivé dočištění, opláchnutí a vysušení.

In vazivní nástroje a endoskopy postupují ke sterilizaci.

Roztok se připravuje denně čerstvý!

Ke střídání aktivních látek se na dezinfekci a čištění nástrojů sterilizovatelných fyzikálně používá DEZIPUR (kyslíková báze).

Nepřidávají se jiné čisticí nebo dezinfekční přípravky.

Balení:

5 l kanystr
1 l láhev

Doba použitelnosti:

24 měsíců

Aplikační koncentrace, expozice a účinnost

chirurgické instrumentárium,
flexibilní endoskopy, zdravotnické
pomůcky a předměty

1 %
2 %
3 %


60 minut
30 minut
60 minut

A B
A B
A B T M

Použité nástroje a předměty se ihned po použití vloží do pracovního roztoku SEPTANu k dezinfekci s virucidní účinností. Doporučujeme nemanipulovat s kontaminovanými nástroji bez výše uvedeného postupu. Pouze endoskopy se před vložením do roztoku otrou utěrkou zvlhčenou koncentrátem přípravku a vyčistí se kanály.

A usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkovitých hub **B** virucidní účinnost na široké spektrum virů (včetně malých neobalených virů) **C** inaktivace bakteriálních spor **T** usmrcení mykobakterií komplexu M. tuberculosis **M** usmrcení potenciálně patogenních mykobakterií **V** fungicidní účinek na mikroskopické vláknité houby (plísňe) doložený laboratorními expertizami

Poměr aktivních látek (Číslo udává obsah látky v gramech ve 100 g přípravku)

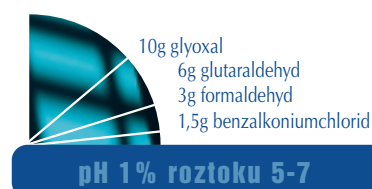

Dále obsahuje:

- komplexotvorné látky
- polyfosfáty
- neionogenní tensidy
- parfém



Spektrální účinnost: A

baktericidní, fungicidní

- Nosnou aktivní látkou je izopropylalkohol
- Aplikuje se neředěný
- Rychle schne, neutírá se
- Dermatologické přísady zabraňují vysušování pokožky
- Nebarví pokožku ani textil
- Příjemně voní

Veškeré úseky ve zdravotnických zařízeních s požadovanou hygienickou dezinfekcí rukou v provozním řádu, prádelny, kuchyně, WC, rychlá terénní dezinfekce. Nákladově úspornější systém oproti používání dezinfekcí s chirurgickou účinností k uvedeným účelům.

Pravidla pro použití:

MANOX je určen k inaktivaci mikroorganismů běžně se vyskytujících na pokožce rukou (těla) či tam přenesených z vnějšího prostředí. V prvním případě jde o zamezení jejich šíření směrem od nosičů do prostředí (imunitně oslabení pacienti, otevřené rány, popáleniny, potraviny, sterilní materiál, atd.) a v druhém případě se jedná o ochranu osob před vnějšími nákazami (infekční pacienti, materiál, prádlo, použití WC).

Před použitím elektrických přístrojů se nechá dezinfikovaná pokožka řádně odeschnout.

Balení:*

5 l kanystr
500 ml láhev („push-pull“ uzávěr)
500 ml láhev (s dávkovačem)**

* lze dávkovat pomocí nástěnných dávkovačů (strana 18)

** objem dávky = 1 ml

Doba použitelnosti:


24 měsíců

Aplikační postupy a expozice

hygienická dezinfekce rukou	3 ml vetřít do pokožky suchých kontaminovaných nebo suchých předem umytých rukou	30 vteřin
dezinfekce pokožky	potření dezinfikovaného místa sterilním materiálem namočeným v přípravku	1,0 minuta
dezinfekce proti plísním nohou	rozprašovačem aplikovat do obuvi nebo na ponožky	do zaschnutí

A usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkovitých hub **B** virucidní účinnost na široké spektrum virů (včetně malých neobalených virů) **C** inaktivace bakteriálních spór **T** usmrcení mykobakterií komplexu *M. tuberculosis* **M** usmrcení potenciálně patogenních mykobakterií **V** fungicidní účinek na mikroskopické vláknité houby (plísně) doložený laboratorními expertizami

Poměr aktivních látek (Číslo udává obsah látky v gramech ve 100 g přípravku)

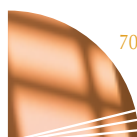


70g izopropylalkohol
0,25g benzalkoniumchlorid
0,25g chlorhexidinglukonát
0,5g peroxid vodíku

Dále obsahuje:

- parfém
- dermatologické přísady

pH 1% roztoku 5–6

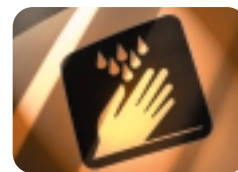

Alkoholový přípravek určený k předoperační dezinfekci rukou a dezinfekci pokožky



Spektrální účinnost: A B T M

baktericidní, fungicidní, virucidní, tuberkulocidní

- Nosnou aktivní látkou je propan-2-ol
- Obsahuje CETRIMID dermálně příznivou kationaktivní složku
- Pro chirurgickou a hygienickou dezinfekci rukou
- Aplikuje se neředěný na suché ruce
- Rychle schne, neutrárá se
- Obsah dermatologických složek zabraňuje vysušování
- Nebarví pokožku ani textil

Pravidla pro použití:

Přípravek se používá neředěný. Aplikuje se na řádně umyté a osušené ruce. V případě hygienické dezinfekce se může použít na suché kontaminované (neumyté) ruce.

Minimální doporučená množství k aplikaci jsou uvedena v tabulce. Během doby expozice by ruce měly zůstat vlhké.

Před použitím elektrických přístrojů se nechá dezinfikovaná pokožka řádně odeschnout.

Operační sály, JIP, ARO, chirurgická oddělení, porodnická a novorozenecká centra, infekční oddělení, onkologie a hematologické, popáleninová centra, laboratoře, pitevny.

Synergické působení CETRIMIDu, kationaktivního bromidového tenzidu, a ostatních složek výrazně zvyšuje dezinfekční účinnost přípravku. MANEPT je charakteristický svým širokým spektrálním působením proti všem skupinám mikroorganismů.

Aplikační postupy a expozice

chirurgická dezinfekce rukou (CHDR)	aplikovat 5 ml na umyté suché ruce, roztírat; postup jedenkrát opakovat za 2–3 minuty	celkem 5 min.
hygienická dezinfekce rukou (HDR)	3 ml vetřít do pokožky suchých kontaminovaných nebo suchých předem umytých rukou	30 vteřin
dezinfekce pokožky	potření dezinfikovaného místa sterilním materiálem namočeným v přípravku	1 min.
TBC	3 ml vetřít do pokožky rukou	1–2 min.

Balení:*

5 l kanystř
500 ml láhev („push-pull“ uzávěr)
500 ml láhev (s dávkovačem)**

* lze dávkovat pomocí nástěnných dávkovačů (strana 18)


** objem dávky = 1 ml

Doba použitelnosti:

24 měsíců

A usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkovitých hub **B** virucidní účinnost na široké spektrum virů (včetně malých neobalených virů) **C** inaktivace bakteriálních spor **T** usmrcení mykobakterií komplexu *M. tuberculosis* **M** usmrcení potenciálně patogenních mykobakterií **V** fungicidní účinek na mikroskopické vláknité houby (plísňe) doložený laboratorními expertizami

Poměr aktivních látek (Číslo udává obsah látky v gramech ve 100 g přípravku)

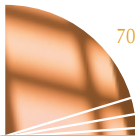

70g propan-2-ol
0,5g peroxid vodíku
0,4g chlorhexidylglukonát
0,1g cetrimid

Dále obsahuje:

- parfém
- dermatologické přísady

pH 1 % roztoku 5–6

ARİOSO® SEPT

Tekutý mycí prostředek pro hygienické mytí pokožky rukou
s antimikrobiálním účinkem



Balení:

5 l kanystr, 500 ml láhev s dávkovačem

Doba použitelnosti:

18 měsíců

- Moderní tekuté mýdlo pro mytí rukou a pokožky těla
- Obsahuje dezinfekční přísadu

- Nedráždivé, lehce parfemované
- Pomáhá v prevenci zánětu ran

ARİOSO® SEPT se v požadovaném dávkce roztírá s malým množstvím vody po celé ploše rukou. Poté se pokožka opláchne tekoucí pitnou vodou. Postup lze podle potřeby opakovat.

Obsahuje dezinfekční složku TRICLOSAN, která je účinná proti gram+ a gram- bakteriím. Je určeno pro mytí rukou před chirurgickou a hygienickou dezinfekcí pokožky, v provozech se zvýšenými požadavky na hygienu.

ARİOSO® SEPT je tekutá opalescentní světle modrá suspenze. Obsahuje anionaktivní tenzidy, přísady zabraňující vysušování a buildrové složky.

pH 5 – 7

ARİOSO® LAUDY

Regenerační krém s vysokým hydratačním účinkem



Balení:

500 ml láhev s „push-pull“ uzávěrem
500 ml láhev s dávkovačem

Doba použitelnosti:

24 měsíců

- Určen k ošetřování výrazně často mytých rukou
- Udržuje v pokožce přirozený obsah vlhkosti

- Rychle vsakuje a nezanechává pocit mastných rukou
- Příjemně voní
- Je vhodný i pro osoby s citlivou pokožkou a děti

ARİOSO® LAUDY se v potřebném množství nanese na pokožku a zvolna rovnoměrně rozetře. Je možno ho použít nejen na ruce, ale na pokožku celého těla.

Krém zabraňuje pokožce ztrácet vlhkost. Aplikuje se obvykle po pracovním výkonu na umyté suché ruce. Některé pracovní postupy odmašťují silně pokožku a krém je nutno použít i před prací; mytí nádobí, úklidové práce, chemická a potravinářská výroba.

ARİOSO® LAUDY je parfemovaná bíle zabarvená emulze tvořená kombinací olejů, látek regulujících vlhkost a podílu včelího vosku.

pH 5 – 6



Spektrální účinnost: A B

baktericidní, fungicidní a virucidní (včetně HBV, HIV)

- Obsahuje inhibitory koroze k potlačení agresivity vůči kovům
- Snadná detekce přípravku nebo jeho zbytků v přístroji; vysoká vodivost vůči čisté výplachové vodě
- Má při sanitaci potřebné emulgační a dispergační účinky
- Snáší teplotu 50–60° C při dezinfikování a čištění
- Netvoří inkrusty
- Dodáván i v litrové láhvi pro snadnější sledování poklesu hladiny (nepřímá indikace přisávání koncentráту do přístroje)

Pravidla pro použití:

*Při dezinfekci je prvotní dodržet postup udaný výrobcem přístroje. V návodu jsou uvedeny způsoby a postupy čištění. Zpravidla je mezi způsoby sanitace i varianta s aktivním chlórem (je-li uveden chlornan sodný je třeba hodnoty aktivního chlóru posuzovat pouze jako orientační). Obsah aktivního chlóru je u čerstvého produktu až 4,5% a během záruční doby neklesne pod 3,5%.

RENOX se doporučuje po naředění obsluhou nebo přístrojem (dáno typem přístroje) v koncentraci 3% přípravku v aplikačním roztoku.

Do koncentráту i roztoku přípravku není povoleno přidávat jiné chemikálie. Nebezpečí uvolňování chlóru!

GAMBRO*

- přístroj se vyprázdní a proplachuje asi 12 minut vodou
- násoska přístroje se ponoří pod hladinu koncentráту v kanystru
- spustí se program chemické dezinfekce, doba plnění je cca 6 minut
- násoska se vrátí do přístroje a ten se 20 minut dezinfikuje
- následuje proplach vodou v délce 30 minut

FRESENIUS*

- přístroj se proplachuje asi 10 minut vodou
- násoska se ponoří do kanystru s koncentrátem a spustí se dezinfekční program, doba plnění a dezinfekce je asi 20 minut
- přístroj se po dezinfekci proplachuje cca 30 min. vodou

Přípravek je vhodný dále pro přístroje BRAUN, CHIRADIS, BELLCO, aj.

A usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkovitých hub **B** virucidní účinnost na široké spektrum virů (včetně malých neobalených virů) **C** inaktivace bakteriálních spór **T** usmrcení mykobakterií komplexu M. tuberculosis **M** usmrcení potenciálně patogenních mykobakterií **V** fungicidní účinek na mikroskopické vláknité houby (plísňe) doložený laboratorními expertizami

Balení:

5 l kanystr
1 l láhev

Doba použitelnosti:

6 měsíců

Poměr aktivních látek (Číslo udává obsah látky v gramech ve 100 g přípravku)

40g chlornan sodný
(aktivní chlór 12%)

pH 1% roztoku > 11

Dále obsahuje:

- polyfosfáty
- inhibitory koroze
- alkalické hydroxidy

DEZINFEKČNÍ PLÁN

	Oblast použití	Přípravek	Koncentrace	Množství / Doba expozice	Spektrum účinnosti	Postup / Četnost provádění
	Mytí rukou	ARIOSO SEPT tekuté mýdlo	neředěný	potřebné množství		Dle potřeby. Před HDR a CHDR. Rozetřít s trochou vody, opláchnout, vysušit ručníkem na jedno použití.
	Hygienická dezinfekce rukou (HDR)	MANOX MANEPT	neředěný	3 ml / 30 s 3 ml / 30 s 3 ml / 2 min.	A A ATM	Po kontaktu s kontaminovaným materiálem, po a před ošetrovatelskými úkony.
	Chirurgická dezinfekce rukou (CHDR)	MANEPT	neředěný	2 x 5 ml během 5 min.	ABTM	Před operačním zákrokem rozetřít na rukou a předloktí. Nechat zaschnout.
	Ošetření a regenerace rukou	ARIOSO LAUDY tekutý krém	neředěný	dle potřeby ně- kolikrát za den		Dostatečné množství rozetřít na suchých rukou.
	Dezinfekce pokožky	MANOX MANEPT	neředěný	1 min.		Několikrát řádně zvlhčit přípravkem nasátým do sterilního tamponu.
	Dezinfekce postříkem	GUTTAR	neředěný	1 – 5 min. 15 min. 60 min.	A AB ABTM	Pomocí rozprašovače nastříkat na plochy nebo předměty neotírat, hrubé nečistoty umýt předem.
	Mytí s dezinfekčním účinkem (kumulativní efekt) <i>Ordinace, lůžková oddělení, chodby, WC</i>	DESUR DEZOX DEZIKON SANITEN	0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 – 0,75 %	30 min. / z	AV A AV AV	Pracovním roztokem otřít plochu do mokra a nechat zaschnout. Četnost dle provozního plánu, min 1x denně.
	Jednofázová dezinfekce povrchů a předmětů <i>Operační sály, ARO, JIP, infekční oddělení, novorozenecká, laboratoře</i>	DESUR DEZOX DEZIKON	1 %	30 min. / z	ABV AB ABTMV	Pracovním roztokem otřít plochu do mokra a nechat zaschnout. Operační sály dezinfikovat po každém výkonu. Dezinfikované předměty otřít, ponořit nebo do nich roztok nalít.
	Epidemiologicky závažná situace, cílené potlačení TBC, vysoká organická zátěž, velmi drsný a pórovitý povrch	DESUR DEZOX DEZIKON SANITEN	2 – 3 % 2 % 2 – 3 % 2 %	60 min. 60 min. 30 min. 30 min.	ABTMV ABTM ABTMV ATMV	Aplikovat obvyklým způsobem. Hrubá organická znečištění se předem odstraní.
	Odstraňování zaschlých vrstev dezinfekcí	LORIQAT	0,5 – 2 %	5 – 1 min.		Nanést na plochu a nechat působit, setřít do sucha a omýt čistou teplou vodou.
	Dekontaminace a čištění chirurgických nástrojů, plasty, sklo	DEZIPUR SEPTAN	1 % 2 % 2 % 1 % 2 % 3 %	60 min. 30 min. 60 min. 60 min. 30 min. 60 min.	AB AB ABTM AB AB ABTM	Ponořit do roztoku, exponovat, dočistit, opláchnout pitnou vodou, osušit, sterilizovat.
	Dezinfekce endoskopů (předčištění)	SEPTAN	2 – 3 %	30 – 15 min.	AB	Okamžitě po použití zvnějšku nástroj otřít, pročistit kanály, ponořit do roztoku, exponovat, dočistit, opláchnout pitnou vodou, osušit. Následuje sterilizace.
	Hemodialyzační přístroje	RENOX	3 %	20 min.	AB	Použít podle pokynů výrobce přístroje.
	Dezinfekce prádla	DEZIKON	0,5 % 1 %	30 min. 30 min.	AV ABTMV	Zcela potopit do roztoku.
	Nádoby a přístroje	DEZIKON	1 %	30 min.	ABTMV	Zcela ponořit, po dezinfekci řádně opláchnout pitnou vodou.
	Umyvadla, toalety, pisoáry, bidety	DEZIKON	1 %	30 min. / z	ABTMV	
	Koupací vany	DEZIPUR	2 %	2 – 5 min.	A	Dokonalé omýt předem připraveným roztokem, exponovat, opláchnout.

z – do zaschnutí



A usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkovitých hub (kvasinky) **B** virucidní účinnost na široké spektrum virů (včetně malých nebalených virů) **(B)** omezená virucidní účinnost (účinnost na HBV/HIV potvrzena) **C** inaktivace bakteriálních spor **T** usmrcení mykobakterií komplexu *M. tuberculosis* **M** usmrcení potenciálně patogenních mykobakterií **V** fungicidní účinek na mikroskopické vláknité houby (plísňe) doložený laboratorními expertizami

TABULKA ŘEDĚNÍ

		Požadovaná koncentrace roztoku					
		0,5 %	0,75 %	1 %	1,5 %	2 %	3 %
Požadovaný objem roztoku	0,5 l	2,5 ml	3,8 ml	5 ml	7,5 ml	10 ml	15 ml
	1,0 l	5 ml	7,5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml
	2,0 l	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml
	3,0 l	15 ml	22,5 ml	30 ml	45 ml	60 ml	90 ml
	4,0 l	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	80 ml	120 ml
	5,0 l	25 ml	37,5 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml
	8,0 l	40 ml	60 ml	80 ml	120 ml	160 ml	240 ml
	10,0 l	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml	200 ml	300 ml

Čísla v tabulce udávají počet mililitrů (gramů) dezinfekčního přípravku potřebných k vytvoření požadovaného množství roztoku s požadovanou koncentrací

Přípravky / Konzistence

Kapalné

DESUR ■ DEZOX ■ SANITEN ■ SEPTAN
Pumpa: 25 ml / zdvih
1 litr = 10 dl = 100 cl = 1000 ml

Práškové

DEZIKON ■ DEZIPUR
Odměrka: 10 g je součástí každého balení
1 kg = 100 dkg = 1000 g

APLIKAČNÍ POMŮCKY

Dávkování dezinfekčních přípravků, mýdel a krémů



MAXIMUM 2

Obsah: 500 ml
Dávka: 0,5 – 1 – 1,5 ml
Kód: 97022



INGO-MAN HYGIENE 22

Obsah: 500 ml
Kód: 100571
Komaxit bílý



JOFEL AITANA

Obsah: 1000 ml
Kód: 97050
ABS Plast



INGO-TOP 250 ml
Kód: 110090
INGO-TOP 500 ml
Kód: 110070



DRŽÁK NA 500 ML LÁHVE

Nerez provedení, velmi praktický
Odolný proti dezinfekcím
Kód: 12345



MIXÁŽNÍ STANICE

Automaticky ředí přednastavenou koncentraci roztoku dezinfekčního nebo čistícího přípravku.



TLAČÍTKOVÝ ROZPRAŠOVAČ

Obsah: 120 ml
Kód: 97082



DÁVKOVACÍ PUMPA NA KANYSTR

Dávka: 25 ml / zdvih
Kód: 97091

■ PRODEJ ■ PRONÁJEM ■ ZÁPŮJČKA

Hygienický program

AQUA program – špičkový systém pro personální hygienu



Zásobník papírových ručníků
Kód: 6973



Dávkovač tekutého mýdla
Kód: 6976



Zásobník skládaného toaletního papíru
Kód: 6975




Osvěžovač vzduchu
Kód: 6984



Dávkovač rolí toaletního papíru JUMBO®
Kód: 6978

- PRODEJ
- PRONÁJEM
- ZÁPUJČKA

- Program splňuje současné hygienické požadavky*
- Při odběru medií nedochází ke kontaminaci zbývajících náplně
- Velice pohodlné čištění a dezinfekce díky hladkému nečlenitému povrchu
- Rychlá kontrola stavu naplnění průhledným okénkem, snadné doplňování medií
- Vysoká odolnost proti poškození
- Estetický vzhled, barva bílý lesk

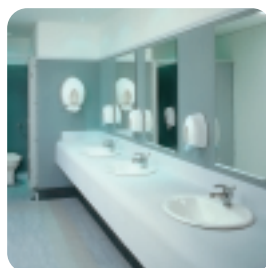


*** Výňatek z vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 440 / 2000 Sb., část druhá, § 8 – Hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení – odst. (5):**

Při příjmu a ošetřování pacientů ve zdravotnických zařízeních musí být dodrženy tyto hygienické požadavky: písmeno b) k vyšetřování a léčení mohou zdravotničtí pracovníci přistupovat až po umytí rukou; dezinfekci rukou musí provést vždy po zdravotnických výkonech u osob s infekčním onemocněním, po manipulaci s biologickým materiálem a použitým prádlem. **K utírání rukou se musí používat jednorázový materiál.**

■ Další položky sortimentu na vyžádání

■ Ručníky KLEENEX® a SCOTT® Performance možno sterilizovat

PROGRAM PRO ZDRAVOTNICTVÍ, PRÁDELNY, KUCHYNĚ, POTRAVINÁŘSTVÍ, ŠKOLY, ÚSTAVY SOCIÁLNÍ PÉČE, DOMOVY DŮCHODCŮ, ÚŘADY...

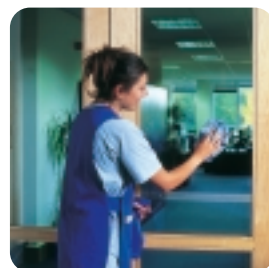


DODÁVKY NÁPLNÍ:

- tekutá mýdla ARIOSIO® a Kimberly-Clark
- papírové ručníky v různé kvalitě, doporučujeme SCOTT Performance a KLEENEX
- toaletní papír skládaný a v rolích JUMBO®
- utěrky skládané a v rolích pro všechny druhy použití, doporučujeme WYPALL L 40 a čtyřbarevný systém WYPALL X 80
- vůně, krémy, pytle, sáčky, čisticí a dezinfekční prostředky



DODÁVKY ČISTICÍ A ÚKLIDOVÉ TECHNIKY:

- kvalitní výrobky tuzemské i zahraniční

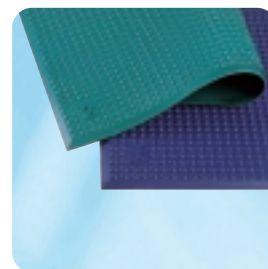

PRACOVNÍ ŽIDLE A PROTIÚNAVOVÉ ROHOŽE

- centrální sterilizace, operační sály, laboratoře, prádelny...
- robustní, odolné dezinfekčním a čisticím postupům, antistatické



LORIKA CZ s.r.o.
HOLICKÁ 31/2, 772 00 OLOMOUC
TEL. 585 209 410
585 209 420 odbyt
FAX 585 209 421
E - MAIL: lorika@lorika.cz
GSM Paegas: 605 224 800
GSM Eurotel: 602 566 544

LORIKA CZ s.r.o.
WOLKEROVA 18
415 01 TEPLICE V ČECHÁCH
TEL. / FAX 417 577 497
MOBIL: 605 224 830
MOBIL: 605 224 831 prodej
E - MAIL: lorika.tce@volny.cz

LORIKA CZ s.r.o.
POD KAPLÍČKOU 1191
547 01 NÁCHOD
TEL. / FAX 491 423 618
MOBIL: 605 224 820
E - MAIL: lorika.nachod@cmail.cz

LORIKA CZ s.r.o.
CHANOVICE 122
341 52 HORAŽDOVICE
TEL. / FAX 376 514 341
MOBIL: 605 224 840
E - MAIL: lorika.hor@ms1.ipnet.cz