



Informace OP č. 02/2004

Sterilizování zdravotnického materiálu

Určeno	Všem zástupcům pro LP, vrchním sestřám, staničním sestřám a vedoucím laborantům	
	Zpracoval	Vydavatel
Útvar	Oddělení centrální sterilizace	úsek náměstkyně pro OP
Funkce	vrchní sestra	náměstkyně pro OP
Jméno	Helena Šmakalová	Bc. Marie Pavlíková
Datum	3.11. 2004	3.11. 2004
Podpis	Helena Šmakalová, v. r.	Bc. Marie Pavlíková, v.r.
Účinnost od:	3.11. 2004	

1. Účel

Účelem je seznámit zaměstnance se způsobem provádění nízkoteplotní sterilizace ve FNO.

2. Vlastní text

Na základě výsledků státního zdravotního dozoru provedeného KHS Olomouckého kraje, které prokázaly neúčinný sterilizační cyklus u formaldehydových sterilizačních přístrojů umístěných na Ortopedické klinice a staré centrální sterilizaci, byly tyto přístroje odstaveny z provozu. Sterilizaci formaldehydem v současné době pro potřeby FNO bude zajišťovat Oddělení centrální sterilizace (OCS).

Vzhledem ke kapacitním možnostem přístroje Formomat 110 na OCS, žádám všechny odpovědné pracovníky, aby důsledně zvažovali nutnost tohoto způsobu sterilizace a pro zdravotnický materiál, který lze sterilizovat v parním sterilizátoru jednoznačně využívali tento způsob sterilizace. V případě, že nebude tento způsob dodržován, pracovnice OCS nepřijme takovýto materiál k formaldehydové sterilizaci.

Přednostně bude sterilizován zdravotnický materiál pro akutní potřeby operačních sálů a oddělení chirurgických oborů. Akutní potřeby ostatních oddělení je nutno telefonicky domluvit s pracovníky OCS (tel.2392, 2393 – nepřetržitě). Ostatní zdravotnický materiál bude sterilizován průběžně dle kapacitních možností a je třeba využít možnosti sterilizace i během víkendů.

Upozorňuji, že délka sterilizačního cyklu v přístroji Formomat 110 je 5,5 hod. včetně doby odvětrávání vysterilizovaného materiálu.

Transport materiálu po sterilizaci musí probíhat dle platné vyhlášky MZ ČR č. 440/2000 Sb., tzn. obaly s vysterilizovaným materiálem se převáží v uzavřených přepravech nebo skříních, aby byly chráněny před poškozením a znečištěním.

Toto opatření platí do odvolání.