


Pokyny pro odběr pupečnickové krve Classic

Typ odběrového setu:

JMS CPDA-1 CORD BLOOD Collection Set 811-1000

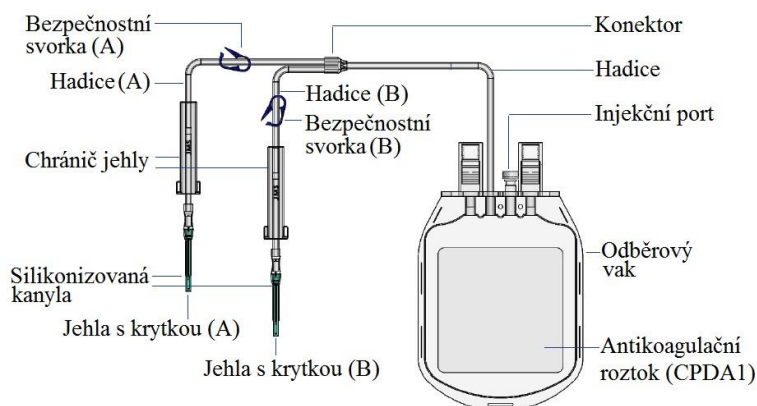

Upozornění:

Před samotným odběrem proveďte identifikaci rodičky dle řízené dokumentace.

Pupečnickovou krev musíte odebrat **ihned po porodu dítěte a přestřížení pupečnicku, ještě před porodem placenty!**

Návod k použití:

Odběrový set firmy JMS je doručen ve sterilním a nehořlavém obalu.

Odběrový set NEPOUŽÍVEJTE v případě, pokud je ochranné sterilní balení setu anebo samotný odběrový vak viditelně poškozen!

Vak vyvarujte kontaktu s ostrými a špičatými předměty!

Postup před odběrem pupečnickové krve:

1. Otevřete a vyjmete sterilní odběrový vak. **Uzavřete na něm bezpečnostní svorky (A) a (B)!**
2. Odběrový vak označte **samolepícím štítkem nemocnice** s identifikačními údaji: jméno rodičky, rodné číslo/ datum narození. Dále vak označte **samolepícím štítkem CBC CZ** s informací: „AUTOLOGNÍ ODBER“, „NEMRAZIT!“, kde doplňte datum a čas odběru, a **samolepícím štítkem se SEC kódem**.
3. Pupečník položte na sterilní roušku.

Postup odběru pupečnickové krve:

1. Pupečník omyjte přiloženým omývacím roztokem (voda na injekci) a dezinfikujte místo vpichu pomocí nejodověho dezinfekčního roztoku. Ze vzdálenosti cca 10 cm postříkejte pupečník po celé jeho délce a optimálně i všemi směry. Před odběrem nechte dezinfekci několik sekund působit dle pokynu v návodu!
2. Po omytí a vydezinfikování pupečnicku vezmete odběrový vak a napíchnete pupeční žílu cca 2 cm od uzavřeného pupečnicku. Použijte jehlu **(A)**. Otevřete svorku **(A)**.
3. Odběrový vak umístěte tak, aby vám při odběru pomáhala gravitace. Pupečnicková krev začne vtékat hadičkou **(A)** do vaku. Vyšší výtěžnosti odběru dosáhnete, provedete-li jemnou masáž pupečnicku stahováním tkáně pupečnicku směrem od rodičky k místu vpichu. Během odběru jemně míchejte krev s antikoagulačním roztokem ve vaku!
4. Pokud už krev neteče, objem pupeční žíly je v daném místě vyčerpán. Zavřete svorku **(A)** a vytáhněte jehlu **(A)** z pupečnicku. Přetáhněte přes použitou jehlu krytku **(A)** a chráníč jehly.
5. Při zachování podmínek sterility použijte pro odběr z jiného místa blíže k rodičce jehlu **(B)**. Otevřete svorku **(B)** a celý postup zopakujte, dokud se z pupečnicku nevyčerpá veškerý objem krve. Zavřete svorku **(B)**, vytáhněte jehlu a zasuňte ji do krytky **(B)** a chráníče.
6. Stáhněte **svorky (A) a (B)** až ke konektoru a zavřete!

Postup po odběru pupečnickové krve:

1. Odeberte venózní krev rodičky do obou přiložených předem označených zkumavek.
2. Odběrový vak, zkumavky s venózní krví rodičky, sací podložku a termočip vložte do ZIP sáčku a uzavřete. Sáček vložte **co nejdříve po ukončení odběru** do určené chladničky a **uchovávejte** do příjezdu pracovníka odpovědného za transport **při teplotě +2 až +8 °C!** V žádném případě **NEMRAZTE!!!**
3. Čitelně vyplňte Průvodní list. Nezapomeňte zaškrtnout typ odběru! Kopii Průvodního listu, vyplněný Informovaný souhlas rodičky a Evidenční list odběrové sady a transportního boxu založte do dokumentace na oddělení a archivujte dle archivačního rádu Vašeho oddělení.
4. **Neprodleně po odběru informujte pracovníka CBC CZ na bezplatné lince 800 900 139. Tato linka je v provozu ve všední dny, o víkendech i státních svátcích. Při nahlašování uveďte své jméno, nemocnici, typ odběru, jméno rodičky a datum a čas odběru.**
5. Po příjezdu pracovníka odpovědného za transport vložte do přepravního boxu k odebrané pupečnickové krvi 2 ks nachlazených chladících vložek, 2 ks zkumavek venózní krve rodičky, originál Průvodního listu pro autologní odběr a případně další související dokumentaci.

DĚKUJEME VÁM ZA PROVEDENÝ ODBĚR!