


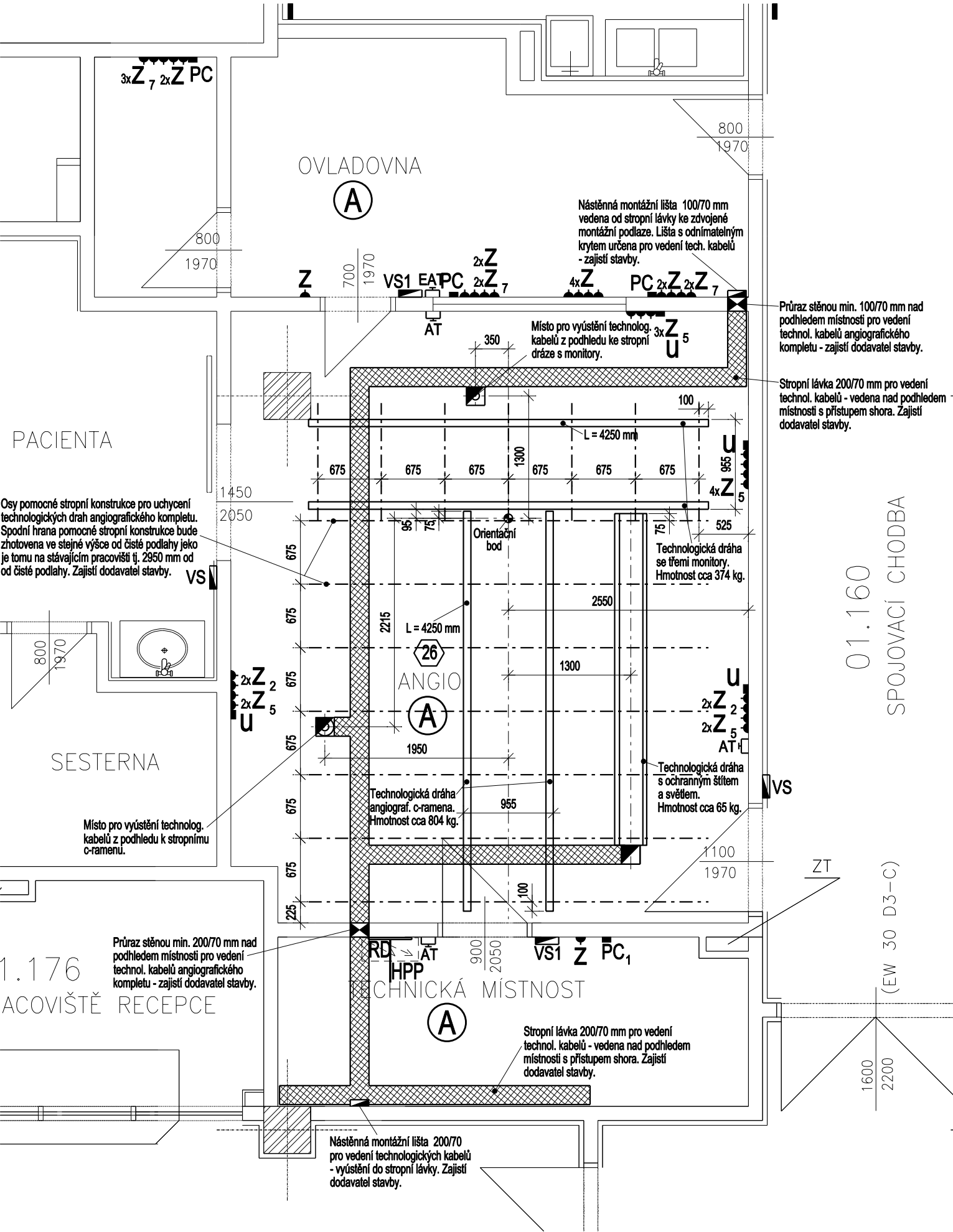

LEGENDA VÝVODŮ PRO SPECIALISTY:

- HPP** Hlavní přívod proudu pro angiografický komplet, 5-ti vodičový Cu, vodiče dimenzované dle těchto udaných hodnot: 3~400 V (+/- 10%) + N + PE, 50 Hz (+/-1Hz), dimenzovaný pro trvalý příkon 73 kVA, krátkodobý příkon 100 kVA (několikrát po 20 sec.) a nárazový špičkový příkon 190 kVA s požadavkem na maximální odpor sítě 0,10 Ohmů až do místa napojení. Jištění v technologické rozvodné skříni 125 A.
- RD** Rozvodné technologické desky pro angiografický komplet. Připevnění technologického rozvaděče na stěnu místnosti včetně připojení hlavního napájecího kabelu do technologického rozvaděče zajistí dodavatel stavby.
- AT** Nouzová tlačítka - vypínací - přívody a zapojení zajišťuje dodavatel stavby.
- EAT** Nouzová tlačítka - vypínací, zapínací - přívody a zapojení zajišťuje dodavatel stavby.
- VS** Elektrický přívod pro výstražné návěští, 5 x 1,5 mm Cu přivést od technologické rozvodné desky pro dva samostatné okruhy, tj. červený nápis NEVSTUPOVAT svítící při RTG záření a žlutý nápis KONTROLOVANÉ PÁSMO svítící při zapnutí hlavního vypínače RTG přístroje - umístěno přednostně vedle dveří ve výšce 1500 mm (popřípadě nade dveřmi).
- VS1** Výstražné signální světlo 230 V bílé s červeným nápisem "NEVSTUPOVAT" - umístěné 1500 mm vysoko vedle dveří (popřípadě nade dveřmi) a znázornění na výkrese. Vývody 3x 1,5 mm Cu zatáhnout pod rozvodnou desku.
-  Stropní instalační lávka rozměru 200/70 mm vedena nad podhledme místnosti s přístupem shora. Instalační lávka určena pro vedení technologických kabelů angiografického kompletu firmy Siemens.

POZNÁMKA:

Všechny míry jsou v mm od čisté zdi nebo podlahy. Dodržte kóty, dimenze a rozteče ! Provedení instalace v ostatních nezdravotnických prostorách se řeší dle ČSN 33 2000 - 3. Požadavky ČSN 33 2000 - 3 v místnostech pro lékařské účely řeší ČSN 332140. Způsob napájení el. zásuvek a všech pevně instalovaných el. spotřebičů v místnostech pro lékařské účely je dán typem místnosti dle ČSN 332140, který je uveden v šestiúhelníku u názvu místnosti.

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	AUTORIZOVAL:	Tomáš Václavík Projekty lékařské technologie 28. pluku 632/44, Praha 10, 100 00 E-mail: projekty.vaclavik@gmail.com Tel: +420 775 638 105	
TOMÁŠ VÁCLAVÍK	TOMÁŠ VÁCLAVÍK			
INVESTOR :			FORMÁT: 2xA4 DATUM: 12/2009 STUPEŇ: JEDNOSTUPŇOVÝ Č. ZAKÁZKY: 2009 - 033 PROFESE: ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE	
STAVBA: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC Stavební úpravy pro instalaci angiografického kompletu MULTISTAR firmy Siemens				
NÁZEV VÝKRESU: Půdorys 1. PP - Angio - Strop + elektro			MĚŘÍTKO: 1:50	Čís. VÝKRESU: 0 0 2