


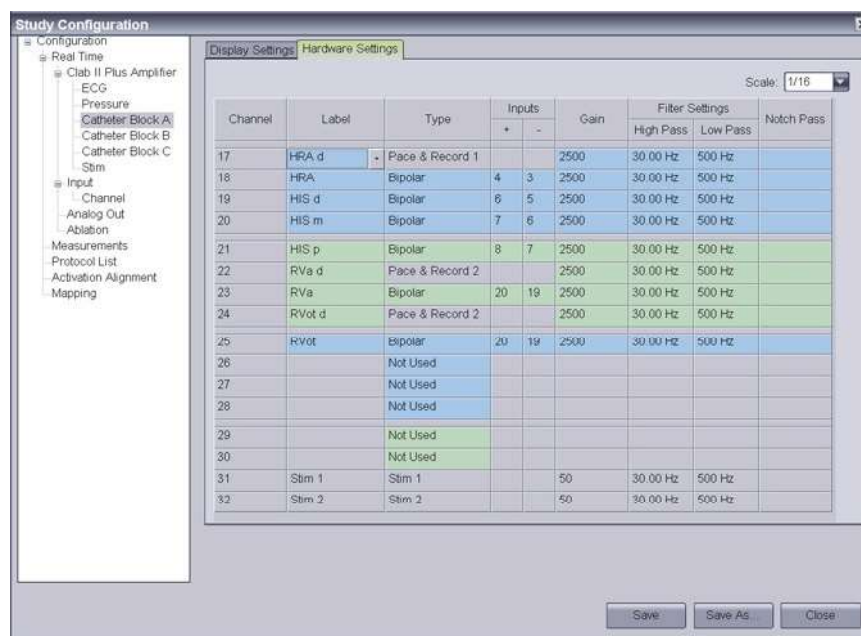

- Zvolte odpovídající **Type**, **Label** (Typ, Označení), **Inputs**, **Gain**, **High Pass**, (Vstupy, Zesílení, nastavení filtru Vysoká propustnost) a nastavení filtrů **Low Pass** (Nízká propustnost) a **Notch Pass** (Pásmová propust) z příslušných rozbalovacích nabídek.

POZNÁMKA Pro rychlejší odstranění offsetu DC v důsledku pulzní energie signálu zesilovač CardioLab Amplifier automaticky použije filtr horní propust 14,2 Hz na všechny kanály definované jako Pace (Stimulace) a Record (Záznam).

- Nastavte měřítko zobrazení z rozbalovací nabídky **Scale** (Měřítko).

Přidání signálu z katetru

POZNÁMKA Systém zobrazí rušení na kanálech zobrazujících nevyužité katetrové vstupy.

- Pro přidání signálů katetrů zvolte příslušný Intracardiac Block (Intrakardiální blok) z okna **Study Configuration** (Konfigurace studie).
- Zvolte kartu **Hardware Settings** (Nastavení hardwaru).
- Když přidáváte nový signál nebo kanál, musí být nejprve zvolen **Type** (Typ) signálu (bipolární, unipolární atd.) a teprve potom ostatní parametry.
- Zvolte příslušné nastavení parametru **Label** (Označení).
- Zadejte hodnoty pro **Inputs** (Vstupy) podle toho, kde jsou katetry připojeny do modulu vstupu katetrů.
- Vyberte příslušné nastavení parametru **Gain** (Zesílení).
- Odpovídajícím způsobem upravte hodnoty pro **Filter Settings** (Nastavení filtru).