



SAMSUNG
INTELIGENTNÍ DIGITÁLNÍ
RADIOGRAFICKÉ ŘEŠENÍ

GC85A

Uživatelská příručka

Příslušenství


Dálkový ovladač

■ Přehled

Systém GC85A je vybaven dálkovým ovladačem.

- Metoda komunikace: ZigBee (všesměrová)
- Průměrná doba používání: 120 hodin (nepřetržitý provoz)
- Baterie: Velikost AAA x 2 ks

■ Konfigurace

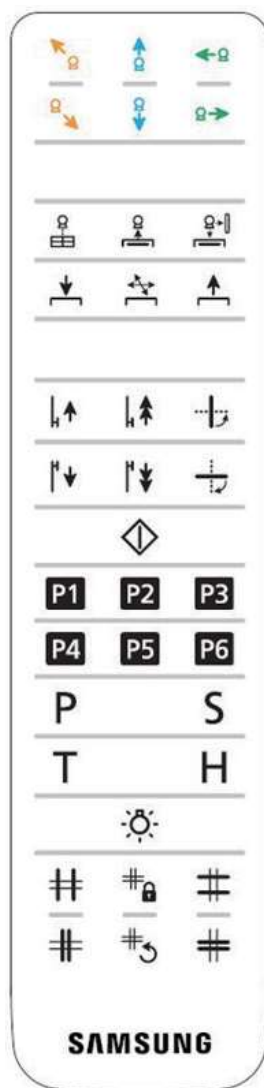

Obrázek 7-1. Dálkový ovladač



- Tento systém nelze zapínat nebo vypínat prostřednictvím dálkového ovladače. Při ovládání tohoto systému prostřednictvím dálkového ovladače si počínejte opatrně. Neopatrné ovládání může mít za následek nehody.
- Jestliže se baterie vybijí, otevřete zadní kryt dálkového ovladače a baterii vyměňte.
- Nebudete-li dálkový ovladač po delší dobu používat, z bezpečnostních důvodů z něho vyjměte baterie.

■ Funkce

Následující tabulka obsahuje seznam funkcí ikon a úkonů, které se jejich prostřednictvím provádějí.


Ikona	Název	Funkce/úkon
	Parkování	Přemísťuje systém do výchozí polohy.
	Režim stolu	Přepíná systém do režimu vyšetření za použití patientského stolu.
	Režim stojanu	Přepíná systém do režimu vyšetření za použití nástěnného stojanu.
	Režim náklonu nástěnného stojanu	Přepíná systém do režimu náklonu nástěnného stojanu.
	Režim automatického středění	Nastavuje svislou vzdálenost ohniska od detektoru, který je umístěn podle protokolu.
	Automatická synchronizace zapnuta/vypnuta	Aktivuje vzájemnou synchronizaci detektoru a rentgenky.
	Automatické zapnutí/vypnutí detektoru	Automaticky aktivuje vhodný detektor podle polohy rentgenky.
	Automatické spuštění	Přemísťuje systém do předem nastavené polohy, která je definována prostřednictvím jednotky THU.
	Vertikální zvětšení rozsahu kolimátoru	Zvětšuje rozsah kolimátoru ve vertikálním směru.
	Vertikální zmenšení rozsahu kolimátoru	Zmenšuje rozsah kolimátoru ve vertikálním směru.
	Horizontální zvětšení rozsahu kolimátoru	Zvětšuje rozsah kolimátoru v horizontálním směru.
	Horizontální zmenšení rozsahu kolimátoru	Zmenšuje rozsah kolimátoru v horizontálním směru.
	Režim pevně nastavené ozařované oblasti	Nastavuje pevnou velikost ozařované oblasti kolimátoru (zapnutí/vypnutí).
	Zapnutí/vypnutí lampy	Zapíná/vypíná lampu pro kontrolu ozařované oblasti.
	Zpět	Obnovuje předcházející nastavení velikosti kolimace.
	Z nahoře	Přemísťuje jednotku THU nahoru podél osy Z.

Ikona	Název	Funkce/úkon
	Z dolů	Přemísťuje jednotku THU dolů podél osy Z.
	Y zpět	Přemísťuje jednotku THU podél osy Y (zpět).
	Y vpřed	Přemísťuje jednotku THU podél osy Y (vpřed).
	X doprava	Přemísťuje jednotku THU podél osy X (doprava).
	X doleva	Přemísťuje jednotku THU podél osy X (doleva).
	Uvolnění desky stolu	Provádí odblokování desky patientského stolu.
	Stůl nahoru	Zvedá desku patientského stolu.
	Stůl dolů	Snižuje desku patientského stolu.
	Snímač stojanu nahoru	Zvedá snímač nástěnného stojanu.
	Snímač stojanu rychle nahoru	Zvedá snímač nástěnného stojanu v rychlém režimu.
	Snímač stojanu dolů	Snižuje snímač nástěnného stojanu.
	Snímač stojanu rychle dolů	Snižuje snímač nástěnného stojanu v rychlém režimu.
	Náklon snímače stojanu nahoru	Snímač nástěnného stojanu se naklání nahoru ve směru hodinových ručiček.
	Náklon snímače stojanu dolů	Snímač nástěnného stojanu se naklání dolů proti směru hodinových ručiček.
	P1	Přechází do polohy P1, která byla předem určena uživatelem.
	P2	Přechází do polohy P2, která byla předem určena uživatelem.
	P3	Přechází do polohy P3, která byla předem určena uživatelem.

Ikona	Název	Funkce/úkon
P4	P4	Přechází do polohy P4, která byla předem určena uživatelem.
P5	P5	Přechází do polohy P5, která byla předem určena uživatelem.
P6	P6	Přechází do polohy P6, která byla předem určena uživatelem.

Tabulka 7–1. Funkce ikon dálkového ovladače

■ Vyjmutí baterií

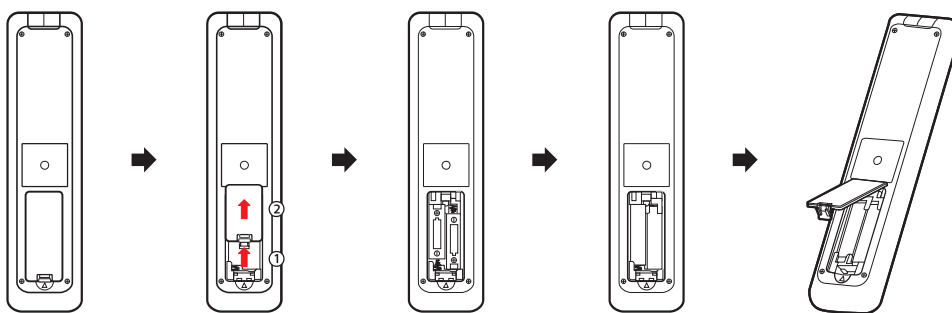

1. Stiskněte tlačítko (①) a zvednutím krytu (②) otevřete přihrádku pro baterie.
2. Vytáhněte každou alkalickou baterii typu AAA z drážky za použití kladného (+) konce baterie.
3. Po vyjmutí obou baterií umístěte kryt přihrádky pro baterie zpět a zlehka na něj shora zatlačte tak, aby západka slyšitelně zaklapla. Jestliže západka slyšitelně zaklapne, kryt je ve správné poloze.



VAROVÁNÍ:

- Při použití nesprávného typu baterií hrozí nebezpečí přehřívání a požáru nebo výbuchu baterií. Při výměně baterií se vždy ujistěte, že je použitý správný typ a model baterií.
- Při výměně baterií si počínejte s dostatečnou opatrností, abyste se nezranili. Baterie chraňte před poškozením a nikdy je nerozebírejte.