


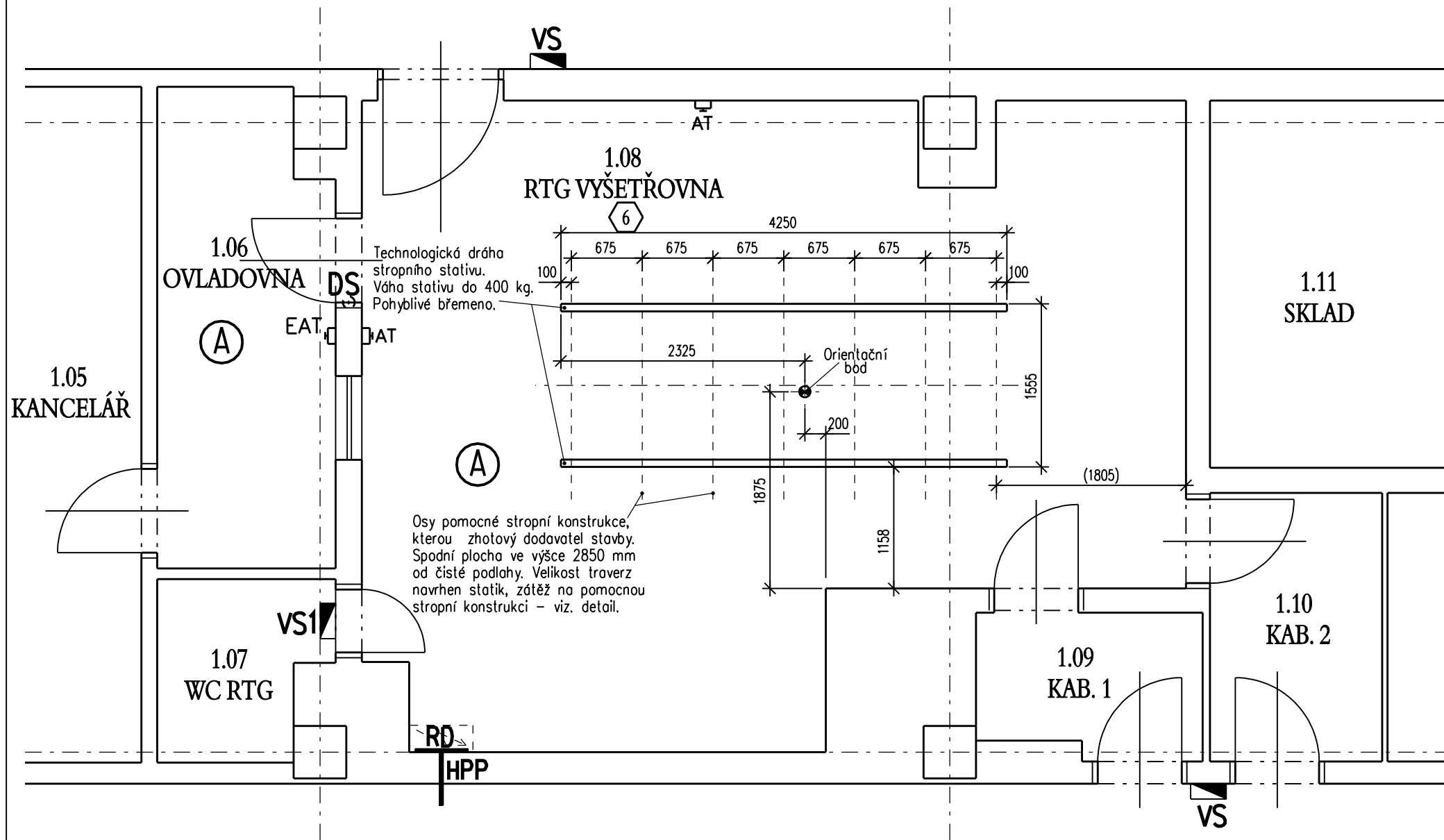

OZNAČENÍ VÝVODŮ PRO SPECIALISTY:

- A** Elektrostaticky vodivá uzemněná podlaha. Vnitřní el. odpor v rozsahu $5 \times 10^4 - 10^6 \text{ Ohm}$.
- VS** Elektrický přívod pro výstražné návěští, 5 x 1,5 mm Cu přivést od technologické rozvodné desky pro dva samostatné okruhy, tj. červený nápis NEVSTUPOVAT svítící při RTG záření a žlutý nápis KONTROLOVANÉ PÁSMO svítící při zapnutí hlavního vypínače RTG přístroje – umístěno přednostně vedle dveří ve výšce 1500 mm (popřípadě nade dveřmi).
- VS1** Výstražné signální světlo 230 V bílé s červeným nápisem "NEVSTUPOVAT" – umístěné 1500 mm vysoko vedle dveří (popřípadě nade dveřmi) a znázornění na výkrese. Vývody 3x 1,5 mm Cu zatáhnout pod technologickou rozvodnou desku.
- AT** Nouzová tlačítka – vypínací, přívody a zapojení zajišťuje dodavatel stavby – zatáhnout pod rozvodnou technologickou desku.
- EAT** Nouzová tlačítka – vypínací, zapínací, přívody a zapojení zajišťuje dodavatel stavby – zatáhnout pod rozvodnou technologickou desku.
- HPP** Hlavní přívod proudu pro skiaskopicko-skiagrafický komplet AXIOM Luminos fy Siemens, 5-ti vodičový Cu, vodiče dimenzovat dle těchto udaných hodnot: 3x 230/400 V(+/-10%) + N + PE, 50 Hz(+/-1Hz), trvalý příkon 3,3 kVA, maximální nárazový příkon 145 kVA s požadavkem na maximální vnitřní odpor sítě 0,11 Ohmů až do místa napojení. Jištění v technologické rozvodné skříní 63 A s pomalou charakteristikou.
- RD** Rozvodná technologická deska – zapojení provede dodavatel stavby.
- DS** Dveřní spínač

POZNÁMKA:

Všechny míry jsou v mm od čisté (obložené) zdi nebo podlahy. Dodržte kóty, dimenze a rozteče !
Provedení elektroinstalace v ostatních nezdavatnických prostorách se řeší dle ČSN 33 2000 – 3.
Požadavky ČSN 33 2000 – 3 v místnostech pro lékařské účely řeší ČSN 332140.
Způsob napájení el. zásuvek a všech pevně instalovaných el. spotřebičů v místnostech pro lékařské účely je dán typem místnosti dle ČSN 332140, který je uveden v šestiúhelníku u názvu místnosti.

VEDOUcí PROJEKTANT	HANA MALEVIČOVÁ	VYPRACOVAL	TOMÁŠ VÁCLAVÍK	Č. PARÉ		
INVESTOR	FN Olomouc					
NÁZEV STAVBY	FN OLOMOUC Instalační příprava pro skiaskopicko-skiagrafický přístroj AXIOM Luminos TF fy Siemens				STUPEŇ	RP
					DATUM	08/2007
					MÉRITKO	1:50
					FORMÁT	3 x A4
OBSAH VÝKRESU	Přídorys 1. NP - Strop + elektro				ZAK. Č.	ČÍS. VÝKR.
PROFESE	ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE				07058	002