


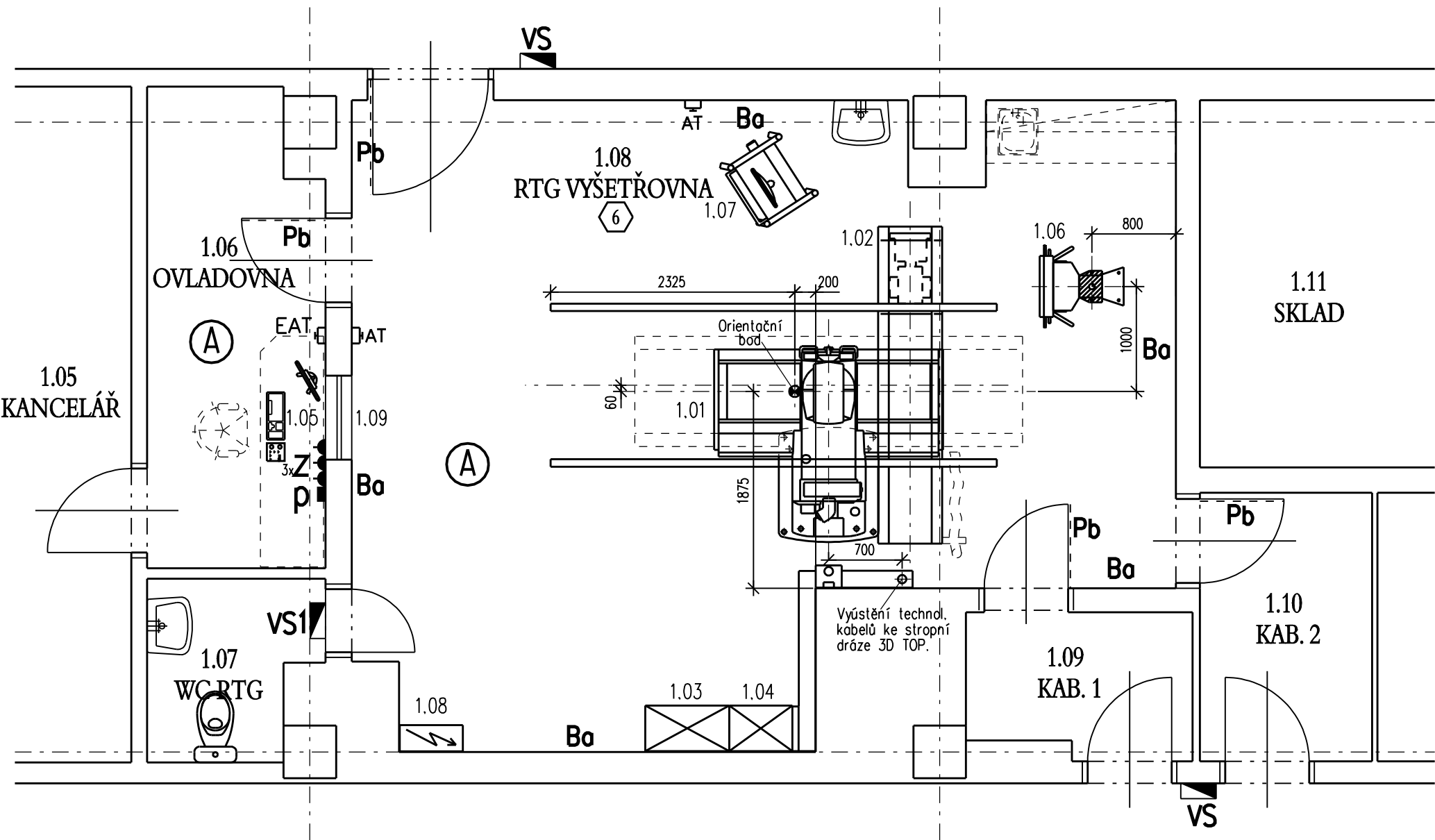

LEGENDA ZAKRESLENÉHO ZAŘÍZENÍ

- 1.01 Systém AXIOM Luminos TF – vyšetřovací komplet
 - 1.02 Systém AXIOM Luminos TF – stropní stativ s lampou 3D TOP
 - 1.03 Systém AXIOM Luminos TF – generátor
 - 1.04 Systém AXIOM Luminos TF – systémová skříň
 - 1.05 Ovládací prvky
 - 1.06 Vertikální stativ VERTIX TOP
 - 1.07 Vozík na monitory
 - 1.08 Technologická rozvodná skříň
 - 1.09 Okno pozorovací s olovnatým sklem – ekv. min. 2,2 Pb
- Nouzová tlačítka AT, EAT

POZNÁMKA:

Všechny míry jsou v mm od čisté (obložené) zdi nebo podlahy.
Dodržte kóty, dimenze a rozteče ! Púdorysné kótování vývodů pro specialisty (např.mediplýnů, el. zásuvek), umyvadel a dřezů je vždy na střed příslušného vývodu.
Provedení elektroinstalace v ostatních nezdravotnických prostorách se řeší dle ČSN 33 2000 – 3.
Požadavky ČSN 33 2000 – 3 v místnostech pro lékařské účely řeší ČSN 332140.
Způsob napájení el. zásuvek a všech pevně instalovaných el. spotřebičů v místnostech pro lékařské účely je dán typem místnosti dle ČSN 332140, který je uveden v šestiúhelníku u názvu místnosti.

OZNAČENÍ VÝVODŮ PRO SPECIALISTY:

- A** Elektrostaticky vodivá uzemněná podlaha. Vnitřní el. odpor v rozsahu $5 \times 10^4 - 10^6 \Omega$.
- Pb** Ochrana proti RTG záření na dveřích (tl. plechu 2,0 mm) – po provedení označit 30 mm vysokými písmeny.
- Bo** Ochrana proti RTG záření na stěnách 30 mm silná, provedena ze spec. barytové směsi – po provedení označit 30 mm vysokými písmeny.
- VS** Elektrický přívod pro výstražné návěští, 5 x 1,5 mm Cu přivést od technologické rozvodné desky pro dva samostatné okruhy, tj. červený nápis NEVSTUPOVAT svítící při RTG záření a žlutý nápis KONTROLOVANÉ PÁSMO svítící při zapnutí hlavního vypínače RTG přístroje – umístěno přednostně vedle dveří ve výšce 1500 mm (popřípadě nade dveřmi).
- VS1** Výstražné signální světlo 230 V bílé s červeným nápisem "NEVSTUPOVAT" – umístěné 1500 mm vysoko vedle dveří (popřípadě nade dveřmi) a znázornění na výkrese. Vývody 3x 1,5 mm Cu zatáhnout pod technologickou rozvodnou desku.
- AT** Nouzová tlačítka – vypínací, přívody a zapojení zajišťuje dodavatel stavby – zatáhnout pod rozvodnou technologickou desku.
- EAT** Nouzová tlačítka – vypínací, zapínací, přívody a zapojení zajišťuje dodavatel stavby – zatáhnout pod rozvodnou technologickou desku.
- Z** El. zásuvka 230 V/16 A, v místnostech pro lékařské účely napáj. přes proudový chránič. – 1200 mm vysoko.
- p** Dvojzásuvka počítačové sítě – dle projektu slaboproudu.

PŘÍLOHA VÝKRESU:

Výkres č.

- 002 PÚDORYS 1.NP – Strop + elektro
- 003 PÚDORYS 1.NP – Podlaha

Montážní výkresy pro pracoviště RTG.

- 03 dveřní spínač
- 05 kabelový kanál (doporučené řešení)
- 06 okno pozorovací pro RTG
- 20A nouzová tlačítka pro RTG
- 26 pomocné obvody
- 31 montážní kámen
- 43 pomocný profil stropní konstrukce
- 405 rozložení sil ve stropní konstrukci

VEDOUCÍ PROJEKTANT HANA MALEVIČOVÁ		VYPRACOVAL TOMÁŠ VÁCLAVÍK	Č. PARÉ		
INVESTOR FN Olomouc					
NÁZEV STAVBY				STUPEŇ RP	DATUM 08/2007
FN OLOMOUC Instalační příprava pro skiaskopicko-skiagrafický přístroj AXIOM Luminos TF fy Siemens				MĚŘÍTKO 1:50	FORMÁT 6 x A4
OBSAH VÝKRESU	Půdorys 1. NP - Technologie			ZAK. Č.	ČÍS. VÝKR.
PROFESE	ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE			07	058001