

DLOUHODOBÝ MAJETEK
Karta stroje nebo zařízení
Účetní období: 2. 2021

Čárový kód	1026733-000	AUTO SANITNÍ 6M38802	ČMQI 000-100-026-733
Inventární úsek	0321	PROVOZ DOPRAVY SANITNÍ *	
Nákladové středisko	9402	Prov. služby: Provoz dopravy - sanitní - přev.FNOL	
Umístění	AXG0		
Úplné zatřídění	2-63	29.10.2 .	SKP:34102N
Daň. skupina	2		
Vlastní třídění	B Ostatní vybavení		Statistické třídění
Skupina DM	022: Movité věci a soubory movitých věcí		02203: Dopravní prostředky
Zb. hod./Zb. měs.	27 498,00 / 59		
Účet PC:	02203000	Způsob nabytí	
PC:	2 749 814,00	Způsob využití	používání organizací
Oprávky:	1 049 246,00	Datum pův. pořiz.:	
Zůstat. cena:	1 700 568,00	Datum zařazení	12.2017
Doba úč. odpisu:	96	Plán.ukonč.úč.odp.	31.12.2025
Roční oprávky:	28 358,00		
Výrobce	ZDE208 VOLKSWAGEN AG	Výrobní číslo	WV3ZZZ7JZX00405
Stát	DE Německo	Typ	VOLKSWAGEN T6 2
Dodavatel	AUTODRUZSTV AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ	Rok výroby	2017
		Do provozu:	16.11.2017
		Garance:	17.11.2019

PROVEDENÉ ZMĚNY

Účetní doklad	Datum změny	Změna účetní ceny	Změna účetního odpisu	Cena účetní celková	Název druhu změny
---------------	-------------	----------------------	--------------------------	------------------------	-------------------

KARTA ODPISŮ ÚČETNÍCH


Datum změny	Cena účetní	Změna účetního odpisu	Oprávky účetní	Cena účetní zůstatková
-------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pořadové číslo	Čárový kód	Název příslušenství	Datum	Cena účetní	Výrobní číslo
1	1026733-001	NOSÍTKO BRAVA POWER TG 1000	31.12.2017	0,00	17070163

POZNÁMKY

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
 Oddělení majetkového účetnictví
 I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
 (7)

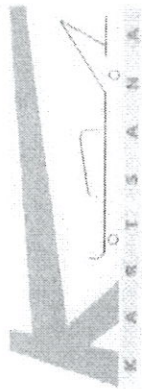

POUŽÍVÁNÍ A MANIPULACE
NOSÍTKA BRAVA POWER

1.- ÚVOD

1.1.- Úvod

Nosítka BRAVA jsou navržena výhradně k záchraně a přepravě pacientů. Výrobek vyhovuje požadavkům směrnice 93/43/EWG. Jedná se o model s elektrickým a hydraulickým pohonem, který umožňuje dvěma tlačítky nastavit výšku podle potřeby. Při případné poruše automatické části je možná ruční obsluha.

K umístění nosítek BRAVA do vozidla se musí použít kolejnicový nosič KARTSANA BRAVO.

Tato nosítka byl testovaná z hlediska shody s normou UNE-EN 1789.

Zde jsou uvedeny veškeré informace týkající se ošetřování, dezinfekce a údržby. Odrážejí naše nejnovější zkušenosti a znalosti. Výkresy nejsou v měřítku 1:1.

Vyhrazujeme si právo změny technických parametrů kolejnicového nosiče BRAVO za účelem zvyšování kvality výrobků.



KARTSANA, S.L.
c/ Urgell, 1. Pol. Ind. Can Carner
08211 Castellar del Vallès
Barcelona (Spain)

Informační nálepka
BRAVA

Model: **TG-1000**


Commercial name: **POWER BRAVA**

Voltage: **24V DC**

Max. Power Input: **770W**

Protection: **IP 40**


Maximum duty cycle

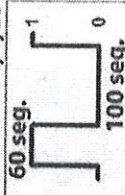

Maximální pracovní cyklus

60 sek. - max. prac. cyklus

100 sek. - doba přestávky

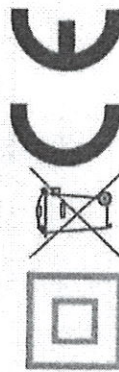

Před použitím čtěte návod.



Maximální zatížení 300 kg.