

D 027695-000

## Periodická prohlídka přístroje

B | BRAUN

## Perfusor compact

Výrobce: B. Braun Melsungen AG

Obj. číslo přístroje: 8714827

Výrobní číslo přístroje: 28 505

Uvedeno do provozu:

Prohlídka musí být prováděna pravidelně každých 24 měsíců. Periodickou prohlídku provádějte v souladu s návodem k použití a servisním návodem. Používejte výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřicí přístroje. Všechny naměřené hodnoty musí být dokumentovány. Příslušenství a jeho doprovodná dokumentace musí být uvedena ve zkušebním protokolu.

Kontrolovat		Zjištěné nedostatky			Potvrz.	
<b>1. Vizuální prohlídka (čistota, kompletnost, poškození)</b>						
1.1	Uchycení stříkačky (držák, axiální uchycení, páčka a západka pohonu, senzor založení stříkačky)				<input checked="" type="checkbox"/>	
1.2	Klávesnice				<input checked="" type="checkbox"/>	
1.3	Síťová zásuvka a kabel		Nový		<input checked="" type="checkbox"/>	
1.4	Multifunkční konektor MFC a kabel				<input checked="" type="checkbox"/>	
1.5	Baterie/akumulátor, kontakty				<input checked="" type="checkbox"/>	
1.6	Nožičky				<input checked="" type="checkbox"/>	
1.7	Svorka na stojan, západka svorky				<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>2. Funkční zkouška</b>						
2.1	Zapněte přístroj Porovnejte průběh testu LCD s návodem Zkontrolujte zvukový signál Porovnejte zadanou rychlost s displejem				<input checked="" type="checkbox"/>	
2.2	Proveďte funkci přivolání obsluhy (pomocí MFC) Pozn.: může být nastaveno a) statická signalizace b) dyn. signalizace s aktivací rozepnutí smyčky c) dyn. signalizace bez aktivace rozepnutí smyčky				<input checked="" type="checkbox"/>	
2.3	Přepněte přístroj do aku/bat. režimu a sledujte průběh testu Pozn.: při vybitém akumulátoru/baterii ji vyměňte a zopakujte test				<input checked="" type="checkbox"/>	
2.4	Proveďte signalizaci displeje „000b“ resp. „000a“ s aku				<input checked="" type="checkbox"/>	
2.5	Tlačítko umlčení alarmu				<input checked="" type="checkbox"/>	
2.6	Senzor založení pistu stříkačky				<input checked="" type="checkbox"/>	
3.0	<b>Okluzní tlaky</b> (alternativně jednou z metod)	manometr +střík. 50 ml přípravek 770161/6	1(<0,6bar) ..... 1(<40N) <u>25N</u>	2(<0,9bar) ..... 2(<59N) <u>38N</u>	3(<1,2bar) ..... 3(<75N) <u>55N</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.0	<b>Volba stříkačky</b>	OPS <input type="checkbox"/>	interní <input checked="" type="checkbox"/>	Eeprom <input type="checkbox"/>	XXX	
4.1	Přepínání stříkaček 20 / 50 ml		Výrobce použ. stříkaček	Souhlasí s nastavením		
		20 ml	B. Braun	Ano	<input checked="" type="checkbox"/>	
		50 ml	B. Braun	Ano	<input checked="" type="checkbox"/>	
4.2	Čitelnost tabulky stříkaček				<input checked="" type="checkbox"/>	
5.0	<b>Zkouška elektrické bezpečnosti podle ČSN EN 60601</b>					
	Síťové napětí <u>226</u> V	Odpor ochranného vodiče kabelu (<0,2 Ohm) <u>0,06</u> Ohm	Unikající proud (<10 µA)	<u>110</u> µA	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.0	<b>Dokumentace přístroje:</b> • návod k obsluze ..... • provozní kniha ..... • bezpečnostní prohlídky ..... • evidence oprav .....				<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
7.0	<b>Příslušenství</b> (MFC, kabel napájení 12 V, kabel přivolání obsluhy) .....					
8.0	<b>Speciální nastavení:</b> Omezení rychl. dávkování: ...99,9 ml/h. Omezení rychl. dávkování bolusu 800 ml/h.					
<b>Výsledek prohlídky:</b> Byly zjištěny nedostatky, které mohou způsobit ohrožení pacienta, obsluhy nebo okolí. <input checked="" type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE Pokud ano, které: .....						
<b>Doporučená opatření:</b> .....						
Datum příští prohlídky: <u>11/2009</u>	Prohlídku provedl: Tománek podpis: <u>Tománek</u>	Přístroj předán: datum podpis: <u>Tománek</u>				

Záznam o provedené kontrole uložte u provozní dokumentace přístroje.

B | BRAUN

B. Braun Medical s.r.o.  
Servisní centrum

HOTLINE

Tel. +420-271 091 555

Fax +420-271 091 552

11  
405 86 285  
IČ: 485 86 285  
DIČ: CZ48586285