

# Periodická kontrola a prověření ZP

podle zákona 123/2000 sb., §52:

Výrobce B.Braun Melsungen AG

**B BRAUN**  
Perfusor compact

Obj. číslo přístroje: 8714827

Výrobní číslo přístroje: 28505

Středisko: 1-INTERNA JIP

Prohlídka musí být prováděna pravidelně každých 24 měsíců. Periodickou prohlídku provádějte v souladu s návodem k použití a servisním návodem. Používejte výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřicí přístroje. Všechny naměřené hodnoty musí být dokumentovány. Příslušenství a jeho doprovodná dokumentace musí být uvedena ve zkušebním protokolu.

Kontrolovat		Zjištěné nedostatky			Potvrz.	
<b>Vizuální prohlídka (čistota, kompletnost, poškození)</b>						
1.1	Uchycení stříkačky (držák, axiální uchycení, páčka a západka pohonu, senzor založení stříkačky)				<input checked="" type="checkbox"/>	
1.2	Klávesnice				<input checked="" type="checkbox"/>	
1.3	Síťová zásuvka a kabel				<input checked="" type="checkbox"/>	
1.4	Multifunkční konektor MFC a kabel		Dodán nový		<input checked="" type="checkbox"/>	
1.5	Baterie / akumulátor, kontakty				<input checked="" type="checkbox"/>	
1.6	Nožičky				<input checked="" type="checkbox"/>	
1.7	Svorka na stojan, západka svorky				<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Funkční zkouška</b>						
2.1	Zapněte přístroj Porovnejte průběh testu LCD s návodem Zkontrolujte zvukový signál Porovnejte zadanou rychlost s displejem				<input checked="" type="checkbox"/>	
2.2	Prověřte funkci přivolání obsluhy (pomocí MFC) Pozn.: může být nastaveno a) statická signalizace b) dyn. signalizace s aktivací rozepnutí smyčky c) dyn. signalizace bez aktivace rozepnutí smyčky				<input checked="" type="checkbox"/>	
2.3	Přepněte přístroj do aku/bat. režimu a sledujte průběh testu Pozn.: při vybitém akumulátoru/baterii ji vyměňte a zopakujte test				<input checked="" type="checkbox"/>	
2.4	Prověřte signalizaci displeje „000b“ resp. „000a“ s aku				<input checked="" type="checkbox"/>	
2.5	Tlačítko umlčení alarmu				<input checked="" type="checkbox"/>	
2.6	Senzor založení pistu stříkačky				<input checked="" type="checkbox"/>	
3.0	<b>Okluzní tlaky</b> (alternativně jednou z metod)	manometr +střík. 50 ml přípravek 770161/6	1(<0,6bar) .....	2(<0,9bar) .....	3(<1,2bar) .....	<input type="checkbox"/>
4.0	<b>Volba stříkačky</b>		1(<40N) <u>20 N</u>	2(<59N) <u>35 N</u>	3(<75N) <u>55 N</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.1	Přepínání stříkaček 20 / 50 ml	OPS	<input type="checkbox"/>	interní	<input type="checkbox"/>	XXX
			Výrobce použ. stříkaček		Souhlasí s nastavením	
			OmniFix 20 B Braun		22	<input checked="" type="checkbox"/>
			OPS 50 B Braun		50	<input checked="" type="checkbox"/>
4.2	Čitelnost tabulky stříkaček					<input checked="" type="checkbox"/>
5.0	<b>Zkouška elektrické bezpečnosti podle ČSN EN 60601 měřeno přístrojem Meditest 50</b>				V.c. 200 298	<input checked="" type="checkbox"/>
	Síťové napětí	230 V	Odpor ochranného vodiče vč. kabelu (<0,2 Ohm)	2,06 Ohm	Unikající proud (<10 µA)	1 µA
6.0	<b>Dokumentace přístroje:</b> • návod k obsluze • provozní kniha • bezpečnostní prohlídky • evidence oprav					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7.0	<b>Příslušenství</b> (MFC, kabel napájení 12 V, kabel přivolání obsluhy)					<input checked="" type="checkbox"/>
8.0	<b>Speciální nastavení:</b> Omezení rychl. dávkování: <u>99.9</u> ml/h. Omezení rychl. dávkování bolusu <u>800</u> ml/h.					<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Výsledek prohlídky:</b>						
Byly zjištěny nedostatky, které mohou způsobit ohrožení pacienta, obsluhy nebo okolí. <input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE						
Zdravotnický prostředek splňuje požadavky uvedené výše a vyhovuje technickým předpisům, popř. technickým dokumentům, technickým normám, podle nichž byl vyroben.						
<b>Doporučená opatření:</b>						
Datum příští prohlídky:	Prohlídku provedl: datum:		Přístroj předán: datum:			
9. 2007	21.9. 2005		21.9. 05			
	podpis: Bičánek		podpis: Renata Sedláčková			
			zdravotní sestra			

**B BRAUN**

B. Braun Mezinárodní s.p.a.  
servisní středisko  
HDS EuroCare s.r.o.  
Konská 543  
739 61 Trinec

Tel.: +420 558 304 420  
Fax: +420 558 338 322  
Mob.: +420 724 104 909

01/22  
KULTURNÍ NEMOCNICE OLOMOUC  
servisní středisko  
301  
13  
interní klinika  
oddělení intenzivní péče ITI