

Periodická prohlídka přístroje:

Výrobce B. Braun Melsungen AG

Obj. číslo přístroje: 34 14 624 Výrobní číslo přístroje: 38 340 Uvedeno do provozu:

Prohlídka musí být prováděna pravidelně každých 24 měsíců. Periodickou prohlídku provádějte v souladu s návodem k použití a servisním návodem. Používejte výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřicí přístroje. Všechny naměřené hodnoty musí být dokumentovány. Příslušenství a jeho doprovodná dokumentace musí být uvedena ve zkušebním protokolu.

| Kontrolovat | | Zjištěné nedostatky | | | Potvrz. | |
|---|--|---|---|-----------------------|---------------------|---|
| 1. Vizualní prohlídka (čistota, kompletnost, poškození) | | | | | | |
| 1.1 | Uchycení stříkačky (držák, axiální uchycení, páčka a západka pohonu, senzor založení stříkačky) | | | | ✓ | |
| 1.2 | Klávesnice | | | | ✓ | |
| 1.3 | Síťová zásuvka a kabel | | <i>Nový</i> | | ✓ | |
| 1.4 | Multifunkční konektor MFC a kabel | | | | ✓ | |
| 1.5 | Baterie / akumulátor, kontakty | | <i>Nový AKKU-PACK</i> | | ✓ | |
| 1.6 | Nožičky | | | | ✓ | |
| 1.7 | Svorka na stojan, západka svorky | | <i>Bez svorky</i> | | ✓ | |
| 2. Funkční zkouška | | | | | | |
| 2.1 | Zapněte přístroj Porovnejte průběh testu LCD s návodem Zkontrolujte zvukový signál Porovnejte zadanou rychlost s displejem | | | | ✓ | |
| 2.2 | Proveďte funkci přivolání obsluhy (pomocí MFC) Pozn.: může být nastaveno a) statická signalizace b) dyn. signalizace s aktivací rozepnutí smyčky c) dyn. signalizace bez aktivace rozepnutí smyčky | | | | ✓ | |
| 2.3 | Přepněte přístroj do aku/bat. režimu a sledujte průběh testu Pozn.: při vybitém akumulátoru/baterii ji vyměňte a zopakujte test | | | | ✓ | |
| 2.4 | Proveďte signalizaci displeje „000b“ resp. „000a“ s aku | | | | ✓ | |
| 2.5 | Tlačítko umlčení alarmu | | | | ✓ | |
| 2.6 | Senzor založení pistu stříkačky | | | | ✓ | |
| 3.0 | Okluzní tlaky (alternativně jednou z metod) | manometr +střík. 50 ml | 1(<0,6bar) | 2(<0,9bar) | 3(<1,2bar) | ✓ |
| | | přípravek 770161/6 | 1(<40N) <i>30kN</i> | 2(<59N) <i>50kN</i> | 3(<75N) <i>65kN</i> | ✓ |
| 4.0 | Volba stříkačky | OPS | interní ✓ | Eeprom | XXX | |
| 4.1 | Přepínání stříkaček 20 / 50 ml | | Výrobce použ. stříkaček | Souhlasí s nastavením | | |
| | | 20 ml | <i>B. Braun</i> | <i>Ano</i> | ✓ | |
| | | 50 ml | <i>B. Braun</i> | <i>Ano</i> | ✓ | |
| 4.2 | Čitelnost tabulky stříkaček | | | | ✓ | |
| 5.0 Zkouška elektrické bezpečnosti podle ČSN EN 60601 | | | | | | |
| | Síťové napětí <i>120</i> V | Odpor ochranného vodiče vč. kabelu (<0,2 Ohm) <i>907</i> Ohm | Unikající proud (<10 µA) <i>3</i> µA | | ✓ | |
| 6.0 | Dokumentace přístroje: • návod k obsluze • provozní kniha • bezpečnostní prohlídky • evidence oprav | | | | ✓ | |
| 7.0 | Příslušenství (MFC, kabel napájení 12 V, kabel přivolání obsluhy) | | | | ✓ | |
| 8.0 | Speciální nastavení: Omezení rychl. dávkování: <i>99,9</i> ml/h. Omezení rychl. dávkování bolusu: <i>800,0</i> ml/h. | | | | | |
| Výsledek prohlídky: Byly zjištěny nedostatky, které mohou způsobit ohrožení pacienta, obsluhy nebo okolí. ANO (NE) Pokud ano, které: | | | | | | |
| Doporučená opatření: | | | | | | |
| Datum příští prohlídky: <i>10. 2008</i> | Prohlídku provedl: datum: <i>19. 10. 06</i> podpis: <i>Tomášek</i> | Přístroj předán: datum: podpis: | | | | |

Záznam o provedené kontrole uložte u provozní dokumentace přístroje

B | BRAUN

B. Braun Medical s.r.o.
servisní středisko
HDS EuroCare Bruntál
Nádražní 27
792 01 BRUNTÁL

Tel.: (+420) 554 710 385
Fax: (+420) 554 710 386
Mob.: (+420) 602 749 713