

# Periodická kontrola a prověření ZP

podle zákona 123/2000 sb., §28:

Výrobce B.Braun Melsungen AG

# B | BRAUN

## Perfusor compact

E-C-D 025296

Obj. číslo přístroje: 8714827

Výrobní číslo přístroje: 38385

Středisko: I-INTERNA JIP

Prohlídka musí být prováděna pravidelně každých 24 měsíců. Periodickou prohlídku provádějte v souladu s návodem k použití a servisním návodem. Používejte výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřicí přístroje. Všechny naměřené hodnoty musí být dokumentovány. Příslušenství a jeho doprovodná dokumentace musí být uvedena ve zkušebním protokolu.

Kontrolovat		Zjištěné nedostatky			Potvrz.	
<b>1. Vizualní prohlídka (čistota, kompletnost, poškození)</b>						
1.1	Uchycení stříkačky (držák, axiální uchycení, páčka a západka pohonu, senzor založení stříkačky)				<input checked="" type="checkbox"/>	
1.2	Klávesnice				<input checked="" type="checkbox"/>	
1.3	Síťová zásuvka a kabel				<input checked="" type="checkbox"/>	
1.4	Multifunkční konektor MFC a kabel				<input checked="" type="checkbox"/>	
1.5	Baterie / akumulátor, kontakty				<input checked="" type="checkbox"/>	
1.6	Nožičky				<input checked="" type="checkbox"/>	
1.7	Svorka na stojan, západka svorky				<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>2. Funkční zkouška</b>						
2.1	Zapněte přístroj Porovnejte průběh testu LCD s návodem Zkontrolujte zvukový signál Porovnejte zadanou rychlost s displejem				<input checked="" type="checkbox"/>	
2.2	Prověřte funkci přivolání obsluhy (pomocí MFC) Pozn.: může být nastaveno a) statická signalizace b) dyn. signalizace s aktivací rozepnutí smyčky c) dyn. signalizace bez aktivace rozepnutí smyčky				<input checked="" type="checkbox"/>	
2.3	Přepněte přístroj do aku/bat. režimu a sledujte průběh testu Pozn.: při vybitém akumulátoru/baterii ji vyměňte a zopakujte test				<input checked="" type="checkbox"/>	
2.4	Prověřte signalizaci displeje „000b“ resp. „000a“ s aku				<input checked="" type="checkbox"/>	
2.5	Tlačítko umlčení alarmu				<input checked="" type="checkbox"/>	
2.6	Senzor založení pistu stříkačky				<input checked="" type="checkbox"/>	
3.0	<b>Okluzní tlaky</b> (alternativně jednou z metod)	manometr +střík. 50 ml Kalibrační léra v.č CO 7712 770161/6	1(<0,6bar) ..... 1(<40N) <u>20N</u>	2(<0,9bar) ..... 2(<59N) <u>62N</u>	3(<1,2bar) ..... 3(<75N) <u>62N</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.0	<b>Volba stříkačky</b>	OPS <input checked="" type="checkbox"/>	interní <input type="checkbox"/>	Eeprom <input type="checkbox"/>	XXX	
4.1	Přepínání stříkaček 20 / 50 ml	Výrobce použ. stříkaček	Souhlasí s nastavením			
		20 ml	Omnifix 20 B Braun	20	<input checked="" type="checkbox"/>	
		50 ml	OPS 50 B Braun	50	<input checked="" type="checkbox"/>	
4.2	Čitelnost tabulky stříkaček				<input checked="" type="checkbox"/>	
5.0	<b>Zkouška elektrické bezpečnosti podle ČSN EN 60601 Měřeno přístrojem Meditest 50 v.č.200298</b>					
	Síťové napětí <u>230V</u>	Odpor ochranného vodiče vč. kabelu (<0,2 Ohm) <u>0,2</u> Ohm	Unikající proud (<10 µA) <u>2</u> µA		<input checked="" type="checkbox"/>	
6.0	<b>Dokumentace přístroje:</b>					
	• návod k obsluze				<input type="checkbox"/>	
	• provozní kniha				<input type="checkbox"/>	
	• bezpečnostní prohlídka				<input type="checkbox"/>	
	• evidence oprav				<input type="checkbox"/>	
7.0	Příslušenství (MFC, kabel napájení 12 V, kabel přivolání obsluhy)				<input checked="" type="checkbox"/>	
8.0	<b>Speciální nastavení:</b> Omezení rychl. dávkování: <u>99.9</u> ml/h. Omezení rychl. dávkování bolusu <u>800</u> ml/h.					
<b>Výsledek prohlídky:</b>						
Byly zjištěny nedostatky, které mohou způsobit ohrožení pacienta, obsluhy nebo okolí. <input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE						
<b>Zdravotnický prostředek splňuje požadavky uvedené výše a vyhovuje technickým předpisům, popř. technickým dokumentům, technickým normám, podle nichž byl vyroben.</b>						
<b>Doporučená opatření:</b>						
Datum příští prohlídky:	Prohlídku provedl: datum:		Přístroj předán: datum:			
<u>9-2008</u>	<u>14.9.2006</u>		<u>01/22</u>			
	podpis: Bičánek M.		FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ I.P. Pavlova 6. 775 20 Olomouc 588 441 111 L interní klinika Jednotka intenzivní péče I/11 Přednostka: Prof. MUDr. Jan LUKL, CSc.			

# B | BRAUN

B. Braun Medical s.r.o.

servisní středisko  
HDS EuroCare s.r.o.  
Konská 543  
720 01 Olomouc

Záznam o provedené kontrole uložte u provozní dokumentace přístroje.

Tel. +420 558 304 420  
Fax: +420 558 338 322  
Mob.: +420 724 104 909