

Periodická kontrola a prověření ZP

podle zákona 123/2000 sb., §28:

Výrobce B.Braun Melsungen AG

B | BRAUN

Perfusor compact

E.C. DO 29047

Obj. číslo přístroje: 8714827

Výrobní číslo přístroje: 48487

Středisko: I. interní JIP

Prohlídka musí být prováděna pravidelně každých 24 měsíců. Periodickou prohlídku provádějte v souladu s návodem k použití a servisním návodem. Používejte výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřicí přístroje. Všechny naměřené hodnoty musí být dokumentovány. Příslušenství a jeho doprovodná dokumentace musí být uvedena ve zkušebním protokolu.

Kontrolovat		Zjištěné nedostatky		Potvrz.
1. Vizualní prohlídka (čistota, kompletnost, poškození)				
1.1	Uchycení stříkačky (držák, axiální uchycení, páčka a západka pohonu, senzor založení stříkačky)			☒
1.2	Klávesnice			☒
1.3	Síťová zásuvka a kabel			☒
1.4	Multifunkční konektor MFC a kabel			☒
1.5	Baterie / akumulátor, kontakty			☒
1.6	Nožičky			☒
1.7	Svorka na stojan, západka svorky			☒
2. Funkční zkouška				
2.1	Zapněte přístroj Porovnejte průběh testu LCD s návodem Zkontrolujte zvukový signál Porovnejte zadanou rychlost s displejem			☒
2.2	Proveďte funkci přivolání obsluhy (pomocí MFC) Pozn.: může být nastaveno a) statická signalizace b) dyn. signalizace s aktivací rozepnutí smyčky c) dyn. signalizace bez aktivace rozepnutí smyčky			☒
2.3	Přepněte přístroj do aku/bat. režimu a sledujte průběh testu Pozn.: při vybitém akumulátoru/baterii ji vyměňte a zopakujte test			☒
2.4	Proveďte signalizaci displeje „000b“ resp. „000a“ s aku			☒
2.5	Tlačítko umlčení alarmu			☒
2.6	Senzor založení pistu stříkačky			☒
3.0	Okluzní tlaky (alternativně jednou z metod)	manometr +střík. 50 ml Kalibrační lera v.č CO 7712 770161/6	1(<0,6bar) 2(<0,9bar) 3(<1,2bar)	☐
4.0	Volba stříkačky	OPS ☒ interní ☐ Eeprom ☐	1(<40N) <u>20N</u> 2(<59N) <u>40N</u> 3(<75N) <u>60N</u>	☒
4.1	Přepínání stříkaček 20 / 50 ml	Výrobce použ. stříkaček 20 ml Omnix 20 B Braun 50 ml OPS 50 B Braun	Souhlasí s nastavením 20 50	XXX ☒ ☒ ☒
4.2	Čitelnost tabulky stříkaček			☒
5.0	Zkouška elektrické bezpečnosti podle ČSN EN 60601 Měřeno přístrojem Meditest 50 v.č.200298			
	Síťové napětí <u>230</u> V	Odpor ochranného vodiče vč. kabelu (<0,2 Ohm) <u>0,08</u> Ohm	Unikající proud (<10 µA) <u>2</u> µA	☒
6.0	Dokumentace přístroje: • návod k obsluze • provozní kniha • bezpečnostní prohlídky • evidence oprav			
7.0	Příslušenství (MFC, kabel napájení 12 V, kabel přivolání obsluhy)			
8.0	Speciální nastavení: Omezení rychl. dávkování: <u>99.9</u> ml/h. Omezení rychl. dávkování bolusu <u>800</u> ml/h.			
Výsledek prohlídky: Byly zjištěny nedostatky, které mohou způsobit ohrožení pacienta, obsluhy nebo okolí. ☐ ANO ☒ NE				
Zdravotnický prostředek splňuje požadavky uvedené výše a vyhovuje technickým předpisům, popř. technickým dokumentům, technickým normám, podle nichž byl vyroben.				
Doporučená opatření:				
Datum příští prohlídky: <u>9. 2008</u>		Prohlídku provedl: datum: <u>14.9. 2006</u> podpis: Bičánek M.		Přístroj předán: datum: <u>14.9. 2006</u> podpis: <u>89</u> <u>301</u> <u>013</u>

B | BRAUN

B. Braun Medical s.r.o.

servisní středisko

HDS EuroCare s.r.o.

Konská 543

720 61 Těš.

Tel. +420 558 304 420

Fax: +420 558 338 322

Mob.: +420 724 104 909

Záznam o provedené kontrole uložit u provozní dokumentace přístroje.

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
I.P. Pavlova 6. 775 00 Olomouc
588 441 111
I. interní klinika
Jednotka intenzivní péče IT1
Předseda: Prof. MUDr. J. Hájek, CSc.