

**TRANSKONTAKT - MEDICAL s.r.o.**

Na Zatlane 5, CZ -150 00 PRAHA 5

DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001

PROTOKOL č. 012/2007**o kontrole zdravotnických prostředků dle § 28 a § 52 zák. 123/2000 Sb.**

VÝROBNÍ ČÍSLO: 004 406 E 1.č. 101056-000	INFUZNÍ PUMPA ARCOMED VP 5000	NEMOCNICE: FN Olomouc I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
INSTALACE: 7.7.1994		ODD.: I. INTERNÍ JIP 1 011

Popis zkoušky	Povolení rozsah	Naměřené hodnoty
Stav skříně		DOBRÝ
Elektro bezpečnostní testy	Ri (MΩ)>50, Rz (Ω) 0,1	Ri 50 MΩ Rz 0,04 Ω ZO1 4259421
Baterie/Dobíjecí proud		12V 1,4Ah / 143 mA
Funkční testy:	ALARM, ČERPADLO, DVÍŘKA, DISPLEJ	DOBRÉ
Spínače:	KAPKY, VZDUCH	DOBRÉ
Kalibrace:	± 5 % IS - 125	30, 50, 100, 300, 600, mL/Hod.
Výstupní tlak:	150 kPa - 250 kPa	ODPOVĚDÁ ¹
Bezpečnostní tlak:	NASTAVENÍ 7 - 0	70 kPa
Stav mechanických dílů:		DOBRÝ

Zařízení bylo podrobeno testu v délce 1 ② 3 4 5 6 hodin.

Zak.list č.: 037/2004

Zkoušené zařízení odpovídá ~~neodpovídá~~ TP a vyhovuje ~~nevyhovuje~~ provozu.

Měření provedeno dne: 14 -12- 2007

Termín další kontroly: 14.12.2009

Měření provedl: **SUCHOMEL Zdeněk**

Protokol převzal: 14-12-2007

TRANSKONTAKT s.r.o.
MEDICAL
Na Zatlane 5
150 00 PRAHA 5
kancelář: Starobrněnská 13
602 00 BrnoKaučovník nemocnice Olomouc
odbor hlavního mechanika
údržby a oprav
I. P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC
tel.: 588 445 125, fax: 588 442 529

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. Spisová značka: odd. C, vložka 11688

Bankovní spojení ČSOB Praha č. účtu 576455083/0300

Zelená linka: 800 100 895

IČO 45797803

Praha : Na Zatlane 5, 150 00 Praha 5

Tel.: 25156 4228 Fax: 25156 6226

DIČ CZ45797803

Brno : Starobrněnská 13, 602 00 Brno

Tel.: 54221 2616 Fax: 54221 4052

e-mail: transkontakt @ medicaltk.com

Web stránka: www.medicaltk.com