

QA TEST FORCE FX-8

OBJEDNÁVKA: DIS0801147 SN: F8B5398A C 005922
 TESTOVAL: KS DATUM: 5.6.2008

3.0 PRE-TEST CHECK
 4.0 FUNKČNÍ TEST
 4.6 AUDIO TEST
 KONTROLA NÁLEPEK
 BATERIE: 3,096V

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
 Rp = 0,18 Ω
 Ri > 20 MΩ
 Iun = 0,15 mA
 Iunp = 0,005 mA

5.0 REM TEST

A. 100Ω REM LIGHT - ZELENÁ

Body REM trip

B. 40Ω - ZELENÁ
 C. 120Ω - ČERVENÁ
 D. Reset 120Ω
 E. 150Ω - ČERVENÁ
 F. 60Ω - ZELENÁ
 G. 100Ω - ČERVENÁ
 H. 30Ω - ZELENÁ
 I. 10Ω - ZELENÁ
 J. 3Ω - ČERVENÁ

Body NON-REM trip

K. 24Ω - ČERVENÁ
 J. 5Ω - OFF

6.0 TESTY VÝKONŮ

A. BIPOLAR 100Ω

VÝKON	MOD	BIPOLAR	FTSW (mA)	
70	PRECISE BIPOLAR	771 mA ≤	812	≤ 897 mA
70	STANDARD BIPOLAR	771 mA ≤	812	≤ 897 mA
70	MACRO BIPOLAR	771 mA ≤	812	≤ 897 mA

B. MONOPOLAR 300Ω (CUT/BLEND), 500Ω (COAG)

VÝKON	MOD	MONOPOLAR	HDSW (mA)	FTSW (mA)	
300	LOW CUT	922 mA ≤	979	974	≤ 1072 mA
300	PURE CUT	922 mA ≤	979	974	≤ 1072 mA
200	BLEND CUT	753 mA ≤	813	805	≤ 876 mA
120	COAG DESICCATE	452 mA ≤	494	494	≤ 525 mA
120	COAG FULGURATE LCF	452 mA ≤	480	480	≤ 525 mA
120	COAG FULGURATE HCF	452 mA ≤	-	-	≤ 525 mA
120	SPRAY COAG	452 mA ≤	486	487	≤ 525 mA

Výsledek prohlídky (závěr):

Prověřený zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek a je možno ho používat při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

TECHNIK: **Kamil Slaný**

DATUM PŘÍŠTÍ KONTROLY: 12/2008

PODPIS:

Kamil Slaný
 Technicare CZ, spol. s r.o.
 Horní 266/73, 70030, Ostrava
 DIČ: CZ26817802 IČ: 26817802