

Periodická kontrola a prověření ZP  
podle zákona 123/2000 sb., §52:

I 017355  
**B|BRAUN**  
INFUSOMAT FM

Provozovatel: FN Olomouc Výrobce:  
B.Braun Melsungen AG  
34209 Melsungen, SRN

vyr. č.: 00967  
obj. č.: 8719543

II-INTERNA METABOL JIP

Periodickou prohlídku je nutné provést podle tohoto formuláře ve vazbě na návod k použití, na servisní návod a na případné změny přístroje po každých 24 měsících provozu. Používejte výhradně kalibrované měřicí přístroje a pomůcky. Veškeré naměřené hodnoty musí být zaznamenány.

Vizuální kontrola		
Provedený úkon	Zjištěné nedostatky	Potvrzení
Čistota, kompletnost, poškození		<input checked="" type="checkbox"/>
Těsnící membrána pumpy		<input checked="" type="checkbox"/>
Foliová klávesnice		<input checked="" type="checkbox"/>
Ovládací jednotka, uzavírací mechanismus, přítlačná klapka pumpy		<input checked="" type="checkbox"/>
Napájecí kabel včetně koncovek		<input checked="" type="checkbox"/>
Systém přivolání obsluhy vedení, konektor		<input checked="" type="checkbox"/>
Kapkový senzor vedení, konektor		<input checked="" type="checkbox"/>
Kontrola pojistek 2x 0,16 A T (2x 0,315 A T pro 120 V)		<input checked="" type="checkbox"/>

Funkční kontrola - naměřené hodnoty musí být zaznamenány

Provedené měření / kontrola	Naměřené hodnoty	Potvrzení	Provedené měření / kontrola	Naměřené hodnoty	Potvrzení
Změřit napájecí síťové napětí	225 V		Elektronické omezení tlaku		
Zapnout přístroj a sledovat:			- nízký tlak 0,4 baru alarm	0,4	<input checked="" type="checkbox"/>
- průběh testu		<input checked="" type="checkbox"/>	- střední tlak 0,8 baru alarm	0,75	<input checked="" type="checkbox"/>
- všechny kontrolky		<input checked="" type="checkbox"/>	- vysoký tlak 1,2 baru alarm	1,1	<input checked="" type="checkbox"/>
Porovnat:			Systém přivolání obsluhy		
- nastavenou rychlost s displejem	100 ml/h	<input checked="" type="checkbox"/>	- v klidu sepnuty kont. 3 - 5		<input checked="" type="checkbox"/>
- nastav. objem s text. displejem	1000 l	<input checked="" type="checkbox"/>	- alarm sepnuty kont. 3 - 1		<input checked="" type="checkbox"/>
- nastavený čas s text. displejem	10.00 h	<input checked="" type="checkbox"/>	Odstavení alarmu		<input type="checkbox"/>
Test akumulátoru			Zkouška elektrické bezpečnosti přístroje (Měřeno Meditest 50) V. 200298		
- přepnutí síť / baterie / síť		<input checked="" type="checkbox"/>	Odpor ochranného vodiče vč. přívodu	max. 0,2 Ω	0,16 Ω <input checked="" type="checkbox"/>
- zapnutí v režimu aku a sledovat průběh testu		<input checked="" type="checkbox"/>	Izolační odpor	min. 2 MΩ	19,9 MΩ <input checked="" type="checkbox"/>
- změřit napětí aku. naprázdno	7,2 V		Svodový proud	max. 0,03 mA	0,021 mA <input checked="" type="checkbox"/>
- změřit napětí aku. při zatížení	7,0 V		- ochr. vodičem	max. 5 μA	..7. μA
Detektor bublin			- přes pacienta		
- 0,1 ml bez alarmu		<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Nechte dobít akumulátor !</b>		
- 0,4 ml alarm		<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrola příslušenství:		
Kapkový senzor			- kabel systému přivolání obsluhy		<input type="checkbox"/>
- přerušeni kapání alarm		<input checked="" type="checkbox"/>	- .....		<input type="checkbox"/>
- průtok alarm		<input checked="" type="checkbox"/>	- .....		<input type="checkbox"/>

Výsledek prohlídky

Byly zjištěny nedostatky, které by mohly způsobit ohrožení pacienta, obsluhy nebo třetí osoby


NE  ANO - které: .....

Zdravotnický prostředek splňuje požadavky uvedené výše a vyhovuje technickým předpisům, popř. technickým dokumentům, technickým normám, podle nichž byl vyroben.

Poznámky:

Měřidla a kalibrační a revizní přístroje: Graduated cylinder 50 +/-0,4 ml, Meditest 50, HDM90

Termín příští prohlídky: 08. 2007 Prohlídka provedena : datum /podpis 28. 2005. / .....

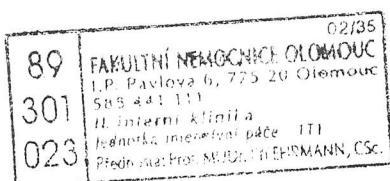

**B|BRAUN**

Tel. +420 558 304 420  
Fax: +420 558 338 322  
Mob.: +420 724 104 909

B. Braun Medical s.r.o.  
servisní středisko  
HDS EuroCare s.r.o.  
Konská 543  
739 61 Těneč