

MEDITECH, s.r.o.
Svatopetrská 7
617 00 Brno / ČR
Tel.: 545422911
Fax: 545422916
DIČ: CZ60707992
E-mail: servis@meditech.cz
zápis v OR: Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka 15318

MEDITECH®
s.r.o.

Prodej a servis lékařské techniky

Ujištění o kontrole č. 07/00886

Servisní středisko Meditech, s.r.o.

Organizace: FN-Olomouc
Zastoupená: paní Ivana Ludvíková
Oddělení: III.int. klinika odd. 39
I.P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
Telefon: 588 443 125
Vaše obj.: DIS07000776

Typ: A-600 inv.č. D025314-000
Sériové číslo: 632 6 036
Příslušenství: SŠ
Závada: Periodická prohlídka
Typ opravy: Kontrola

Datum převzetí: 10.05.2007

Na přístroji byla provedena periodická bezpečnostní kontrola dle Zákona č. 346/2003 Sb. v platném znění, včetně kontroly elektrické bezpečnosti dle ČSN 60 601-1 a souvisejících norem.

Servisní interval je 24 měsíců.

Použité přístroje:

Analyzátor infúzních zařízení Infutest 2000 & RSM Infusion Pump Testers, kalibrováno výrobcem 27.2.2007

Analyzátor elektrických zařízení SECUTEST SIII, výrobní číslo NC4090030001, kalibrováno výrobcem, kalibrační list č. 052305

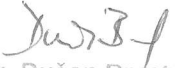
Elektromechanická váha KERN 440-53, výrobní číslo W943046, ověřeno firmou Váhoservis, kalibrační list č. 123/05

Deformační tlakoměr EMERS 0-250 kPa, výrobní číslo EL197205, ověřeno ČMI Brno, kalibrační list č. 6013-KL-D298-06

Přístroj kontrole vyhověl a je bezpečný pro další použití.

Platnost kontroly do: 17.05.2009

V Brně dne 17.05.2007 .


Ing. Dušan Brzobohatý

Kontrolu provedl

MEDITECH®
s.r.o.
Svatopetrská 7, Lmo
DIČ: CZ60707992

J025314-000

Periodická bezpečnostní kontrola ARGUS 600

MEDITECH® s.r.o.
Prodej a servis lékařské techniky

Sériové číslo: 632 6 036

Příslušenství: SS

Nemocnice / Oddělení / Kontakt: FH - Olomouc, III. intern. kl. odd 39, Grossmannova

Tato kontrola musí být provedena každých 24 měsíců, nebo po 10.000 provozních hodinách.
Kontrolu smí provádět pouze autorizovaná osoba na základě uživatelského a servisního manuálu.

1	Vizuální kontrola poškození, čistoty, kompletnosti a kontrola elektrických vlastností	Kryty, štítky, konektory, příslušenství atd.		X
2	Zápis chybových hlášení	380 34 382 34 384 31 386 31 388 31		X
3	Zapněte přístroj při stisknutí tlačítka „MODE“	- na displeji se zobrazí verze software V:..... - postupně zobrazení 2, 4, 7, F na displeji a kontrolek ml total, ml inf., h.min - test zelených LED: šipka, síť, baterie, KVO - test červených LED (alarm): occlusion, near empty, empty, syringe, battery, ALARM		X
4	Držte stlačený spínač stříkačky a pohybujte páčkou držáku pistu (spodní) nahoru a dolů.	Alarm „SYRINGE“ bliká		X
5	Držte páčku držáku pistu (spodní) v horní poloze a aktivujte spínač stříkačky	Alarm „SYRINGE“ bliká		X
6	Držte stlačený spínač stříkačky a páčku držáku pistu (spodní) v horní poloze a pohybujte horní páčkou držáku pistu	Alarm „SYRINGE“ bliká		X
7	Kontrola funkce „plnění setu“ (stiskněte „BOLUS“ 2x během 1 sekundy)	Viz servisní manuál		X
8	Nastavte rychlost 111,1 ml/h a total objem 0,1 ml, stiskněte „START/STOP“	Po dosažení objemu alarm END, akustický a LED		X
9	Test pumpy při max. rychlosti (999,9 ml/h)	Kontrola tichého chodu		X
10	Kontrola tlakového alarmu: Stříkačka 50 ml: CODAN: ☐ Nastavená hodnota: 120	Jiná: 3D PLASTIPAK Změřená hodnota: 110		X
11	Kontrola přesnosti dávkování: Rychlost: 100 / 200 ml/h Total: 20ml	Změřeno: 101		X
12	Test baterie: nastavte rychlost 60 ml/h, odpojte pumpu od sítě a spusťte dávkování: Doba běhu: (jestliže není požadována doba běhu 2,5 hodiny, měňte baterie při t < 1,5 hodiny. Omezte znečištění životního prostředí)	- svítí zelená LED „battery“ - Předalarm baterie při t=2,25 hodiny (červená LED+akustický alarm) - Alarm baterie 15 minut po předalarmu (červená LED+ALARM+akustický alarm) - Po 6 minutách se pumpa vypne		X
13	Nabíjení baterie min. 16 hodin			X
14	Kontrola externích konektorů	- dálkový alarm - RS 232 / ext. napájení		X
15	Kontrola elektrické bezpečnosti dle EN 60601-1 s použitím standardního kabelu o délce 2,5 m.			X
16	Pumpa prošla bezpečnostní kontrolou a je bezpečná pro další použití			X

Spotřebovaný materiál: /

Poznámka: /

Datum: 10.5.07

Technik:

Podpis: 34

Ing. Dušan Brzobohatý