

MEDITECH, s.r.o.
Svatopetrská 7
617 00 Brno / ČR
Tel.: 545422911
Fax: 545422916
DIČ: CZ60707992
E-mail: servis@meditech.cz
zápis v OR: Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka 15318

MEDITECH®
s.r.o.
Prodej a servis lékařské techniky

Ujištění o kontrole č. 05/00511

Servisní středisko Meditech, s.r.o.

Organizace: FN-Olomouc
Zastoupená: paní Grossmanová *
Oddělení: III.interní klinika
I.P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
Telefon: 588 443 360
Vaše obj.: OND 15011

Typ: A-600
Sériové číslo: 864 6 048
Příslušenství: SŠ
Závada: Periodická prohlídka
Typ opravy: Kontrola s opravou

Datum převzetí: 15.03.2005

Na přístroji byla provedena periodická bezpečnostní kontrola dle Zákona č. 346/2003 Sb. v platném znění, včetně kontroly elektrické bezpečnosti dle ČSN 60 601-1 a souvisejících norem.

Servisní interval je 24 měsíců.

Použité přístroje:

Analyzátor infúzních zařízení BIO-TEK IDA-4, výrobní číslo 11351, kalibrováno výrobcem, kalibrační list č. 15030

Analyzátor elektrických zařízení SECUTEST SIII, výrobní číslo NC4090030001, kalibrováno výrobcem, kalibrační list č. NC4090030001

Elektromechanická váha KERN 440-53, výrobní číslo W943046, ověřeno firmou Váhoservis, kalibrační list č. 43/03

Deformační tlakoměr EMERS 0-250 kPa, výrobní číslo EL197205, ověřeno ČMI Brno, kalibrační list 613-KL-D282-03

Přístroj kontrole vyhověl a je bezpečný pro další použití.

Platnost kontroly do: 24.03.2007

V Brně dne 24.03.2005 .

ing. Dušan Brzobohatý

Kontrolu provedl

MEDITECH®
s.r.o.

Svatopetrská 7, Brno
DIČ: CZ60707992

Sériové číslo: 864 6 048

Příslušenství: SSV

Nemocnice / Oddělení / Kontakt: FN - Olom. III. ul. 39

Tato kontrola musí být provedena každých 24 měsíců, nebo po 10.000 provozních hodinách.
 Kontrolu smí provádět pouze autorizovaná osoba na základě uživatelského a servisního manuálu.

1	Vizuální kontrola poškození, čistoty, kompletnosti a kontrola elektrických vlastností	Kryty, štítky, konektory, příslušenství atd.	☒
2	Zápis chybových hlášení	380 31 382 31 384 31 386 31 388 31	☒
3	Zapněte přístroj při stisknutí tlačítka „MODE“	- na displeji se zobrazí verze software V:..... - postupné zobrazení 2, 4, 7, F na displeji a kontrolek ml total, ml inf., h.min - test zelených LED: šipka, síť, baterie, KVO - test červených LED (alarm): occlusion, near empty, empty, syringe, battery, ALARM	☒
4	Držte stlačený spínač stříkačky a pohybujte páčkou držáku pístu (spodní) nahoru a dolů.	Alarm „SYRINGE“ bliká	☒
5	Držte páčku držáku pístu (spodní) v horní poloze a aktivujte spínač stříkačky	Alarm „SYRINGE“ bliká	☒
6	Držte stlačený spínač stříkačky a páčku držáku pístu (spodní) v horní poloze a pohybujte horní páčkou držáku pístu	Alarm „SYRINGE“ bliká	☒
7	Kontrola funkce „plnění setu“ (stiskněte „BOLUS“ 2x během 1 sekundy)	Viz servisní manuál	☒
8	Nastavte rychlost 111,1 ml/h a total objem 0,1 ml, stiskněte „START/STOP“	Po dosažení objemu alarm END, akustický a LED	☒
9	Test pumpy při max. rychlosti (999,9 ml/h)	Kontrola tichého chodu	☒
10	Kontrola tlakového alarmu: Stříkačka 50 ml: CODAN:.....	Jiná: 32AUN OM71FIX	☒
	Nastavená hodnota: 100	Změřená hodnota: 95	☒
11	Kontrola přesnosti dávkování: Rychlost: 200 ml/h Total: 20ml	Změřeno: 20	☒
12	Test baterie: nastavte rychlost 60 ml/h, odpojte pumpu od sítě a spusťte dávkování: Doba běhu: (jestliže není požadována doba běhu 2,5 hodiny, měňte baterie při t < 1,5 hodiny. Omezíte znečištění životního prostředí)	- svítí zelená LED „battery“ - Předalarm baterie při t=2,25 hodiny (červená LED+akustický alarm) - Alarm baterie 15 minut po předalarmu (červená LED+ALARM+akustický alarm) - Po 6 minutách se pumpa vypne	☒
13	Nabíjení baterie min. 16 hodin		☒
14	Kontrola externích konektorů	- dálkový alarm - RS 232 / ext. napájení	☒
15	Kontrola elektrické bezpečnosti dle EN 60601-1 s použitím standardního kabelu o délce 2,5 m.		☒
16	Pumpa prošla bezpečnostní kontrolou a je bezpečná pro další použití		☒

12.032 BATERIE 11.001

Spotřebovaný materiál:

320-3 ✓

Poznámka:

Datum: 15.3.05

Technik:

Ing. Dušan Brzobohatý

Podpis:

