

MEDITECH, s.r.o.
Svatopetrská 7
617 00 Brno / ČR
Tel.: 545422911
Fax: 545422916
DIČ: CZ60707992
E-mail: servis@meditech.cz

zápis v OR: Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka 15318

MEDITECH® S.R.O.

Prodej a servis lékařské techniky

Ujištění o kontrole č. 07/00476

Servisní středisko Meditech, s.r.o.

Organizace: FN-Olomouc
Zastoupená: paní Marcela Kolářová
Oddělení: Dispečink servisu
I.P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
Telefon: 585 852 281
Vaše obj.: DIS0700375

Typ: A-600
Sériové číslo: 469 6 215
Příslušenství: SŠ
Závada: závada v síťové šňůře
Typ opravy: Pozáruční oprava

Datum převzetí: 28.03.2007

Na přístroji byla provedena periodická bezpečnostní kontrola dle Zákona č. 346/2003 Sb. v platném znění, včetně kontroly elektrické bezpečnosti dle ČSN 60 601-1 a souvisejících norem.

Servisní interval je 24 měsíců.

Použité přístroje:

Analýzátor infúzních zařízení BIO-TEK IDA-4, výrobní číslo 11351, kalibrováno výrobcem, kalibrační list č. 15030

Analýzátor elektrických zařízení SECUTEST SIII, výrobní číslo NC4090030001, kalibrováno výrobcem, kalibrační list č. NC4090030001

Elektromechanická váha KERN 440-53, výrobní číslo W943046, ověřeno firmou Váhoservis, kalibrační list č. 43/03

Deformační tlakoměr EMERS 0-250 kPa, výrobní číslo EL197205, ověřeno ČMI Brno, kalibrační list 613-KL-D282-03

Přístroj kontrole vyhověl a je bezpečný pro další použití.

Platnost kontroly do: 28.03.2009

V Brně dne 28.03.2007 .

Jaroslav Formánek

Kontrolu provedl

MEDITECH

Svatopetrská 7, Brno
DIČ: CZ60707992

dícká bezpečnostní kontrola ARGUS 600

MEDITECH® s.r.o.
Prodej a servis lékařské techniky

Sériové číslo: 469 6 215

Příslušenství: S5

Nemocnice / Oddělení / Kontakt: FN Olomouc, odbor hl. mechanika, p. Kolářová

Tato kontrola musí být provedena každých 24 měsíců, nebo po 10.000 provozních hodinách.
Kontrolu smí provádět pouze autorizovaná osoba na základě uživatelského a servisního manuálu.

1	Vizuální kontrola poškození, čistoty, kompletnosti a kontrola elektrických vlastností	Kryty, štítky, konektory, příslušenství atd.	☒
2	Zápis chybových hlášení	380 382 384 386 388	☒
3	Zapněte přístroj při stisknutí tlačítka „MODE“	- na displeji se zobrazí verze software V:....4.35 - postupné zobrazení 2, 4, 7, F na displeji a kontrolky ml total, ml inf., h.min - test zelených LED: šipka, síť, baterie, KVO - test červených LED (alarm): occlusion, near empty, empty, syringe, battery, ALARM	☒
4	Držte stlačený spínač stříkačky a pohybujte páčkou držáku pistu (spodní) nahoru a dolů.	Alarm „SYRINGE“ bliká	☒
5	Držte páčku držáku pistu (spodní) v horní poloze a aktivujte spínač stříkačky	Alarm „SYRINGE“ bliká	☒
6	Držte stlačený spínač stříkačky a páčku držáku pistu (spodní) v horní poloze a pohybujte horní páčkou držáku pistu	Alarm „SYRINGE“ bliká	☒
7	Kontrola funkce „plnění setu“ (stiskněte „BOLUS“ 2x během 1 sekundy)	Viz servisní manuál	☒
8	Nastavte rychlost 111,1 ml/h a total objem 0,1 ml, stiskněte „START/STOP“	Po dosažení objemu alarm END, akustický a LED	☒
9	Test pumpy při max. rychlosti (999,9 ml/h)	Kontrola tichého chodu	☒
10	Kontrola tlakového alarmu: Stříkačka 50 ml: CODAN: ☐	Jiná: <u>B-D Perfusion</u>	☒
	Nastavená hodnota: <u>120</u>	Změřená hodnota: <u>117,6</u>	☒
11	Kontrola přesnosti dávkování: Rychlost: 100 / 200 ml/h Total: 20ml	Změřeno: <u>33,97</u> /	☒
12	Test baterie: nastavte rychlost 60 ml/h, odpojte pumpu od sítě a spusťte dávkování: Doba běhu: (jestliže není požadována doba běhu 2,5 hodiny, měňte baterie při t<1,5 hodiny. Omezte znečištění životního prostředí)	- svítí zelená LED „battery“ - Předalarm baterie při t=2.25 hodiny (červená LED+akustický alarm) - Alarm baterie 15 minut po předalarmu (červená LED+ALARM+akustický alarm) - Po 6 minutách se pumpa vypne	☒
13	Nabíjení baterie min. 16 hodin		☒
14	Kontrola externích konektorů	- dálkový alarm - RS 232 / ext. napájení	☒
15	Kontrola elektrické bezpečnosti dle EN 60601-1 s použitím standardního kabelu o délce 2,5 m.		☒
16	Pumpa prošla bezpečnostní kontrolou a je bezpečná pro další použití		☒

Spotřebovaný materiál:

Poznámka: cenový návrh

závada síťové šňůry nejspíše neexistuje. Kalibrace tlaku, kontrola, test

Datum:
28. 03. 2007

Technik:
Jaroslav Formánek

Podpis:

(Signature)