

PERIODICKÁ BEZPEČNOSTNĚ-TECHNICKÁ KONTROLA INJEKČNÍ PUMPY GRASEBY 3xxx

Typ přístroje: inj.dávkoč Graseby 3100 II b	Výrobní číslo : 036531 Invent. číslo: I018083-000 ID:	Uživatel: Fakultní nemocnice Olomouc dispečink oprav I.P.Pavlova 6 77520 OLOMOUC Oddělení: III.Interna JIP
---	--	--

Bezpečnostně-technická prohlídka je prováděna v souladu s návodem k použití a servisním návodem.

Použity výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřicí přístroje.

Všechny naměřené hodnoty musí být dokumentovány. Přísluš. a dokumentace musí být uvedena ve zkušebním protokolu.

Prohlídka musí být prováděna každých:

12 měsíců

Zkušební příslušenství

Manometr CRESSTO DMU-R1000 v.č.2842/06 - Snímač byl porovnán s měřidlem CRESSTO s.r.o., ev.č. P262,
návaznost na etalon ČMI zajištěna prostřednictvím AKL ČEZ Dukovany(C245), REVEX R2051 v.č. 0401174 a RM 2050 v.č. 4030008
přístroj ke kontrole elektr. spotřeb. - kalibrační list č. R2051/1307 a RM2050/044/M, Měřicí přípravek 0131-0230 ,
Kalibrační přípravek 0 - 2,0 bar-CERTIFICATE OF CONFORMITY : CC-067000-Rév.2

Kontrola vizuální

Kontrolovat	Poznámky	Zjištěné závady	Potvrzení
Kryty, konektory, snímač typu stříkačky snímač založení pístu stříkačky, síť.kabel, čistota, značení, příslušenství			ano

Kontrola indikace

Operační a alarmové akustické indikátory			ano
--	--	--	-----

Test založení stříkačky

Kontrola uzavření palce	(8-10mm)		ano
Simulace a reakce na vyvoditelné alarmy			ano

Test snímače pístu stříkačky

Simulace a reakce na vyvoditelné alarmy			ano
---	--	--	-----

Test alarmu + indikace

Předzvěst konce dávky			ano
Konec dávky			
Okluzní tlak			
Stříkačka			
Akumulátor			

Test okluzního tlaku

Alarm occlusion	(60-75 kPa / 3,6-4,1 kg)		4,1 kPa / kg
-----------------	----------------------------	--	--------------

Test přesnosti dávky

Rychlost 99,9 ml/h - 6 min	(17,7-18,3mm)		1,7 mm
Test funkce bolus (dle modelu)	Graseby 3100		nemá

Test napájení

Indikace síť/akumulátor a předzvěst alarmu			ano
Kapacita akumulátoru			ano

Zkouška elektrické bezpečnosti dle ČSN EN 60601

Napájecí napětí:	230 V		
Unikající proud :	0,006 mA	Izolační odpor:	>20 MΩ

9. Výsledek kontroly

Zařízení je schopno bezpečného provozu:

ANO

Pokud NE - důvod:

Výše uvedený zdravotnický prostředek splňuje ustanovení §27, 28 a 52, zákona č.123/2000Sb.

Datum příští kontroly: 9/2009	Kontrolu provedl: R.Vejvoda Datum : 11.9.2008 Podpis : MARTIN BIČIŠTĚ - BIČELS Resslova 890 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 2 tel. 495 217 094, fax 495 217 191 DIČ CZ6404282192	Přístroj předán: Datum: 03/07 301 303 Fakultní nemocnice Olomouc I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc 588 441 111 III. interní klinika Jednotka intenzivní péče 1T7 Přednosta: Prof. MUDr. Vlastimil ŠCUDLA, CSc.
---	---	--