

PROTOKOL Č: 099/2005

o kontrole zdravotnických prostředků dle § 28 a § 52 zák. 123/2000 Sb.

VÝROBNÍ ČÍSLO 044 706	INFUZNÍ PUMPA	NEMOCNICE FN - Olomouc I.P.Pavlova 6 Olomouc
INSTALACE 7.7.1997	ARGOMED VP 5000	ODD. III. INTERNA JIP

Popis zkoušky	Povolení rozsah	Naměřené hodnoty
Stav skříně		DOBRÝ
Elektro bezpečnostní testy	Ri (MΩ) > 50, Rz (Ω) 0,1	Ri 504 Ω Rz 0,1 Ω Z01 4259421
Baterie/Dobíjecí proud		12V 1,7Ah / 52mA
Funční testy :	ALARM, ČERPADLO, DVÍŘKA, DISPLEJ	DOBRÉ
Spínače :	KAPKY, VZDUCH	DOBRÉ
Kalibrace :	± 5 % IS-125	30, 50, 100, 300, 600 ml/hod.
Výstupní tlak :	150 kPa - 250 kPa	ODPOVĚDA
Bezpečnostní tlak :	NASTAVENÍ 7-0	15 kPa
Stav mechanických dílů		DOBRÝ

Zařízení bylo podrobeno testu v délce 1(2)3 4 5 6 hodin Zak.list č.: 113/2005

Zkoušené zařízení odpovídá ~~neodpovídá~~ TP a vyhovuje ~~nevyhovuje~~ provozu

Měření provedeno dne: 16-12-2005

Termín další kontroly: 16.12.2007

Měření provedl: **SUCHOMEL Zdeněk**

protokol převzal:



TRANSKONTAKT s.r.o.
MEDICAL
Na Zatlance 5
150 00 PRAHA 5
kancelář: Starobrněnská 13
602 00 Brno

Fakultní nemocnice Olomouc
odbor hlavního mechanika
dispečink oprav
I.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC
tel.: 588 444 311 fax: 588 442 529

Handwritten signature