



Fresenius Medical Care

Bezpečnostně technická kontrola modulu ONLINE plus

Tuto kontrolu je třeba provést nejpozději po 12 měsících od poslední bezpečnostně technické kontroly autorizovaným servisem.

Spolu s touto kontrolou musí být provedena předepsaná bezpečnostně technická kontrola dialyzačního přístroje, jehož součástí je tento modul.

Provedení a výsledek kontroly musí být vyznačeno v provozní knize přístroje.

Výrobní číslo a typ přístroje : *OVCA 7410*

	procedura	teor. hodnota/ funkce	OK
1.	Vizuální kontrola		
1.1	štítky a symboly	musí být upevněné na přístroji musí být čitelné	<input checked="" type="checkbox"/>
1.2	fyzický stav	musí umožňovat bezpečný provoz	<input checked="" type="checkbox"/>
1.3	znečištění ohrožující bezpečnost	nepřípustné	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	Všeobecné kontroly		
2.1	provedení funkčního testu	stiskněte tlačítko Test	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	Kontrola ventilu V39 Pozn.: tento bod BTK se neprovádí, pokud je přepínač 5, LP 632, pole 2, nastaven na OFF	funkce	<input checked="" type="checkbox"/>
4.	set ve ventilu 193 (ONL1)	výměna	<input checked="" type="checkbox"/>
5.	hydrofobní filtry 111 a 184	výměna	<input checked="" type="checkbox"/>

doporučené datum příští bezpečnostně technické kontroly:

26.3.04

datum: *26.3.2003*

technik: Ing. Pavel Mikšík

FRESENIUS MEDICAL CARE
Česká republika spol. s r.o.
Lužná 591, 160 00 Praha 6
Tel.: 235 358 212, 235 358 220
DIČ: 006-45790884
TECHNICKÝ SERVIS