



člen Unie výrobců vah ČR

WESICO

E L E K T R O N I C K É V Á Ž N Í S Y S T É M Y

ZÁRUČNÍ LIST


ODBĚRATEL: Fakultní nemocnice Olomouc

DATUM: 29.10.2007

DODAVATEL: WESICO s.r.o., Zeiberlichova 3
644 00 Brno

TYP VÝROBKU	Počet ks
Nemocniční lůžko EUROPA s vestavěným vážicím systémem Wesico ZP 250	5

1. Na zařízení poskytuje dodavatel záruku v délce trvání 24 měsíců od data předání do provozu.
2. Na akumulátor, pokud je součástí dodávky, je poskytnuta záruka 6 měsíců.
3. Dodavatel nenese odpovědnost za neodborné nebo svévolné zásahy do funkčních částí váhy ze strany objednatele nebo třetích osob. Neodpovídá rovněž za vady způsobené nedodržením předaných návodů k obsluze a škody vzniklé jako následek působení vyšší moci.

WESICO, spol. s r.o.
Zeiberlichova 3
644 00 BRNO
Razítko, podpis

Dodavatel ručí za bezplatné odstranění nedostatků v případě, že závada je způsobena vadným materiálem nebo zpracováním. Záruka spočívá v opravě nebo výměně vadných dílů nebo v náhradní dodávce. Tato bezplatná záruka se nevztahuje na funkční poruchy nebo škody, které byly způsobeny nesprávným zacházením či zaviněným poškozením.

WESICO s.r.o., Zeiberlichova 3, 64400 Brno

Tel./fax +420 (5) 4121 6999
+420 (5) 4121 2598

Internet

<http://www.wesico.cz>
<http://www.elektronickevahy.cz>
info@wesico.cz
info@elektronickevahy.cz

E-mail

Bankovní spojení

KB a.s., pobočka Brno

c.ú.: 1463643-621/0100

D:\Záruční listy\Zar-M0322007 - Nemocnice Olomouc
postele.doc

ICO 44013051

DIC CZ44013051

Nemocniční lůžko EUROPA

Popis:

Čtyřsekční ložná plocha, polohování zádového a stehenního dílu pomocí elektropohonů, polohování lýtkového dílu pomocí rastrovatů. Ložná plocha je vyrobena z ocelových sítí.

Podvozek zvedací pomocí elektrického motoru, zdvih 40 – 80 cm. Kolečka o průměru 125 mm, centrální brzdový systém.

Povrchová úprava – práškový vypalovací lak.

Odnímatelná čela, výplň čel umakart.

Návod k použití:

Polohování ložné plochy lůžka a podvozku se provádí pomocí ručního ovladače, na kterém jsou vyobrazeny symboly jednotlivých segmentů, který chceme polohovat.

První tlačítko je na polohování zádového dílu, druhé tlačítko je na polohování zdvihu postele a třetí tlačítko je na polohování stehenního a souběžně s ním i lýtkového dílu. Lýtkový díl se dále polohuje 10 polohovými rastrovaty. Umožňují částečné nastavení kardiacké a šokové polohy. Při spuštění rastrovatu do nulové polohy je vždy nutné zvednout rastrovat do koncové polohy, která odblokuje jeho spuštění.

Centrální brzdový systém se ovládá v nohách postele vpravo nebo vlevo dvěma pákami. Na nich jsou zelené a červené symboly, které jasně znázorňují zabrzděnou a odbrzděnou polohu podvozku.

Desinfekce a čištění postele lze provádět běžnými desinfekčními a čistícími prostředky.

