

Martin Bičíště -BIČELS, Resslova 890, 500 02 Hradec Králové
 DIČ:CZ6404282192, IČO:15591051, Číslo účtu 21397/0300
 tel. 495 217 192 fax. 495 213 213

Ministerstvo zdravotnictví Č.j.: 6180A/02 - servis, os.pověř.

PERIODICKÁ BEZPEČNOSTNĚ-TECHNICKÁ KONTROLA INJEKČNÍ PUMPY LD 20

| | | |
|---|--|---|
| Typ přístroje: Dávkovače LD 20 II b | Výrobní číslo : 400874 Invent. číslo: D051043-000 ID: | Uživatel: Fakultní nemocnice Olomouc dispečink oprav I.P.Pavlova 6 77520 OLOMOUC Oddělení: I.Chirurgie.lůžka n.s.0411 |
|---|--|---|

Bezpečnostně-technická prohlídka je prováděna v souladu s návodem k použití a servisním návodem. Použity jsou výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřicí přístroje.Všechny naměřené hodnoty musí být dokumentovány. Přísluř. a dokumentace musí být uvedena ve zkušebním protokolu.

Prohlídka musí být prováděna každých:

12 měsíců

1. Zkušební příslušenství

Manometr CRESSTO DMU-R1000 v.č.2842/06 - Snímač byl porovnán s měřidlem CRESSTO s.r.o., ev.č. P262, návaznost na etalon ČMI zajištěna prostřednictvím AKL ČEZ Dukovany(C245)
 REVEX R2051 v.č. 0401174 a RM 2050 v.č. 4030008 přístroj ke kontrole elektr. spotřeb. - kalibrační list č. R2051/1307 a RM2050/044/M

2. Vnější kontrola

| Kontrolovat | Zjištěné nedostatky | Potvrzení |
|------------------------------------|---------------------|-----------|
| Kryt, nožičky, celkový vnější stav | | ano |
| Bateriové pouzdro | | ano |
| Značení | | ano |
| Držák stříkačky | | ano |
| Dokumentace | | ano |

3. Kontrola snímačů

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----|
| Snímač založení stříkačky | | ano |
| Senzor konce dávky | | ano |
| Snímač tlaku | tato verze nemá | - |

4. Funkční kontrola

| | | |
|---------------------------------|--|-----|
| Provozní test - posun stříkačky | | ano |
| Indikace - displej | | ano |
| Ovládání - tlačítka | | ano |
| Reakce na vyvoditelné alarmy | | ano |
| Optický/akustický signál | | ano |
| Umlčení alarmu | | ano |
| Přesnost dávky (odchylka <5%) | | ano |

5. Okluzní tlak

| | | |
|--|---------|-----|
| max. okluzní tlak - bez snímače (min. 150kPa) | 220 kPa | ano |
| limit okluzního tlaku - se snímačem (typ. 100 kPa) | kPa | |

6. Typ použité stříkačky

| | | |
|--|---------------|--|
| | Chirana 20 ml | |
|--|---------------|--|

7. Kontrola napájení

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-----|
| Síťový kabel | | ano |
| Signalizace výpadku napájení 230V | | ano |
| Kapacita baterií 6 x 1,5 V | bat. není záložní | ano |

8. Zkouška elektrické bezpečnosti dle ČSN EN 60601

| | | | | |
|-------------------|----------|--|-----|----|
| Napájecí napětí: | 230 V | Odpor ochr. vodiče vč.kabelu (<0,2Ω) : | - | Ω |
| Unikající proud : | 0.016 mA | Izolační odpor: | >20 | MΩ |

9. Výsledek kontroly

Zařízení je schopno bezpečného provozu: **ANO**
 Pokud NE - důvod:

Výše uvedený zdravotnický prostředek splňuje ustanovení §27, 28 a 52, zákona č.123/2000Sb.

| | | |
|--|---|---|
| Datum příští kontroly: 11/2008 | Kontrolu provedl: MARTIN BIČIŠTĚ - BIČELS Resslova 890 P.Man Datum: 21.11.2007 Podpis: tel. 495 217 094, fax 495 217 191 DIČ CZ6404282192 IČO 155 91 051 | Přístroj předán: Datum: 5.12.2007 Podpis: <i>[Podpis]</i> SHERDA |
|--|---|---|