

Martin Bičičště -BIČELS, Resslova 890, 500 02 Hradec Králové
 DIČ:CZ6404282192, IČO:15591051, Číslo účtu 21397/0300
 tel. 495 217 192 fax. 495 213 213

Ministerstvo zdravotnictví Č.j.: 6180A/02 - servis, os.pověř.

PERIODICKÁ BEZPEČNOSTNĚ-TECHNICKÁ KONTROLA INJEKČNÍ PUMPY LD 20

Typ přístroje: Dávkovače LD 20 II b	Výrobní číslo : 401255 Invent. číslo: ID:	Uživatel: Fakultní nemocnice Olomouc dispečink oprav I.P.Pavlova 6 77520 OLOMOUC Oddělení: I.chirurgická kl.lůžka
---	---	---

Bezpečnostně-technická prohlídka je prováděna v souladu s návodem k použití a servisním návodem. Použity jsou výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřicí přístroje. Všechny naměřené hodnoty musí být dokumentovány. Přísluší a dokumentace musí být uvedena ve zkušebním protokolu.

Prohlídka musí být prováděna každých:

12 měsíců

1. Zkušební příslušenství

Manometr CRESSTO DMU-R1000 v.č.2842/06 - Snímač byl porovnán s měřidlem CRESSTO s.r.o., ev.č. P262, návaznost na etalon ČMI zajištěna prostřednictvím AKL ČEZ Dukovany(C245)
 REVEX R2051 v.č. 0401174 a RM 2050 v.č. 4030008 přístroj ke kontrole elektr. spotřeb. - kalibrační list č. R2051/1307 a RM2050/044/M

2. Vnější kontrola

Kontrolovat	Zjištěné nedostatky	Potvrzení
Kryt, nožičky, celkový vnější stav		ano
Bateriové pouzdro		ano
Značení		ano
Držák stříkačky		ano
Dokumentace	nepředložena	-

3. Kontrola snímačů

Snímač založení stříkačky		ano
Senzor konce dávky		ano
Snímač tlaku	tato verze nemá	-

4. Funkční kontrola

Provozní test - posun stříkačky		ano
Indikace - displej		ano
Ovládání - tlačítka		ano
Reakce na vyvoditelné alarmy		ano
Optický/akustický signál		ano
Umlčení alarmu		ano
Přesnost dávky (odchylka <5%)		ano

5. Okluzní tlak

max. okluzní tlak - bez snímače (min. 150kPa)	210 kPa	ano
limit okluzního tlaku - se snímačem (typ. 100 kPa)	kPa	

6. Typ použité stříkačky

	Chirana 20 ml	
--	---------------	--

7. Kontrola napájení

Síťový kabel		ano
Signalizace výpadku napájení 230V		ano
Kapacita baterií 6 x 1,5 V	bat. není záložní	ano

8. Zkouška elektrické bezpečnosti dle CSN EN 60601

Napájecí napětí:	230 V	Odpor ochr. vodiče vč.kabelu (<0,2Ω) :	-	Ω
Unikající proud :	0.012 mA	Izolační odpor:	>20	MΩ

9. Výsledek kontroly

Zařízení je schopno bezpečného provozu: **ANO**
 Pokud NE - důvod:

Výše uvedený zdravotnický prostředek splňuje ustanovení §27, 28 a 52, zákona č.123/2000Sb.

Datum příští kontroly: 11/2008	Kontrolu provedl: MARTIN BIČIČŠŤE - BIČELS Resslova 890 P.Mar Datum: 22.11.2007 HRADEC KRÁLOVÉ 2 tel. 495 217 094, fax 495 217 191 DIČ CZ6404282192 IČO 155 91 051	Přístroj předán: Datum: 5. 12. 2008 Podpis: <i>[Signature]</i> SHERDA
--	---	---