

## Protokol o provedení periodické prohlídky

**Servisní prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídající požadavkům zákona 123/2000Sb. v platném znění**

<b>Zákazník</b>	FN OLOMOUC,	I. Chirurgická klinika, lůžka	
<b>Přístroj</b>	I.P.Pavlova 6, 775 20, Olomouc		
	EKG		
<b>Typ</b>	MAC 5000		
<b>Výrobní číslo</b>	M2MP0601P	<b>Inventární číslo</b>	IO20664-000

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené testy, zkoušky, měření.
x	<input type="checkbox"/>	<b>Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)</b>
x	<input type="checkbox"/>	Auto test po zapnutí
x	<input type="checkbox"/>	Test ovládacích tlačítek
x	<input type="checkbox"/>	Test EKG obvodů, zobrazení amplitudy a periody QRS
x	<input type="checkbox"/>	Test tiskárny
<b>Bezpečnostní test – měření</b>		

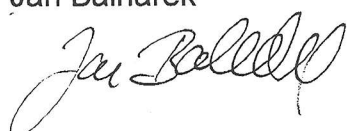
Měřená veličina	Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,09 mA max. 0,5 mA
	Příložná část	0,004 mA max. 0,05 mA
Izolační odpor	>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče	0,06 Ω	max 0,2 Ω

Výsledek prohlídky (závěr) :

Parametry přístroje odpovídají – ~~neodpovídají~~ hodnotám předepsaným výrobcem. Zkontrolovaný přístroj je – ~~není~~ plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče.

Použité měřicí přístroje:

Meditest 50 v.č. 990 187	
--------------------------	--

Technik : Jan Balhárek      Provedeno dne : 22.7.2008  
 Podpis :       Datum příští kontroly : Po jednom roce