

ZDRAVO s.r.o. – autorizovaný servis

Registrace dle § 31 zák.č.123/2000 Sb.,na Ministerstvu zdravotnictví – Č.j.-Reg.č.: 18577/01 a 18579/01

FRANKE

Periodická bezpečnostně-technická kontrola REVIZNÍ PROTOKOL 80-07-307	Inventární číslo IO 020099
Přezkoušel: Ing. Josef Kovář Číslo oprávnění: 12437/9/06/EZ-M,O,R,ZE2/-B	Výrobní číslo: 01461180.CZ07 Výrobce: FRANKE FINLAND OY Druh přístroje: Automat. desinfekční přístroj Přístroj-typ: DEKO 190 E Rok výroby: 2001
Uživatel/vlastník: FN Olomouc- II.chir.kl.odd.38	
Zkušební předpis: VDE 0750 ☐ VDE 0751/IEC 60601-1 ☒ Revize provedena: nařízením zák.č.123/2000 Sb. ☒ po opravě ☐	
Výsledek zkoušky: ☒ 1. Měřené hodnoty – zadní strana zkušebního protokolu. a/ příloha BENDER – Unimet 1000 ST verze: 3.71-výr.č.: 0008053368, kalibr.protokol: 631 / 2006 b/ SCOPEMETER FLUKE 99,výr.č.:DM 6180498,kalibr.protokol : 623 / 2006 ☐ 2. Zjištěné závadné body: ☐ 3. Závady nenarušující bezpečnost – přístroj může být používán. ☐ 4. Přístroj může být používán po odstranění výše uvedených závad. ☐ 5. Závady vyžadují opravu před dalším použitím přístroje, protože jinak by mohli být ohroženi pacienti, zaměstnanci nebo třetí osoby. ☒ 6. ZP je bezpečný a funkční, vyhovuje ustanovení §52 odst.3, pro ZP klas.tř. I a IIa. ☐ 7. ZP vyhovuje technickým předpisům výrobce a splňuje požadavek dle §52 odst.4,5 a 6, pro ZP klas.tř. IIb. a III. ☒ 8. Zařízení je z pohledu bezpečnosti, schopné bezpečného provozu	
Datum: 19.10.2007	Podpis:  Příští prohlídka připadá na: 10.2008

Revizní protokol: 80-07-307 Typ přístroje: DEKO 190E Výrobní číslo: 01461180CZ07

	je v pořádku	není v pořádku	odpadá kontr.	poznámky
1. typový štítek	X			
2. návod k použití	X			
3. popis přístroje	X			
4. mycí komora	X			
5. těsnění dveří	X			
6. rotační sprchy	X			
7. pevné trysky	X			
8. filtr odpadu	X			
9. instalace a ovládání	X			
10. zámek dveří	X			
11. čerpadlo na detergent				
12. přídavné čerpadlo na detergenty				
13. sifonový ventil	X			
14. elektro. ventily studené, teplé a destil. vody	X			
15. vzduchový ventil systému	X			
16. oběhové čerpadlo (zvuk. projev)	X			
17. kalové filtry	X			
18. netěsnost	X			
19. Elektrické funkce	X			
20. el. přívody, rozvody	X			
21. cykly programu	X			
22. opláchnutí studenou vodou	X			
23. opláchnutí teplou vodou	X			
24. mytí – krátké/dlouhé-teplou vodou	X			
25. desinfekce-T=90-93°C	X			
26. konečný oplach stud./destilovanou vodou	X			
27. vyprázdnění komory	X			
28. ☒ jednotlivá měření				
a/ příloha BENDER – Unimet 1000 ST verze: 3.71				
ser.č.:0008053368				
☐ graf				

Bez
chem./mech.indikace

Poznámky:

Elektrické měření: přezkoušení dle normy DIN IEC 60601-1 nebo VDE 0751

29. izolační odpor sítě proti obalu
30. izolační odpor používané části
31. měření odporu ochranného vedení
32. nízkofrekvenční odváděný proud – normální případ
33. nízkofrekvenční odváděný proud – 1. chybný případ
34. odváděný proud obalu – normální případ
35. odváděný proud obalu – 1. chyba ochranného vodiče
36. odváděný proud obalu – 1. chyba sítě
37. odváděný proud pacienta – normální případ
38. odváděný proud pacienta – ojedinělá chyba ochranného vodiče
39. odváděný proud pacienta – ojedinělá chyba sítě
40. pomocný proud pacienta – normální případ
41. pomocný proud pacienta – 1. chyba ochranného vodiče
42. pomocný proud pacienta – 1. chyba sítě
43. odváděný proud pacientem – vers. paralel. U na používané části
44. dto – odváděný proud pacientem – fázově zaměřeno

MΩ
MΩ
Ω
μA
μA
μA
μA
μA
μA
μA
μA
μA
μA
μA
μA
μA
μAa/ příloha
BENDER – Unimet
1000 ST verze: 3.71
ser.č.:0008053368

Přístroj ke kontrole do: 10-2008

kým: FN Olomouc- II.chir.kl.odd.38

