

# Kontrola prostředku zdravotnické techniky kontrola č.: 2006/1650

Zákazník

Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 6

775 Olomouc

IČO 00098892

Kontaktní osoba paní Ludvíková Ivana

Objednávka zákazníka: DO 8834

Ref.číslo dodavatele: 20060269

Periodická kontrola PZT dle

zák. č.346/2003 Sb. § 28

Ověření stavu PZT dle

zák. č. 346/2003 Sb. § 52

**Oxymetr pulzní**

typ **BCI 3301**

výr.číslo **270294153**

výrobce **BCI-USA**

rok uvedení **1997**

inv.číslo **DO27657**

elektrobezp. baterie

třída PZT II b v provozu **NCH odd 36A**

**FN-14-08**

**Záznam o provedených kontrolách a měření**

pracovní postup: **PP BCI 3301**

1. Kontrola označení

2. Kontrola dokumentace

3. Kontrola vizuální

4. Kontrola zdroje a baterií

5. Kontrola nastavení a kalibrace

6. Kontrola příslušenství

Model Výrobní číslo Stav%

kalibrační

## Kontrola funkčnosti

8b) SpO2 modul

Tester SS-100A v.č.SS039516

3420\_Onyx-DL3000vč.8K011

Simulace		Alarmy		
SpO2	p/min	SpO2	p/m	
50+-2	80+-2	L	-	<input checked="" type="checkbox"/>
85+-2	80+-2	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
100-2	80+-2	H	-	<input checked="" type="checkbox"/>
98+-2	35+-1	H	L	<input checked="" type="checkbox"/>
98+-2	250+-5	H	H	<input checked="" type="checkbox"/>

Alarmy

Optická signalizace

Zvuková signalizace

9. Zhodnocení stavu PZT, doporučení, varování, závěr a termíny následných kontrol

*PZT nevykazuje zjevné závady a kontrolní testy proběhly bez závad*

**Kontrolovaný PZT splňuje požadavky podle §28 zák.346/2003 Sb.**

Ověřit dle §52 do:

Kontrola dle §28 do: 15.1.2008 Hipot test do:

Kontrolu provedl

Kontrolu schválil

13.12.2006 Ivo Augsten

5.1.2007 Ing. Pavel Kabrle

Dokument je podepsán elektronicky řízeným způsobem.