

Protokol bezpečnostně technické kontroly – každých 24 měsícůPřístroj: **SpaceStation, SpaceStation se SpaceCom
SpaceCover comfort / standard**

Výrobce: B.Braun Melsungen AG

Postupujte v souladu se servisním manuálem a návodem k použití. Používejte výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřidla. Všechny naměřené hodnoty musí být dokumentovány. Příslušenství a jeho doprovodná dokumentace musí být uvedena ve zkušebním protokolu.

Objednací číslo:	Sériové číslo:	Uvedení do provozu:	Provozovatel
84 13 140	01532	6/2005	FLI Olomouc
34 13 147	0168	6/2005	HCH JIP

Vizuální kontrola	Elektrická bezpečnost v návaznosti na IEC / EN 60601-1 resp. VDE 0750 a 0751	Kontrola funkce
☒ Čistota, kompletnost, nepoškozený stav, čitelnost nápisů ☒ Závěsy pump ☒ Lehký chod a těsnění upínacích mechanismů ☒ Datové a napájecí konektory SpaceCom** ☒ Síťový kabel, zástrčka, zásuvka	☒ Síťové napětí <u>220</u> V~ (AC) ☒ Odpor ochranného vodiče: Přístroj vč. síťového kabelu k výstupu síťového napětí F1B: < 0,2 Ω <u>0,06</u> Ω ☒ Uzemňovací proud u NC vč. síťového přívodu ≤ 30 μA <u>10</u> μA ☒ Uzemňovací proud u SFC vč. síťového přívodu ≤ 60 μA <u>< 60</u> μA ☒ Unikající proud na skříni SpaceCom kovový límeč Ethernet RJ45 ≤ 25 μA bez SL** <u>...</u> μA Použité příslušenství ☒ <u> </u> ☒ <u> </u> ☒ <u> </u>	Zapnout přístroj ☒ Start call ☒ Kontrolní signalizace SpaceCover comfort ☒ Zvukový alarm SpaceCover comfort ☒ Kontrolní signalizace SpaceCom** ☒ Kontrola funkce podle návodu k použití v závislosti na konkrétní konfiguraci Ve spojení s: ☒ Perfusor® Space Sériové č. <u>6544</u> ☒ Infusomat® Space Sériové číslo <u>30951</u> ☒ <u> </u> ☒ <u> </u>

* = měření s a bez příslušenství ** = varianta

Výsledek zkoušky:

Byly zjištěny závady, které mohou způsobit ohrožení pacientů, personálu nebo třetích osob

☒ ANO☒ NE

Opatření, která je třeba provést


☒ oprava☐ NE

Zvláštnosti / dokumentace:

Kontrolu provedl:	<u>Tománek</u>
Předání přístroje dne:	<u>16.3.2007</u>
Komu:	<u>ss. Dobesova</u>
Datum / podpis:	<u>[podpis]</u>
Termín další bezpečnostní technické kontroly:	<u>3/2009</u>

Poznámka:

Ev.č. I 011 797-001

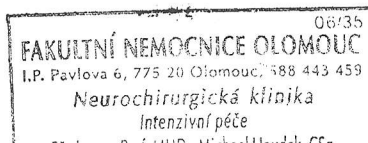

11
IČ: 485 86 285
DIČ: CZ48586285

B/BRAUNB. Braun Medical s.r.o.
Servisní centrum

HOTLINE

Tel. +420-271 091 555

Fax +420-271 091 552