

Protokol bezpečnostně technické kontroly – každých 24 měsíců

Přístroj: **SpaceStation, SpaceStation se SpaceCom
SpaceCover comfort / standard**

Výrobce: B.Braun Melsungen AG

Postupujte v souladu se servisním manuálem a návodem k použití. Používejte výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřidla. Všechny naměřené hodnoty musí být dokumentovány. Příslušenství a jeho doprovodná dokumentace musí být uvedena ve zkušebním protokolu.

Objednací číslo: 84 13 140 84 13 144	Sériové číslo: 03434 0136	Uvedení do provozu: 6/2005 6/2005	Provozovatel
---	--	--	---------------------

Vizuální kontrola	Elektrická bezpečnost v návaznosti na IEC / EN 60601-1 resp. VDE 0750 a 0751	Kontrola funkce
☒ Čistota, kompletnost, nepoškozený stav, čitelnost nápisů ☒ Závěsy pump ☒ Lehký chod a těsnění upínacích mechanismů ☒ Datové a napájecí konektory SpaceCom** ☒ Síťový kabel, zástrčka, zásuvka	☒ Síťové napětí 228 V~ (AC) ☒ Odpor ochranného vodiče: Přístroj vč. síťového kabelu k výstupu síťového napětí F1B: < 0,2 Ω 0,04 Ω ☒ Uzemňovací proud u NC vč. síťového přívodu ≤ 30 μA 20 μA ☒ Uzemňovací proud u SFC vč. síťového přívodu ≤ 60 μA 200 μA ☒ Unikající proud na skřini SpaceCom kovový límeček Ethernet RJ45 ≤ 25 μA bez SL** ... μA Použité příslušenství ☒ _____ ☒ _____ ☒ _____	Zapnout přístroj ☒ Start call ☒ Kontrolní signalizace SpaceCover comfort ☒ Zvukový alarm SpaceCover comfort ☒ Kontrolní signalizace SpaceCom** ☒ Kontrola funkce podle návodu k použití v závislosti na konkrétní konfiguraci Ve spojení s: ☒ Perfusor® Space Sériové č. 6544 ☒ Infusomat® Space Sériové číslo 3952 ☒ _____ ☒ _____

* = měření s a bez příslušenství ** = varianta

Výsledek zkoušky:

Byly zjištěny závady, které mohou způsobit ohrožení pacientů, personálu nebo třetích osob

☒ ANO ☒ NE

Opatření, která je třeba provést


☒ oprava ☐ NE

Zvláštnosti / dokumentace:

Kontrolu provedl: Tománek
Předání přístroje dne: 16.3.2007
Komu: ss Dobrošova
Datum / podpis: DH
Termín další bezp.- technické kontroly: 3/2009

Poznámka:

Ev. č. I 011800-001

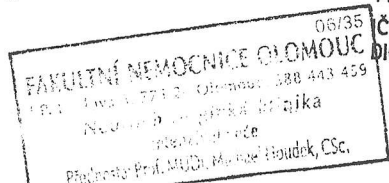

11
Č: 485 86 285
DIČ: CZ48586285

B/BRAUN

B. Braun Medical s.r.o.
Servisní centrum
HOTLINE
Tel. +420-271 091 555
Fax +420-271 091 552