

Protokol bezpečnostně technické kontroly – každých 24 měsícůPřístroj: **SpaceStation, SpaceStation se SpaceCom
SpaceCover comfort / standard**

Výrobce: B.Braun Melsungen AG

Postupujte v souladu se servisním manuálem a návodem k použití. Používejte výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřidla. Všechny naměřené hodnoty musí být dokumentovány. Příslušenství a jeho doprovodná dokumentace musí být uvedena ve zkušebním protokolu.

Objednací číslo:	Sériové číslo:	Uvedení do provozu:	Provozovatel
84 13 140	34 12	6/2005	FN Olomouc
84 13 147	0391	6/2005	LICH JIP

Vizuální kontrola	Elektrická bezpečnost v návaznosti na IEC / EN 60601-1 resp. VDE 0750 a 0751	Kontrola funkce
☒ Čistota, kompletnost, nepoškozený stav, čitelnost nápisů ☒ Závěsy pump ☒ Lehký chod a těsnění upínacích mechanismů ☒ Datové a napájecí konektory SpaceCom** ☒ Síťový kabel, zástrčka, zásuvka	☒ Síťové napětí <u>220</u> V~ (AC) ☒ Odpor ochranného vodiče: Přístroj vč. síťového kabelu k výstupu síťového napětí F1B: $< 0,2 \Omega$ <u>0,13</u> Ω ☒ Uzemňovací proud u NC vč. síťového přívodu $\leq 30 \mu A$ <u>20</u> μA ☒ Uzemňovací proud u SFC vč. síťového přívodu $\leq 60 \mu A$ <u>60</u> μA ☒ Unikající proud na skříni SpaceCom kovový límeč Ethernet RJ45 $\leq 25 \mu A$ bez SL** <u>...</u> μA Použité příslušenství ☒ <u> </u> ☒ <u> </u> ☒ <u> </u>	Zapnout přístroj ☒ Start call ☒ Kontrolní signalizace SpaceCover comfort ☒ Zvukový alarm SpaceCover comfort ☒ Kontrolní signalizace SpaceCom** ☒ Kontrola funkce podle návodu k použití v závislosti na konkrétní konfiguraci Ve spojení s: ☒ Perfusor® Space Sériové č. <u>6544</u> ☒ Infusomat® Space Sériové číslo <u>3952</u> ☒ <u> </u> ☒ <u> </u>

* = měření s a bez příslušenství ** = varianta

Výsledek zkoušky:

Byly zjištěny závady, které mohou způsobit ohrožení pacientů, personálu nebo třetích osob

☒ ANO☒ NE

Opatření, která je třeba provést

☒ oprava☐NE

Zvláštnosti / dokumentace:

Kontrolu provedl:	<u>Tomáš</u>
Předání přístroje dne:	<u>16.3.2007</u>
Komu:	<u>B.S. Dobesova</u>
Datum / podpis:	<u> </u>
Termín další/bezp.-technické kontroly:	<u>3/2009</u>

Poznámka:

Ev. č. I 021 802-001

06/35
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
UL. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 588 443 459
Neurochirurgická klinika
Intenzivní péče

B/BRAUN

11

IČ: 485 86 285
DIČ: CZ48586285B. Braun Medical s.r.o.
Servisní centrum

HOTLINE

Tel. +420-271 091 555
Fax +420-271 091 552