

*pridal na
kliniku*

 POLYMED medicná technika, s.r.o.	PROTOKOL O BEZPEČNOSTNÍ TECHNICKÉ PROHLÍDCE	č.
---	--	----

dle § 20 zák. 123/2000 Sb

ID	INJEKČNÍ PUMPA TYPU:	1D 20/50 TV
	VÝROBNÍ ČÍSLO:	100 608

	KONTROLA	SPECIFIKACE	VÝSLEDEK, HODNOCENÍ
VIZUÁLNÍ KONTROLA	KRYT	POŠKOZENÍ, VLAS. TRHLINY	OK
	DRŽÁK, SVĚRKA	POŠKOZENÍ, ZÁVITY	—
	SIGNALIZAČNÍ PRVKY	PŘILEPENÍ, ČITELNOST, POŠKOZENÍ	OK
	OVLÁDACÍ KNOFLÍKY	FUNKCE	OK
	SÍŤOVÝ PŘÍVOD	POŠKOZENÍ	OK
FUNKCE	TEST PŘI ZAPNUTÍ RYCHLOPOSUVU	16 x BLIKNUTÍ, ZŮSTANE SVÍTIT	OK
	KONTROLA INDIKACÍ	POLOHA 0,0 ml / h	OK
	PROVOZ NA AKUMULÁTOR	BLIKÁ INDIKACE BATERIE	OK
	PROVOZ NA VNĚJŠÍ SS ZDROJ	SVÍTÍ INDIKACE EXTERNÍ NAPÁJENÍ	OK
	KONTROLA KONCE DÁVEK	SIGNALIZACE PŘEDZVĚSTI 1-2ml + KONEC DÁVKY, MÉNĚ NEŽ 1ml	OK
RYCHLOST DÁVKOVÁNÍ	STRÍKAČKA TYP: 20ml/50ml	RYCHLOST 5 ml / h A POL. 1X ODCHYLKA MAX ± 4%	5,02/5,01
	STRÍKAČKA TYP: 20ml/50ml	RYCHLOST 50 ml / h ODCHYLKA MAX ± 4%	50,24/57,28
OKLUZNÍ TLAK	STRÍKAČKA TYP: 20ml	HODNOTY PŘI 10 ml / h (tn 60kPa ± 20, tv 120 kPa ± 20)	123 kPa
	STRÍKAČKA TYP: 50ml	HODNOTY PŘI 10 ml / h (tn 60kPa ± 20, tv 120 kPa ± 20)	123 kPa
ELEKTROČÁST	KONTROLA EL. PEVNOSTI (SÍŤOVÝ PŘÍVOD - KOVOVÁ KOSTRA	PŘI 4000V	OK
	KONTROLA UNIKAJÍCÍHO PROUDU KRYTEM	≤ 100μA	6,1 μA
	KONTROLA KAPACITY A STAVU AKUMULÁTORU	PŘI 10 ml / h - min. 5h PROVOZU	6 hod

VÝSLEDEK TESTU:	OK
-----------------	----

NÁVRH ŘEŠENÍ PŘI NEGATIVNÍM VÝSLEDKU TESTU
--

DATUM KONTOLY: 14/7/04

KONTROLOVAL: *Nova*