

 POLYMED medicínská technika, s.r.o.		PROTOKOL O BEZPEČNOSTNÍ TECHNICKÉ PROHLÍDCE		Č.
dle § 27, § 28 a § 52 zákona č. 123/2000 Sb. ve znění pozdějších změn				
ID	INJEKČNÍ PUMPA TYPU:		ID 20150	
	VÝROBNÍ ČÍSLO:		100617	
	KONTROLA	SPECIFIKACE	VÝSLEDEK, HODNOCENÍ	
VIZUÁLNÍ KONTROLA	KRYT	POŠKOZENÍ, VLAS. TRHLINY	OK	
	DRŽÁK, SVĚRKA	POŠKOZENÍ, ZÁVITY	-	
	SIGNALIZAČNÍ PRVKY	PŘILEPENÍ, ČITELNOST, POŠKOZENÍ	OK	
	OVLÁDACÍ KNOFLÍKY	FUNKCE	OK	
	SÍŤOVÝ PŘÍVOD	POŠKOZENÍ	OK	
FUNKCE	TEST PŘI ZAPNUTÍ RYCHLOPOSUVU	16 x BLIKNUTÍ, ZŮSTANE SVÍTIT	OK	
	KONTROLA INDIKACÍ	POLOHA 0,0 ml / h	OK	
	PROVOZ NA AKUMULÁTOR	BLIKÁ INDIKACE BATERIE	OK	
	PROVOZ NA VNĚJŠÍ SS ZDROJ	SVÍTÍ INDIKACE EXTERNÍ NAPÁJENÍ	OK	
	KONTROLA KONCE DÁVEK	SIGNALIZACE PŘEDZVĚSTI 1-2ml + KONEC DÁVKY, MĚNĚ NEŽ 1ml	OK	
RYCHLOST DÁVKOVÁNÍ	STRÍKAČKA TYP: 20ml	RYCHLOST 9 ml / h, POLOHA 1X ODCHYLKA MAX ± 4%	+ 0,5%	
	STRÍKAČKA TYP: 50ml	RYCHLOST 60 ml / h ODCHYLKA MAX ± 4%	+ 1%	
OKLUZNÍ TLAK	STRÍKAČKA TYP: 20ml	TLAK PŘI 90 ml / h (tn 60kPa ± 20, tv 120 kPa ± 20)	113 kPa	
	STRÍKAČKA TYP: 50ml	TLAK PŘI 90 ml / h (tn 60kPa ± 20, tv 120 kPa ± 20)	110 kPa	
ELEKTROČÁST	KONTROLA EL. PEVNOSTI (SÍŤOVÝ PŘÍVOD - KOVOVÁ KOSTRA)	PŘI 4000V	OK	
	KONTROLA UNIKAJÍCÍHO PROUDU KRYTEM	≤ 100μA	1,14 μA	
	KONTROLA KAPACITY A STAVU AKUMULÁTORU	PŘI 10 ml / h - min. 5h PROVOZU	OK	
VÝSLEDEK KONTROLY:			Vyhovuje	
Tento přístroj odpovídá technickým podmínkám výrobce a je možné jej dále používat ve zdravotnictví v péči o pacienta. DALŠÍ KONTROLU JE NUTNO PROVÉST NEJPOZDĚJI DO: 04. 2007				

DATUM KONTROLY: 28. 04. 2005

KONTROLOVAL: Broukal Břislav

TYP D

POLYMED medicínská technika s.r.o.

VIII-05.4-Z

P. Jilemnického 197

tel./fax: 495 211 387

503 01 Hradec Králové 16

