

Periodická kontrola a prověření ZP

podle zákona 123/2000 sb., §52:

Výrobce B.Braun Melsungen AG

B | BRAUN

Perfusor compact

Obj. číslo přístroje: 8714827

Výrobní číslo přístroje: 75066

Středisko: NCH Jiř

Prohlídka musí být prováděna pravidelně každých 24 měsíců. Periodickou prohlídku provádějte v souladu s návodem k použití a servisním návodem. Používejte výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřicí přístroje. Všechny naměřené hodnoty musí být dokumentovány. Příslušenství a jeho doprovodná dokumentace musí být uvedena ve zkušebním protokolu.

Kontrolovat		Zjištěné nedostatky		Potvrz.
1. Vizualní prohlídka (čistota, kompletnost, poškození)				
1.1	Uchycení stříkačky (držák, axiální uchycení, páčka a západka pohonu, senzor založení stříkačky)			☒
1.2	Klávesnice			☒
1.3	Síťová zásuvka a kabel			☒
1.4	Multifunkční konektor MFC a kabel			☒
1.5	Baterie / akumulátor, kontakty			☒
1.6	Nožičky			☒
1.7	Svorka na stojan, západka svorky			☒
2. Funkční zkouška				
2.1	Zapněte přístroj Porovnejte průběh testu LCD s návodem Zkontrolujte zvukový signál Porovnejte zadanou rychlost s displejem			☒
2.2	Prověřte funkci přivolání obsluhy (pomocí MFC) Pozn.: může být nastaveno a) statická signalizace b) dyn. signalizace s aktivací rozeznání smyčky c) dyn. signalizace bez aktivace rozeznání smyčky			☒
2.3	Přepněte přístroj do aku/bat. režimu a sledujte průběh testu Pozn.: při vybitém akumulátoru/baterii ji vyměňte a zopakujte test			☒
2.4	Prověřte signalizaci displeje „000b“ resp. „000a“ s aku			☒
2.5	Tlačítko umlčení alarmu			☒
2.6	Senzor založení pístu stříkačky			☒
3.0	Okluzní tlaky (alternativně jednou z metod)	manometr +střík. 50 ml přípravek 770161/6	1(<0,6bar) 2(<0,9bar) 3(<1,2bar)	☐
4.0	Volba stříkačky	OPS ☒ interní ☐ Eeprom ☐		XXX
4.1	Přepínání stříkaček 20 / 50 ml	Výrobce použ. stříkaček 20 ml Omnix 20 B Braun 50 ml OPS 50 B Braun	Souhlasí s nastavením 22 50	☒ ☒ ☒
4.2	Čitelnost tabulky stříkaček			☒
5.0 Zkouška elektrické bezpečnosti podle ČSN EN 60601 měřeno přístrojem Meditest 50 v.č. 200298				
	Síťové napětí 225 V	Odpor ochranného vodiče vč. kabelu (<0,2 Ohm) 0,1 Ohm	Unikající proud (<10 µA) 1 µA	☒
6.0	Dokumentace přístroje: • návod k obsluze • provozní kniha • bezpečnostní prohlídky • evidence oprav			☐ ☐ ☐ ☐
7.0	Příslušenství (MFC, kabel napájení 12 V, kabel přivolání obsluhy)			☐
8.0	Speciální nastavení: Omezení rychl. dávkování: 99.9 ml/h. Omezení rychl. dávkování bolusu: 800 ml/h.			
Výsledek prohlídky: Byly zjištěny nedostatky, které mohou způsobit ohrožení pacienta, obsluhy nebo okolí. ☐ ANO ☒ NE				
Zdravotnický prostředek splňuje požadavky uvedené výše a vyhovuje technickým předpisům, popř. technickým dokumentům, technickým normám, podle nichž byl vyroben.				
Doporučená opatření:				
Datum příští prohlídky: 03. 2007	Prohlídku provedl: datum: 7. 3. 2005 podpis: Bičánek	Přístroj předán: datum: podpis: Došeňová Hana		

B | BRAUN

Tel. +420 558 304 420
Fax: +420 558 338 322
Mob.: +420 724 104 909

B. Braun Medical s.r.o.
servisní středisko
HDS EuroCare s.r.o.
Konská 543
739 61 Třinec

Záznam o provedené kontrole uložte u provozní dokumentace přístroje

FN OLOMOUC
Neurologická klinika
Přednosta: MUDr. J. J. J.
Prof. MUDr. J. J. J.