

Periodická kontrola a prověření ZP

podle zákona 123/2000 sb., §28:

Výrobce B.Braun Melsungen AG

B | BRAUN

Perfusor compact

Obj. číslo přístroje: 8714827 Výrobní číslo přístroje: 75 103 Středisko: NEUROLOG JIP Inventurní číslo: D0504C1-000
Prohlídka musí být prováděna pravidelně každých 24 měsíců. Periodickou prohlídku provádějte v souladu s návodem k použití a servisním návodem. Používejte výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřicí přístroje. Všechny naměřené hodnoty musí být dokumentovány. Příslušenství a jeho doprovodná dokumentace musí být uvedena ve zkušební protokolů.

Kontrolovat		Zjištěné nedostatky		Potvrz.
1. Vizuální prohlídka (čistota, kompletnost, poškození)				
1.1	Uchycení stříkačky (držák, axiální uchycení, páčka a západka pohonu, senzor založení stříkačky)			☒
1.2	Klávesnice			☒
1.3	Síťová zásuvka a kabel			☒
1.4	Multifunkční kojektor MFC a kabel			☒
1.5	Baterie / akumulátor, kontakty			☒
1.6	Nožičky			☒
1.7	Svorka na stojan, západka svorky			☒
2. Funkční zkouška				
2.1	Zapněte přístroj Porovnejte průběh testu LCD s návodem Zkontrolujte zvukový signál Porovnejte zadanou rychlost s displejem			☒
2.2	Prověřte funkci přivolání obsluhy (pomocí MFC) Pozn.: může být nastaveno a) statická signalizace b) dyn. signalizace s aktivací rozepnutí smyčky c) dyn. signalizace bez aktivace rozepnutí smyčky			☒
2.3	Přepněte přístroj do aku/bat. režimu a sledujte průběh testu Pozn.: při vybitém akumulátoru/baterii ji vyměňte a zopakujte test			☒
2.4	Prověřte signalizaci displeje „000b“ resp. „000a“ s aku			☒
2.5	Tlačítko umlčení alarmu			☒
2.6	Senzor založení pistu stříkačky			☒
3.0	Okluzní tlaky (alternativně jednou z metod)	manometr +střík. 50 ml Kalibrační léra v.č CO 7712 770161/6	1(<0,6bar) 2(<0,9bar) 3(<1,2bar)	☐
4.0	Volba stříkačky	OPS ☒ interní ☐ Eeprom ☒		XXX
4.1	Přepínání stříkaček 20 / 50 ml	Výrobce použ. stříkaček 20 ml Omnifix 20 B Braun 50 ml OPS 50 B Braun	Souhlasí s nastavením 20 50	☒
4.2	Čitelnost tabulky stříkaček			☒
5.0	Zkouška elektrické bezpečnosti podle ČSN EN 60601 Měřeno přístrojem Meditest 50 v.č.200298			
	Síťové napětí 230 V	Odpor ochranného vodiče vč. kabelu (<0,2 Ohm) 0,16 Ohm	Unikající proud (<10 µA) 2 µA	☒
6.0	Dokumentace přístroje: • návod k obsluze • provozní kniha • bezpečnostní prohlídka • evidence oprav			☐ ☐ ☒ ☐
7.0	Příslušenství (MFC, kabel napájení 12 V, kabel přivolání obsluhy)			☒
8.0	Speciální nastavení: Omezení rychl. dávkování: 99.9 ml/h. Omezení rychl. dávkování bolusu 800 ml/h.			
Výsledek prohlídky: Byly zjištěny nedostatky, které mohou způsobit ohrožení pacienta, obsluhy nebo okolí. ☐ ANO ☒ NE				
Zdravotnický prostředek splňuje požadavky uvedené výše a vyhovuje technickým předpisům, popř. technickým dokumentům, technickým normám, podle nichž byl vyroben.				
Doporučená opatření:				
Datum příští prohlídky: 3. 2009	Prohlídku provedl: datum: 14. 3. 2009 podpis: Bičánek M.	Přístroj předán: datum: 14. 3. 2009 podpis: Dobesová Hana	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 585 443 459 Neurochirurgická klinika Intenzivní péče Přednost: Prof. MUDr. Michael Houdek, CSc.	

B | BRAUN

B. Braun Medical s.r.o.
Servisní centrum

HOTLINE

2

IČ: 485 86 285
DIČ: CZ48586285

Tel. +420-271 091 555
Fax: +420-271 091 556

Záznam o provedené kontrole uložte u provozní dokumentace přístroje.

06/35