

Kontrola prostředku zdravotnické techniky kontrola č.: 2005/0528

Zákazník

Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 6

775 Olomouc

Kontaktní osoba paní Ludvíková

IČO 00098892

Objednávka zákazníka: DO 8447

Ref.číslo dodavatele: 20050118

Periodická kontrola PZT dle

zák. č.346/2003 Sb. § 28 ☐

Ověření stavu PZT dle ☒

zák. č. 346/2003 Sb. § 52

D 022659

Oxymetr pulzní

typ **BCI 3301**

výr.číslo **270294155**

výrobce **BCI-USA**

rok uvedení 1997

ref. číslo **FN-14-09**

elektrobezpečnost baterie

klasifikační třída II b

v provozu - NCH JIP ✓

Záznam o provedených kontrolách a měření

pracovní postup: PP BCI 3301

1. Kontrola označení ☒

2. Kontrola dokumentace ☒

3. Kontrola vizuální ☒

4. Kontrola baterií ☒

5. Kontrola nastavení a kalibrace ☒

6. Kontrola příslušenství ☒

Model

Výrobní číslo

Stav%

ALV

31001061

75

Kontrola funkčnosti

8b) SpO2 modul

Tester SS-100A v.č.SS039516

Simulace		Alarmy		
SpO2	p/min	SpO2	p/m	
50+-2	80+-2	L	-	☒
85+-2	80+-2	-	-	☒
100-2	80+-2	H	-	☒
98+-2	35+-1	H	L	☒
98+-2	250+-5	H	H	☒

Alarmy ☒

Optická signalizace ☒

Zvuková signalizace ☒

9. Zhodnocení stavu PZT, doporučení, varování, závěr a termíny následných kontrol

PZT nevykazuje zjevné závady a kontrolní testy proběhly bez závad

Kontrolovaný PZT splňuje požadavky podle §52 zák.346/2003 Sb.

Ověřit dle §52 do: 9.8.2007 Kontrola dle §28 do: 9.8.2006 Hipot test do:

Kontrolu provedl

4.8.2005 Ivo Augsten

Kontrolu schválil

9.8.2005 Ing. Pavel Kabrie

Dokument je podepsán elektronicky řízeným způsobem.