

Kontrola prostředku zdravotnické techniky kontrola č.: 2005/0537

Fakultní nemocnice Olomouc

Objednávka zákazníka: DO 8447

Ref.číslo dodavatele: 20050118

I.P.Pavlova 6

775 Olomouc

IČO 00098892

Kontaktní osoba paní Ludvíková

Periodická kontrola PZT dle

zák. č.346/2003 Sb. § 28



Ověření stavu PZT dle

zák. č. 346/2003 Sb. § 52



D 024658

Oxymetr pulzní

typ BCI 3301

výr.číslo 330032234

výrobce BCI-USA

rok uvedení 1993

ref. číslo FN-14-20

elektrobezpečnost baterie

klasifikační třída II b

v provozu - NCH JIP

Záznam o provedených kontrolách a měření

pracovní postup: PP BCI 3301

1. Kontrola označení



2. Kontrola dokumentace



3. Kontrola vizuální



4. Kontrola baterií



5. Kontrola nastavení a kalibrace



6. Kontrola příslušenství



Model

Výrobní číslo

Stav%

ALV

21001028

75



Kontrola funkčnosti

8b) SpO2 modul

Tester SS-100A v.č.SS039516

Simulace		Alarmy		
SpO2	p/min	SpO2	p/m	
50+2	80+2	L	-	☒
85+2	80+2	-	-	☒
100-2	80+2	H	-	☒
98+2	35+1	H	L	☒
98+2	250+5	H	H	☒

Alarmy



Optická signalizace



Zvuková signalizace



9. Zhodnocení stavu PZT, doporučení, varování, závěr a termíny následných kontrol

PZT nevykazuje zjevné závady a kontrolní testy proběhly bez závad

Kontrolovaný PZT splňuje požadavky podle §52 zák.346/2003 Sb.

Ověřit dle §52 do: 9.8.2007 Kontrola dle §28 do: 9.8.2006 Hipot test do:

Kontrolu provedl

4.8.2005 Ivo Augsten

Kontrolu schválil

9.8.2005 Ing. Pavel Kabrle

Dokument je podepsán elektronicky řízeným způsobem.