

Kontrola prostředku zdravotnické techniky kontrola č.: 2005/0457

Fakultní nemocnice Olomouc

Objednávka zákazníka: OND 14906

Ref.číslo dodavatele: 20050037

Zákazník

I.P.Pavlova 6

775 Olomouc

IČO 00098892

Kontaktní osoba paní Ludvíková

Periodická kontrola PZT dle
zák. č. 346/2003 Sb. § 28



Ověření stavu PZT dle
zák. č. 346/2003 Sb. § 52



D 025 466

Oxymetr pulzní

typ **BCI 3304**

výr.číslo **701593016**

výrobce BCI-USA

rok uvedení 2001

ref. číslo FN-14-03

elektrobezpečnost napaječ

klasifikační třída II b

v provozu - NCH-JIP

Záznam o provedených kontrolách a měření

pracovní postup: PP BCI 3304

1. Kontrola označení



2. Kontrola dokumentace



3. Kontrola vizuální



provedena výměna krytu

4. Kontrola baterií



5. Kontrola nastavení a kalibrace



6. Kontrola příslušenství



Kontrola funkčnosti

8b) SpO2 modul

Tester SS-100A v.č.SS039516

Simulace		Alarmy	
SpO2	p/min	SpO2	p/m
50+-2	80+-2	L	-
85+-2	80+-2	-	-
100-2	80+-2	H	-
98+-2	35+-1	H	L
98+-2	250+-5	H	H



Alarmy



Optická signalizace



Zvuková signalizace



9. Zhodnocení stavu PZT, doporučení, varování, závěr a termíny následných kontrol

PZT nevykazuje zjevné závady a kontrolní testy proběhly bez závad. Používat síťový adaptér určený k tomuto pulsnímu oxymetru.

Kontrolovaný PZT splňuje požadavky podle §28 zák.346/2003 Sb.

Ověřit dle §52 do:

Kontrola dle §28 do: 31.7.2006 Hipot test do:

Kontrolu provedl

Kontrolu schválil

1.7.2005

Petr Kabrle

25.7.2005

Ing. Pavel Kabrle

Dokument je podepsán elektronicky řízeným způsobem.