

PROTOKOL

o prověření funkcí a technického stavu zdravotnického prostředku kontrolou
ve smyslu úplného znění zákona č. 123/2000Sb. (§28, §52)

Vlastník:

Fakultní nemocnice Olomouc

Ulice:

I.P.Pavlova 6

PSČ:

775 20

Město:

Olomouc

Oddělení:

NCH JIP

Číslo objednávky:

Číslo CSO:9028

Modelové číslo	Seriové číslo	Datum další kontroly nejpozději	Poznámka
KA006500 Osiris 2	E1820	29. 08. 2007	

Výše uvedený zdravotnický prostředek (a instalované moduly a příslušenství) byl prověřen testy podle metodiky výrobce v příslušném servisním manuálu. Těmto testům

VYHOVĚL a může být nadále používán k stanovenému účelu


K přístroji je používáno příslušenství a spotřební materiál doporučený výrobcem

Prověření provedl:

Jméno: Ing. Jan Richter

Datum: 29. 08. 2006

podpis + razítko

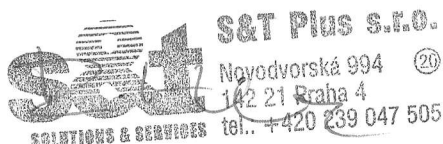

METRON QA-90 Safety Test Report

Operator : JAN RICHTER

Establishment :

QA-90 serial # : 10525

Date: 29. 8. 2006

Firmware : 03.49

Time: 12:59

Appliance Code :

Serial Number : E1820

Manufacturer : Taema

Group :

Type : transportni ventilator

Status :

Model : Osiris 2

Location : FN Olomouc, NCH JIP

Address 1 : I.P.Pavlova 6

Address 2 : Olomouc

Equipment classification : IP

Limits according to : IEC 60601.1

TEST RESULTS

-- MODULE INFORMATION --

Module Code

1

Module Type

B

No of leads

1

-- SETUP DATA --

Power Up Delay Time

: 5

Stop after new power config

: Yes

Stop at new module

: No

Stop before new power config

: Yes

Multiple Protective Earth Tests

: No

Multiple Enclosure Tests

: No

Protective Earth test current

: 25 A

External Isolating Transformer

: No

Test	Limit	Result	Warning
Supply Voltage			
N-G		103,6 V	
L-G		133,6 V	
L-N		233,2 V	
Current Consumption		100 mA	
Protective Earth		XX mΩ	
Insulating Resistance			
Applied Part-Case		>200 MΩ	
Mains-Case		>200 MΩ	
Earth Leakage Current			
OS		0 μA	
NC		0 μA	
OS-RM		0 μA	
NC-RM		0 μA	
Enclosure Leakage Current			
OS		0 μA	
NC	100 μA	0 μA	
OE		0 μA	
OS-RM		0 μA	
NC-RM		0 μA	
OE-RM		0 μA	
Patient Leakage Current AC			
OS, Module : 1, Lead : ALL		24 μA	

Patient Leakage Current AC (continued)

NC, Module : 1, Lead : ALL	100 μ A	4 μ A
OE, Module : 1, Lead : ALL		3 μ A
OS-RM, Module : 1, Lead : ALL		21 μ A
NC-RM, Module : 1, Lead : ALL		4 μ A
OE-RM, Module : 1, Lead : ALL		3 μ A

Mains on Applied Parts

SFC, Module : 1, Lead : ALL		51 μ A
SFC-RM, Module : 1, Lead : ALL		49 μ A

Enclosure Voltage RMS

OS		2 V
NC	30 V	1 V
OE		1 V

Enclosure Voltage DC

OS		0 V
NC	60 V	0 V
OE		0 V

Patient Leakage Current DC

OS, Module : 1, Lead : ALL		0 μ A
NC, Module : 1, Lead : ALL	10 μ A	0 μ A
OE, Module : 1, Lead : ALL		0 μ A
OS-RM, Module : 1, Lead : ALL		0 μ A
NC-RM, Module : 1, Lead : ALL		0 μ A
OE-RM, Module : 1, Lead : ALL		0 μ A

***** UNIT PASSED TEST! *****



Signature : _____