



TRANSKONTAKT - MEDICAL s.r.o.

Na Zatlane 5, CZ -150 00 PRAHA 5

DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001

PROTOKOL č. 025/2008

o kontrole zdravotnických prostředků dle § 28 a § 52 zák. 123/2000 Sb.

VÝROBNÍ ČÍSLO: 013706 i.č. I 014 955-000	INFUZNÍ PUMPA	NEMOCNICE: FN Olomouc
INSTALACE: 7.7.1997	ARCOMED VP 5000	I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
		ODD.: NCH JIP

Popis zkoušky	Povolení rozsah	Naměřené hodnoty
Stav skříně		DOBŘÍ
Elektro bezpečnostní testy	Ri (MΩ) > 50, Rz (Ω) 0,1	Ri 50 Rz 0,04 ZO1 4259421
Baterie/Dobíjecí proud		12V 1,7Ah / 152mA
Funkční testy:	ALARM, ČERPADLO, DVÍŘKA, DISPLEJ	DOBŘÍ
Spínače:	KAPKY, VZDUCH	DOBŘÍ
Kalibrace:	± 5 % IS - 125	30, 50, 100, 300, 600 ml/hod.
Výstupní tlak:	150 kPa - 250 kPa	ODPOVÍDÁ
Bezpečnostní tlak:	NASTAVENÍ 7-0	70 kPa
Stav mechanických dílů:		DOBŘÍ

Zařízení bylo podrobeno testu v délce 1 2 3 4 5 6 hodin.

Zak.list č.: 030/2008

Zkoušené zařízení odpovídá ~~neodpovídá~~ TP a vyhovuje ~~nevyhovuje~~ provozu.

Měření provedeno dne: 07-03-2008

Termín další kontroly: 7.3.2010

Měření provedl: SUCHOMEL Zdeněk

Protokol převzal:



TRANSKONTAKT s.r.o.
MEDICAL
Na Zatlane 5
150 00 PRAHA 5
kancelář: Starobrněnská 13
602 00 Brno

řádně: nemocnice Olomouc
odbor hlavního mechanika
dispečink oprav
I.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC
tel.: 583 443 125, fax: 588 442 529

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. Spisová značka: odd.C, vložka 11688

Bankovní spojení ČSOB Praha
IČO 45797803
DIČ CZ45797803

č.úctu 576455083/0300
Praha : Na Zatlane 5, 150 00 Praha 5
Brno : Starobrněnská 13, 602 00 Brno
e-mail: transkontakt @ medicaltk.com

Zelená linka: 800 100 895
Tel.: 25156 4228 Fax: 25156 6226
Tel.: 54221 2616 Fax: 54221 4052
www stránky: www.medicaltk.com