



TRANSKONTAKT - MEDICAL s.r.o.

Na Zatlane 5, CZ -150 00 PRAHA 5

DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001

PROTOKOL č. 014/2007

o kontrole zdravotnických prostředků dle § 28 a § 52 zák. 123/2000 Sb.

VÝROBNÍ ČÍSLO: 136 604 i.e.: 1018009-000	INFUZNÍ PUMPA ARCOMED VP 5000	NEMOCNICE: FN Olomouc I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
INSTALACE: 25.4. 1997		ODD.: T. CHÁZ, LÚŽKA

Popis zkoušky	Povolení rozsah	Naměřené hodnoty
Stav skříně		DOBRY
Elektro bezpečnostní testy	Ri (MΩ)>50, Rz (Ω) 0,1	Ri 50MΩ Rz 0,04Ω ZO1 4259421
Baterie/Dobíjecí proud		9,6V 1,7Ah / 50mA
Funkční testy:	ALARM, ČERPADLO, DVÍŘKA, DISPLEJ	DOBRE
Spínače:	KAPKY, VZDUCH	DOBRE
Kalibrace:	± 5 % IS - 125	30,50, 100, 300, 600, ml/hod.
Výstupní tlak:	150 kPa - 250 kPa	ODPOVÍDA
Bezpečnostní tlak:	NASTAVENÍ 7 - 4	50 kPa
Stav mechanických dílů:		DOBRY

Zařízení bylo podrobeno testu v délce 1 ② 3 4 5 6 hodin.

Zak.list č.: 039/2007

Zkoušené zařízení odpovídá ~~neodpovídá~~ TP a vyhovuje ~~nevyhovuje~~ provozu.

Měření provedeno dne: 15 -12- 2007

Termín další kontroly: 15.12.2009

Měření provedl: SUCHOMEL Zdeněk

Protokol převzal:



TRANSKONTAKT s.r.o.
MEDICAL
Na Zatlane 5
150 00 PRAHA 5
kancelář: Starobrněnská 13
602 00 Brno

Fakultní nemocnice Olomouc
odbor hlavního mechanika
dispečink oprav
I. P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC
tel.: 588 443 125, fax: 588 442 529

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. Spisová značka: odd.C, vložka 11688

Bankovní spojení ČSOB Praha č.účtu 576455083/0300

IČO 45797803

DIČ CZ45797803

Praha : Na Zatlane 5, 150 00 Praha 5
Brno : Starobrněnská 13, 602 00 Brno
e-mail: transkontakt @ medicaltk.com

Zelená linka: 800 100 895
Tel.: 25156 4228 Fax: 25156 6226
Tel.: 54221 2616 Fax: 54221 4052
www stránky: www.medicaltk.com