



# TRANSKONTAKT - MEDICAL s.r.o.

Na Zatlance 5, CZ -150 00 PRAHA 5

DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001

## PROTOKOL č. 015/2007 o kontrole zdravotnických prostředků dle § 28 a § 52 zák. 123/2000 Sb.

VÝROBNÍ ČÍSLO: 425603 i. č. 1014010-000	<b>INFUZNÍ PUMPA</b>  <b>ARCOMED VP 5000</b>	NEMOCNICE: FN Olomouc I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
INSTALACE: 25.4.1997		ODD.: I. CHIR. LUKÁŠA

Popis zkoušky	Povolení rozsah	Naměřené hodnoty
Stav skříně		DOBRY
Elektro bezpečnostní testy	Ri (MΩ) > 50, Rz (Ω) 0,1	Ri 50MΩ Rz 0,05Ω ZO1 4259421
Baterie/Dobíjecí proud		9,6V 1,7Ah / 53mA
Funkční testy:	ALARM, ČERPADLO, DVÍŘKA, DISPLEJ	DOBŘE
Spínače:	KAPKY, VZDUCH	DOBŘE
Kalibrace:	± 5% IS - 125	30, 50, 100, 300, 600, ml/hod.
Výstupní tlak:	150 kPa - 250 kPa	ODPOVĚDA
Bezpečnostní tlak:	NASTAVENÍ 7 - 4	65 kPa
Stav mechanických dílů:		DOBRY

Zařízení bylo podrobena testu v délce 1 (2) 3 4 5 6 hodin.

Zak.list č.: 040/2007

Zkoušené zařízení odpovídá ~~neodpovídá~~ TP a vyhovuje ~~nevyhovuje~~ provozu.

Měření provedeno dne: 15 -12- 2007

Termín další kontroly: 15.12.2009

Měření provedl: **SUCHOMEL Zdeněk**

Protokol převzal:



TRANSKONTAKT s.r.o.  
MEDICAL  
Na Zatlance 5  
150 00 PRAHA 5  
kancelář: Starobrněnská 13  
602 00 Brno

18-12-2007  
Fakultní nemocnice Olomouc  
odbor hlavního mechanika  
dispečinku oprav  
I. P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC  
tel.: 588 443 125, fax: 588 442 529

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. Spisová značka: odd. C, vložka 11688

Bankovní spojení ČSOB Praha  
IČO 45797803  
DIČ CZ45797803

č. účtu 576455083/0300  
Praha : Na Zatlance 5, 150 00 Praha 5  
Brno : Starobrněnská 13, 602 00 Brno  
e-mail: transkontakt @ medicaltk.com

Zelená linka: 800 100 895  
Tel.: 25156 4228 Fax: 25156 6226  
Tel.: 54221 2616 Fax: 54221 4052  
www stránky: www.medicaltk.com