

Výrobce
Valleylab

PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE ZP
DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE A ZÁKONA
č.123/00 Sb. a ve znění pozdějších předpisů
CUSA Excel

NIMOTECH s.r.o.
Šumavská 15
602 00 Brno
DIČ : CZ18825605

Umístění : NCI - COS

Zákazník: FN Olomouc
I. P. Pavlova 6
Olomouc

Výrobní číslo : 44I 1901S
Inventární číslo : 022504-000

Model : -8
Datum : 7.2.2007

Druh a výsledky kontrol a měření

Vizuální a mechanická inspekce : Ulomení brady zadních koleček

Výměna setu chladicího okruhu

ano / ne

Kontrola pravidelné výměny kontaminačního filtru ano - filtr OK

Výměna těsnících kroužků na konektoru nástroje ano / ne

Kontrola (nastavení) DC zdroje předpětí 4,72 (4,7Vdc -0+0,05)

Kontrola (nastavení) otáček motoru odsávání 3218 (3200+/-20ot/min)

Kontrola (nastavení) otáček motoru chlazení 67 (61 - 68 ot/min)

Nastavení hlasitosti alarmu

ano / ne

Test funkčnosti

ano / ne

Závěr:

Zdravotnický prostředek je - není
funkční a bezpečný pro použití k výrobcem určenému účelu při poskytování
zdravotní péče

Poznámky : _____

Při údržbě byly použity návody, dokumenty a postupy stanovené firmou Valleylab.
Zhotovitel prohlašuje, že splňuje požadavky národní legislativy k činnostem.

Datum příští kontroly : ÚNOR 2008

nimotech [®]
Šumavská 15, 602 00 Brno

Technickou kontrolu provedl : ing. MAREK

Práci převzal za pracoviště :

06/30
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 538 443 458
Neurochirurgická klinika
Operační sál
Předseda: Prof. MUDr. Michael Houdak, CSc.

BARICOVÁ E.

Baricon

RIGEL 277
LIST OF TEST RESULTS

DATE: 07 Feb 2007
APPL: U4I1901S
APPLIED PARTS: 1
SITE: CUSA EXCEL
LOCN: NCH OLOMOUC
MAREK 1
TEST: IEC 60601 1BF
COMMENTS:

VISUAL CHECK		P
EARTH CONT	0.09	P
LIMIT 0.10		
L-PE VOLTAGE	228	P
N-PE VOLTAGE	0	P
LOAD (kVA)	0.08	P
EARTH LEAK	- 0.082	P
LIMIT 0.50		
ENCL LEAK	- 0.003	P
LIMIT 0.10		
PAT LEAK (COM)	- 0.000~	P
LIMIT 0.10		
PAT LEAK (COM)	- 0.000	P
LIMIT 0.01		
PAT LK (F) (COM)	S 0.005	P
LIMIT 5.00		
ENCL LEAK	E 0.081	P
LIMIT 0.50		
PAT LEAK (COM)	E 0.000~	P
LIMIT 0.50		
PAT LEAK (COM)	E 0.000	P
LIMIT 0.05		
PAT LK (F) (COM)	SR 0.010	P
LIMIT 5.00		
EARTH LEAK	P 0.099	P
LIMIT 1.00		
ENCL LEAK	P 0.003	P
LIMIT 0.50		
PAT LEAK (COM)	P 0.000~	P
LIMIT 0.50		
PAT LEAK (COM)	P 0.000	P
LIMIT 0.05		
EARTH LEAK	R - 0.106	P
LIMIT 0.50		
ENCL LEAK	R - 0.003	P
LIMIT 0.10		
PAT LEAK (COM)	R - 0.000~	P
LIMIT 0.10		
PAT LEAK (COM)	R - 0.000	P
LIMIT 0.01		
PAT LK (F) (COM)	R S 0.011	P
LIMIT 5.00		
ENCL LEAK	R E 0.081	P
LIMIT 0.50		
PAT LEAK (COM)	R E 0.004~	P
LIMIT 0.50		
PAT LEAK (COM)	R E 0.000	P
LIMIT 0.05		
PAT LK (F) (COM)	R SR 0.011	P
LIMIT 5.00		
EARTH LEAK	R P 0.099	P
LIMIT 1.00		
ENCL LEAK	R P 0.003	P
LIMIT 0.50		
PAT LEAK (COM)	R P 0.000~	P
LIMIT 0.50		
PAT LEAK (COM)	R P 0.000	P
LIMIT 0.05		
STATUS:	PASS	