

REVIZE 2006

Protokol o servisní údržbě operačního stolu SATURN

dle doporučení výrobce a zákona č. 123/00 Sb. a ve znění pozdějších předpisů

NIMOTECH s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, tel: 549 246 688, Fax: 549 245 759

Specifikace přístroje		Výrobce: Trumpf Medizin Systeme	
Typ	SATURN	Výrobní č.	002 044914 IR kód 166
		Zákazník	FN OLOMOUČ NCH op.s. 1
Model	SM	Adresa	J.P. PAVLOVA 6
	family: GE GR GS GY		OLOMOUČ
Datum	2.3.2005	Podpis:	<i>[Signature]</i>
Servisní technik	ing. MAZEK		

Poznámka: * inv. č. 18490

* nutno doplnit olej

Bod č.	Kontrolovaná část	Testovací metoda	Cíl kontroly	Vyhovuje	Nevyhovuje
	Kontrola grafických symbolů na noze stolu	vizuální	Dobrá čitelnost	✓	
	Kontrola konektorů pro ovladač	vizuální	Čistota kontaktů	✓	
	Kontrola konektoru pro kabel na vyrovnávání potenciálů	vizuální	Čistota kontaktu	✓	
	Kontrola IR přijímače	vizuální	Nepoškozeno	✓	
	Kontrola gumové manžety	vizuální	Znečištění	✓	
	Kontrola krytů sloupku	vizuální	Nepoškozeno	✓	
	Kontrola membránové klávesnice	vizuální	Nepoškozeno	✓	
	Kontrola pozice a povrchu navážecích a pozičních senzorů	vizuální	Nepoškozeno	✓	
	Kontrola dosedací manžety na základní desce	vizuální	Nepohyblivost usazení	✓	
	Kontrola funkce všech tlačítek	stiskem	Nepoškozeno	✓	
	Test všech senzorů	magnet	Funkčnost všech	✓	
	Kontrola připojení baterií	vizuální	Sepnutí senzorů	✓	
	Kontrola všech vodičů a kabelů	vizuální	Přípevňovací fastony pevně drží	✓	
	Kontrola všech vodičů a kabelů	vizuální	Poškození	✓	
	Kontrola hydraulického systému	vizuální	Správné uložení	✓	
	Kontrola oleje	vizuální	Únik oleje		✓
			Hladina oleje v zásob.		✓

IR ovladač * 001045393

Kontrola membránové klávesnice	vizuální	Nepoškozeno	✓	
Kontrola závěsného háčku	vizuální	Nepoškozeno	✓	
Kontrola plastového krytu	vizuální	Pevnost upevnění	✓	
Kontrola tlačítek	vizuální	Nepoškozeno	✓	
Kontrola IR kódů piktogramů	vizuální	Rozsvícení LED kontrolky	✓	
Kontrola EPROM	vizuální	Čitelnost	✓	
Kontrola akumulátoru	vizuální	Pevnost usazení	✓	
Kontrola konekterů a pájených spojů kabelových propojek	vizuální	Pevnost usazení	✓	
		Nepoškozeno	✓	

mala' kapacita akumulátoru

skup v.č. 002 044914

Bod č.	Kontrolovaná část	Testovací metoda	Cíl kontroly	Vyhovuje	Nevyhovuje
--------	-------------------	------------------	--------------	----------	------------

IR dobíjecí agregát 001 045722

	Kontrola povrchu	vizuální	Nepoškozeno	✓	
	Kontrola napájecího kabelu	vizuální	Nepoškozeno	✓	
	Kontrola dobíjení	vizuální	Při zapojení do sítě svítí zelená LED kontrolka, po vložení IR ovladače se rozsvítí na ovladači oranžová LED kontrolka	✓	

Operační deska UNIVERSAL v.č. 001 044910

	Kontrola polstrování	vizuální	Nepoškozeno Pevnost upevnění		
	Kontrola připojovacích ploch	vizuální	Nepoškozeno Pevnost upevnění		
	Kontrola kolejnic	vizuální	Nepoškozeno Pevnost upevnění		
	Kontrola uzamykacích segmentů v klínových držácích	vizuální	Snadný pohyb Síla pružiny		
	Kontrola mechanických přípojných bodů	vizuální	Nepohyblivost v uzamčeném stavu Síla pružiny		

Přístroj

VYHOVUJE

NEVYHOVUJE

je - není bezpečný a klinicky provozuschopný

Datum příští údržby: 3/2006