

REVIZE 2005 OP STOL

Protokol o prověření operačního stolu SATURN

dle doporučení výrobce a zákona č. 123/00 Sb. a ve znění pozdějších předpisů

NIMOTECH s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, tel: 549 246 688, Fax: 549 245 759

Specifikace přístroje		Výrobce: Trumpf Medizin Systeme	
Typ	SATURN	Výrobní č.	001 044 914 IR kód 15F
		Zákazník	NCH OP a.s.
Model	SM	Adresa	FN Olomouc 6
	family: GE GR GS GY		I. P. Pavlova 6
Datum	4.10.2005	Podpis:	<i>[Signature]</i>
Servisní technik	Ing. MAZEK		

Poznámka:

Bod č.	Kontrolovaná část	Testovací metoda	Cíl kontroly	Vyhovuje	Nevyhovuje
	Kontrola grafických symbolů na noze stolu	vizuální	Dobrá čitelnost	✓	
	Kontrola konektorů pro ovladač	vizuální	Čistota kontaktů	✓	
	Kontrola konektoru pro kabel na vyrovnávání potenciálů	vizuální	Čistota kontaktu Nepoškozeno	✓	
	Kontrola IR přijímače	vizuální	Znečištění	✓	
	Kontrola gumové manžety	vizuální	Nepoškozeno	✓	
	Kontrola krytů sloupku	vizuální	Nepoškozeno	✓	
	Kontrola membránové klávesnice	vizuální	Nepoškozeno	✓	
	Kontrola pozice a povrchu navážecích a pozičních senzorů	vizuální	Nepoškozeno Nepohyblivost usazení	✓	
	Kontrola dosedací manžety na základní desce	vizuální	Nepoškozeno	✓	
	Kontrola funkce všech tlačítek	stiskem	Funkčnost všech	✓	
	Test všech senzorů	magnet	Sepnutí senzorů	✓	
	Kontrola připojení baterií	vizuální	Přípevňovací fastony pevně drží	✓	
	Kontrola všech vodičů a kabelů	vizuální	Poškození Správné uložení	✓	
	Kontrola hydraulického systému	vizuální	Únik oleje	✓	
	Kontrola oleje	vizuální	Hladina oleje v zásob.	✓	

IR ovladač *

NEVÍ

	Kontrola membránové klávesnice	vizuální	Nepoškozeno		
	Kontrola závěsného háčku	vizuální	Nepoškozeno Pevnost upevnění		
	Kontrola plastového krytu	vizuální	Nepoškozeno		
	Kontrola tlačítek	vizuální	Rozsvícení LED kontrolky		
	Kontrola IR kódů piktogramů	vizuální	Čitelnost		
	Kontrola EPROM	vizuální	Pevnost usazení		
	Kontrola akumulátoru	vizuální	Pevnost usazení		
	Kontrola konektů a pájených spojů kabelových propojek	vizuální	Nepoškozeno		

Bod č.	Kontrolovaná část	Testovací metoda	Cíl kontroly	Vyhovuje	Nevyhovuje
--------	-------------------	------------------	--------------	----------	------------

IR dobíjecí agregát

NEVÍ

	Kontrola povrchu	vizuální	Nepoškozeno		
	Kontrola napájecího kabelu	vizuální	Nepoškozeno		
	Kontrola dobíjení	vizuální	Při zapojení do sítě svítí zelená LED kontrolka, po vložení IR ovladače se rozsvítí na ovladači oranžová LED kontrolka		

Operační deska

V.Č. 002 044910

	Kontrola polstrování	vizuální	Nepoškozeno Pevnost upevnění	✓	
	Kontrola připojovacích ploch	vizuální	Nepoškozeno Pevnost upevnění	✓	
	Kontrola kolejnic	vizuální	Nepoškozeno Pevnost upevnění	✓	
	Kontrola uzamykacích segmentů v klínových držácích	vizuální	Snadný pohyb Síla pružiny	✓	
	Kontrola mechanických přípojných bodů	vizuální	Nepohyblivost v uzamčeném stavu Síla pružiny	✓	

Přístroj

VYHOVUJE

NEVYHOVUJE

Doba platnosti prověření : NA DŮRU NECHYŽENOU ZA PŘEDPOKLADU PRAVIDELNÝCH
BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÝCH PRAHLÍDEK 1x ROČNĚ

je - není bezpečný a klinicky provozuschopný

Datum příští údržby: 3. ŘEZEN 2006