

Module
DPS

Bezpečnostně technická kontrola
(podle zákona č. 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)


Fresenius Medical Care

Tuto kontrolu je třeba provést nejpozději po 12 měsících od poslední bezpečnostně technické kontroly autorizovaným servisem.

Zde neuvedená čísla kontrol nejsou součástí bezpečnostně technické kontroly.

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje požadavky národní legislativy potřebné k uvedeným činnostem.

Provedení a výsledek kontroly musí být vyznačeno v provozní knize přístroje.

Technik: Miroslav Kubeš

Umístění: FN Olomouc

Výrobní číslo: 18242909

Inv. číslo: IO20824

Typ přístroje: Module DPS

Upozornění: před bezpečnostně technickou kontrolou plně nabijte (16 hodin) akumulátor přístroje

SV č.: CZ

Č.	Procedura	Naměřeno	Stav
1.	Zobrazení ubíhajícího času mezi dvěma BTK (tEST1)	H/J/M	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	Datum poslední údržby (tEST1)	J/M/A	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	Celkový čas na displeji (tEST6)	H/J/M	<input checked="" type="checkbox"/>
4.	Kontrola LED (tEST2)		<input checked="" type="checkbox"/>
5.	Kontrola tlačítek klávesnice (tEST3) - (viz. Technický manuál, kapitola 3)		<input checked="" type="checkbox"/>
6.	Kontrola čidla tlaku (tEST9) - překontroluj, zda zobrazená hodnota je mezi 0 a 100g (nezatížené čidlo). - stiskni a uvolni čidlo, zobrazená hodnota musí být mezi 0 a 100g, - pokud ne, viz. kalibrační mód EtAL9		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
7.	Kontrola ADC převodníku (tESTb) - vstup 3: hodnota mezi $066 \leq 07D \text{ LSB} \leq 08F$ zobrazená hodnota-amplituda výstupu (0,6 V + 0,05) pokud je mimo toleranci, viz kalibrační mód EtAL9		<input checked="" type="checkbox"/>
8.	Kontrola čidla polohy (tEST C) - použij kalibr T300775-B nebo T300940E a T300775G horní poloha $114,5 \leq 115 \text{ mm} \leq 115,5$ spodní poloha $19,5 \leq 20 \text{ mm} \leq 20,5$ Pokud je mimo toleranci, viz kalibrační mód EtAL6		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

17.	Kontrola zámku - připojit Module na Base - připojit Base k napájení - stisknout ON na Module - kontrola, zda je č. Module zobrazeno na Base a na Module - kontrola, zda zobrazené číslo souhlasí s polohou Module na Base - pomalu odpojit Module - kontrola, že se rozsvítí kontrolka „C“ Pokud se objeví nějaká anomálie, postupujte podle „adjusting ILS“ v TM	<input checked="" type="checkbox"/>
18.	Kontrola akumulátoru - nabijte dostatečně akumulátor - test při rychlosti podávání 40 ml/h Pokud je autonomie menší než 3 hod., vyměň akumulátor. Pozn: akumulátor může ztratit 25 až 50 % své kapacity deklarované výrobcem kvůli svým chemickým článkům z důvodu stáří nebo nepřítomností nabíjecích a vybíjecích cyklů.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
19.	Test elektrické bezpečnosti - neutrální vodič a kovový plášť - fáze a kovový plášť	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Příští kontrola datum : 16.10.2009

Datum: 16.10.2008	Kontrolu provedl: Miroslav Kubeš	Podpis (razítko): FRESENIUS MEDICAL CARE Česká republika spol. s r.o. Lužná 591, 160 05 Praha 6 Tel.: 235 358 212 DIČ: CZ45790884 TECHNICKÝ SERVIS
---------------------------------	--	---

Zdravotnický prostředek je funkční a bezpečný pro použití k výrobcem určenému účelu při poskytování zdravotní péče a je uvolněn k dalšímu používání	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
---	---

Poznámka:		
Datum: 16.10.2008	Vystavil: Miroslav Kubeš	Podpis (razítko): FRESENIUS MEDICAL CARE Česká republika spol. s r.o. Lužná 591, 160 05 Praha 6 Tel.: 235 358 212 DIČ: CZ45790884 TECHNICKÝ SERVIS

FRESENIUS
MEDICAL CARE
ČR - technický
servis -
PSEUDONYM

Digitally signed by FRESENIUS
MEDICAL CARE ČR - technický
servis - PSEUDONYM
DN: cn=FRESENIUS MEDICAL
CARE ČR - technický servis -
PSEUDONYM, c=CZ
Date: 2008.10.16 11:32:08
+01'00'