

88041378

Martin Bičíště -BICELS, Resslerova 890, 500 02 Hradec Králové  
 DIČ:CZ6404282192, IČO:15591051, Číslo účtu 21397/0300  
 tel. 495 217 192 fax. 495 213 213

### BEZPEČNOSTNĚ-TECHNICKÁ KONTROLA ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Typ přístroje:</b><br>ENTERÁLNÍ PUMPA<br><br>FLOCARE 800 | <b>Výrobní číslo :</b><br>88041378<br><br><b>Invent. číslo:</b> | <b>Uživatel:</b><br><br><br><b>Oddělení:</b> |
|---|---|--|

Bezpečnostně-technická prohlídka je prováděna v souladu s návodem k použití a servisním návodem.

Použity výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřicí přístroje.

Všechny naměřené hodnoty musí být dokumentovány. Příslušenství a dokumentace musí být uvedena ve zkušebním protokolu.

| Kontrolovat                     | Zjištěné nedostatky | Poznámky | Potvrzení |
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|
| Kryt                            |                     |          | OK        |
| Klávesnice-folie/ovládací prvky |                     |          | OK        |
| Síťová zásuvka a kabel          |                     |          | OK        |
| Svěrka                          |                     |          | OK        |
| Baterie /akum./-záložní zdroj   |                     |          | OK        |
| Nožičky                         |                     |          | OK        |
| Rotorek                         |                     |          | OK        |
| Dokumentace                     |                     |          | OK        |

#### Funkční zkouška

|  |  |  |    |
|--|--|--|----|
| Průběh testu                           |  |  | OK |
| Zvukový-optický signál                 |  |  | OK |
| Reakce přístroje na vyvoditelné alarmy |  |  | OK |
| Okluzní tlak                           |  |  | OK |
| Kontrola kapacity akumulátoru          |  |  | OK |
| Signalizace displeje, indik. prvků     |  |  | OK |
| Test-umlčení alarmu                    |  |  | OK |
| Kontrola rychlosti dávkování           |  |  | OK |

#### Zkouška elektrické bezpečnosti dle ČSN EN 60601

|                      |  |                                   |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| Síťové nap.<br>220 V | Odpor ochr.vodiče vč.kabelu :<br>0,11 Ohmů | Unikající proud :<br>/PE 0,037 mA |
|----------------------|--|-----------------------------------|


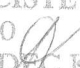
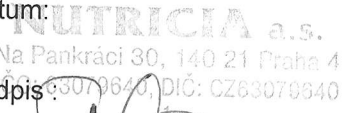

#### Výsledek kontroly

Zařízení je schopno bezpečného provozu:

**ANO**

Pokud NE - důvod:

Výše uvedený zdravotnický prostředek splňuje ustanovení par.27,28 a 52, zákona č.123/2000 Sb.

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Datum příští kontroly:</b><br><br>4/2008 | Kontrolu provedl:<br>VITOUŠ<br>Datum : 7.4.2006<br> Podpis:  | Přístroj předán:<br><br>Datum: <br>Podpis:  |
|---|--|---|